

MULTI-AD, SET DE TRANSFERT POUR LE REMPLISSAGE DES DIFFUSEURS EASYPUMP® II

UN REMPLISSAGE FACILITÉ DES DIFFUSEURS DE GRANDS VOLUMES

Multi-Ad est un système de transfert pour la préparation extemporanée de solutions médicamenteuses.

Dans cet outil d'aide à la manipulation du set de transfert et du diffuseur, les éléments sont différenciés par un code couleur : **set de transfert Multi-Ad** et **Easypump®II**

1 FERMER LE CLAMP



Fermer le **clamp** du Multi-Ad, et insérer le trocard sur le contenant qui contient la solution à perfuser.

Sur Ecoflac® ou poche, laisser la prise d'air fermée. Sur flacon verre ou flacon rigide, ouvrir le clapet de la prise d'air.

2 CONNECTER LA SERINGUE



Retirer le **capuchon de protection de l'embout luer-lock femelle** et connecter la seringue. Retirer le **capuchon de protection de l'embout luer-lock mâle**.

3 OUVRIR LE CLAMP



Ouvrir le **clamp** du Multi-Ad. Pour purger le système, prélever de la solution depuis son contenant, grâce à la seringue. Chasser l'air qui est arrivé dans la seringue lors de la purge, à travers l'**embout luer-lock mâle**, jusqu'à ce qu'une goutte soit visible.

4 OUVRIR LE CLAPET



Fermer le **clamp** du diffuseur Easypump® II. Ouvrir le **clapet de protection** et retirer le **capuchon du site de remplissage**. Le poser sur une surface stérile. Connecter l'**embout luer-lock mâle** au **site de remplissage**.

5 REMPLIR LA SERINGUE



Remplir la seringue complètement et injecter le contenu dans le **diffuseur Easypump® II**.

6 PURGER EASYPUMP® II



Procéder à la purge du diffuseur Easypump® II : ôter le capuchon de l'embout distal et ouvrir le clamp. Maintenir le filtre vers le haut jusqu'à ce qu'une goutte soit visible.

7 REMPLIR EASYPUMP® II



Refermer le **clamp** de Easypump® II et remplir la seringue à nouveau et injecter le contenu dans le diffuseur. Répéter cette étape jusqu'à atteindre le volume souhaité.

8 DÉCONNECTER EASYPUMP® II



Fermer le **clamp** de Multi-Ad et déconnecter Easypump® II du set de transfert. **Reboucher le site de remplissage** et fermer le **clapet de protection** de Easypump® II.

BÉNÉFICES UTILISATEURS

- Multi-Ad permet d'éviter les connexions et déconnexions multiples de la seringue. Il permet donc un **gain de temps** pour le soignant en **limitant les manipulations**.
 - Il permet un **système clos** et contribue au respect des **règles d'aseptie**.
-

POUR PASSER COMMANDE

Produit	Description	Boîtes de	Référence
Multi-Ad	Tubulure 109 cm	20	513548

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

Easypump® II, est destiné à administrer un traitement par perfusion intraveineuse, sous-cutanée ou péridurale continue (selon le modèle de diffuseur). Dispositif médical de classe IIb. Certificat CE délivré par TÜV SÜD Product Service (0123). Pour les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux utilisés pour la perfusion à domicile dans le cadre des forfaits PERFADOM de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), se reporter au site ameli.fr

Fabriqué par :

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun Str. 1 | D-34212 Melsungen | Allemagne

Multi-Ad est un système de transfert de liquides, pour la reconstitution extemporanée de solutions médicamenteuses. La tubulure de remplissage est un dispositif de transfert et non d'administration. Dispositif médical de classe I stérile. Certificat CE délivré par TÜV SÜD Product Service (0123).

Fabriqué par :

B. Braun Medical Inc | 824 12th Avenue | Bethlehem | PA 18018-3524 | Etats-Unis

Pour l'ensemble des dispositifs médicaux cités, lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Distribués par :

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud

Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856