

# CHALLENGER® TI

PINCES À CLIPS

CHIRURGIE MINI-INVASIVE





# CHALLENGER® TI

Pinces à clips .....	4
Boite de clips .....	4
Composantes et pièces détachées .....	5 - 6
Entretien .....	7
<u>Montage / démontage</u>	
Démontage .....	8
Montage .....	9

# CHALLENGER® TI



# NOTRE GAMME



ML

**PL506R**

**PL508R**

## Pince à clips

diam. 10 mm, longueur 370 mm

diam. 10 mm, longueur 260 mm

**PL569T**



## Boîte de clips

1:1

12 barrettes stériles,  
8 clips en titane par barrette  
code couleur pour le dernier clip (bleu)

taille du clip: **medium-large (ML)**

SM

**PL512R**

**PL600R**

## Pince à clips

diam. 5 mm, longueur 310 mm

diam. 5 mm, longueur 205 mm

**PL572T**



## Boîte de clips

1:1

12 barrettes stériles,  
12 clips en titane par barrette,  
code couleur pour le dernier clip (bleu)

taille du clip: **small-medium (SM)**

# CHALLENGER® TI



## Composantes et pièces détachées


<b>Tige</b> complète	<b>PL536R</b> Longueur de la tige 370 mm diamètre 10 mm	<b>PL538R</b> Longueur de la tige 260 mm diamètre 10 mm	<b>PL522R</b> Longueur de la tige 310 mm diamètre 5 mm	<b>PL601R<sup>1</sup></b> Longueur de la tige 205 mm diamètre 5 mm
<b>Tube interne</b>	<b>PL536802</b> Longueur de la tige 370 mm	<b>PL538802</b> Longueur de la tige 260 mm	<b>PL522801</b> Longueur de la tige 310 mm	<b>PL601801</b> Longueur de la tige 205 mm
<b>Barre de poussée</b>	<b>PL536801</b> Longueur de la tige 370 mm	<b>PL538801</b> Longueur de la tige 260 mm	<b>PL522800</b> Longueur de la tige 310 mm	<b>PL601800</b> Longueur de la tige 205 mm
<b>Poignée</b>	<b>PL510R</b>	<b>PL510R</b>	<b>PL510R</b>	<b>PL602R<sup>2</sup></b>
<b>Étoile de rotation</b>	<b>PL510300</b>	<b>PL510300</b>	<b>PL510300</b>	<b>PL510300</b>
<b>Bague de sécurité</b> Bague en C	<b>PL510301</b>	<b>PL510301</b>	<b>PL510301</b>	<b>PL510301</b>

ML





SM
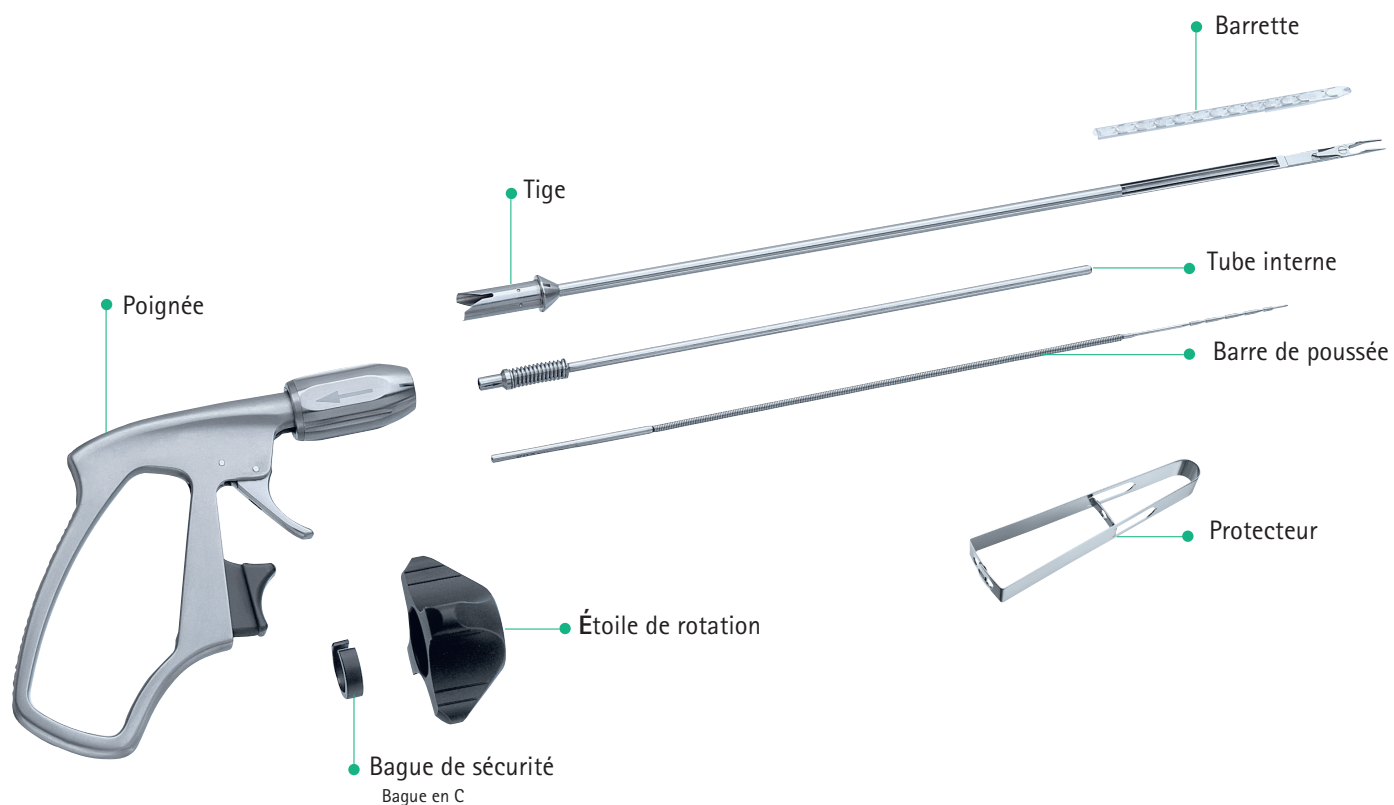
<sup>1</sup> non compatible avec PL510R


<sup>2</sup> non compatible avec PL536R, PL538R, PL522R



## ENTRETIEN

<p>Protecteur</p>  <p><b>PL522810</b></p>  <p><b>PL536810</b></p>	<p>Protège les mors durant le montage, le démontage et le traitement</p> <p>Ø/diam. 5 mm</p> <p>Protège les mors durant le montage, le démontage et le traitement</p> <p>Ø/diam. 10 mm</p>
<p>Brosse de nettoyage</p>  <p><b>GK469R</b></p>  <p><b>PM995R</b></p>	<p>Pour tube interne diam. 5 mm, longueur 550 mm, pack de 6 pcs.</p> <p>Pour tube interne diam. 10 mm, longueur 550 mm, pack de 6 pcs.</p>


# ENTRETIEN

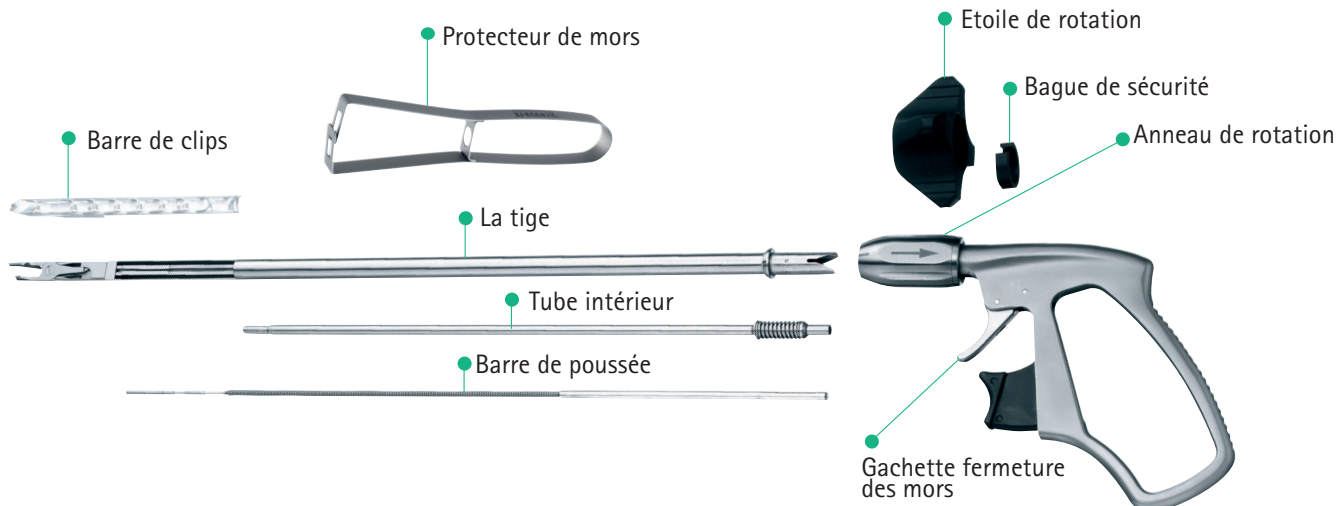

- Après l'étape de lavage/séchage, toutes les parties mobiles des pinces à clips doivent être lubrifiées.



- Après la lubrification de la tige, ouvrir et fermer les mors à plusieurs reprises à l'aide de la poignée.

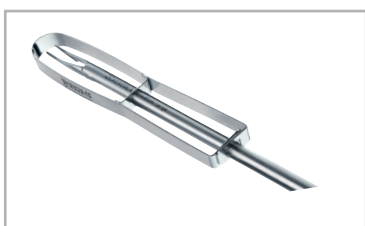

- Pour éviter des dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement, mettre le protecteur.

## ENTRETIEN ET ACCESSOIRES

- Nettoyer et stériliser le produit immédiatement après usage
- Le produit peut être stérilisé démonté ou assemblé
- Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, se référer à la notice d'instruction

## RÉPARATION

Afin de maintenir la qualité et la garantie des instruments Aesculap®, seules les personnes autorisées par Aesculap® sont habilitées à effectuer des réparations.

Merci d'envoyer les produits pour réparations à :


B. Braun Medical  
 Service Technique  
 ZI 520 rue Lavoisier  
 54713 Ludres  
 Tél 01 41 10 53 00 - Fax 03 83 57 41 24  
 Email: [bbraun\\_adv\\_sav@bbraun.com](mailto:bbraun_adv_sav@bbraun.com)



# DÉMONTAGE



1 Fermer les mors de la pince à l'aide de la gâchette noire, ôter la barrette de clips en tirant en premier la partie distale

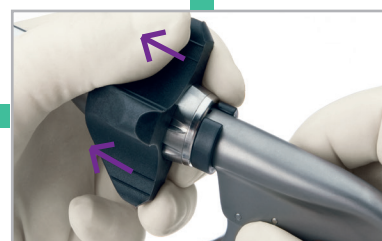


2 Retirer l'étoile de rotation noire




3 Tourner la bague de sécurité de sorte que l'ouverture soit en face de la gâchette.



4 Tenir la tige et tirer sur l'anneau de rotation vers l'arrière pour libérer la tige

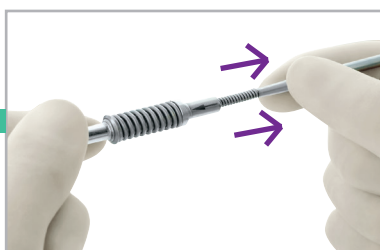

7 Sortez la barre de poussée du tube intérieur

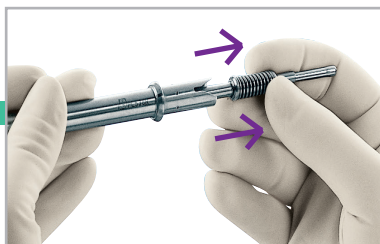

6 Retirer le tube intérieur de la tige



5 Retirer la tige et relâcher l'anneau de rotation

# MONTAGE




6 Remettre l'étoile de rotation sur l'anneau de rotation




5 Faire pivoter la bague de sécurité de 180° de telle sorte que la partie « ouverte » soit sur le dessus



4 Glisser la bague de sécurité sur la poignée et le positionner derrière l'anneau de rotation

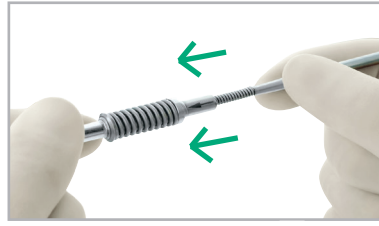

1 Vérifier l'état de la barre de poussée : elle ne doit pas être courbée ou fissurée. L'insérer dans le tube intérieur

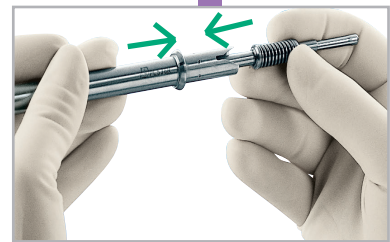

2 Insérer l'ensemble (tube intérieur + barre de poussée) dans la tige



3 Tirer l'anneau de rotation vers l'arrière et insérer la tige dans la poignée. La flèche noire sur l'anneau de rotation et le gravage sur la tige doivent être alignés

## CONTRÔLE DE FONCTIONNALITÉ

- Appuyer sur la gachette de fermeture des mors au maximum puis relacher. Il se peut qu'elle se bloque par mesure de sécurité. Vous pouvez l'activer une fois la gachette noire pressée.
- Fermer les mors. Leurs parties distales doivent se toucher et les mors doivent se fermer parallèlement.
- Si au moins un des éléments n'est pas fonctionnel, procéder à l'échange de la totalité de la pince.

Distribué par :

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Lire attentivement les instructions figurant dans notices et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition 03/2023