

Ureofix[®] 500 classic

Mesure de la diurèse horaire
et recueil des urines



Ureofix[®] 500 classic

Sécurité du recueil

B. Braun Medical : 40 ans d'expérience dans la production et la commercialisation de système de mesure de diurèse.

Ureofix[®] 500 classic est un système de mesure d'urine dédié à la diurèse et à l'évaluation de la qualité des urines.

Uréofix[®] 500 classic est issu de la nouvelle technologie B.Braun avec pour objectif d'apporter sécurité et confort pour le personnel soignant et ses patients :

- Risque de contamination réduit
- Mesure précise
- Vidange rapide du container
- Fixation simple
- Sécurité du site de prélèvement sans aiguille
- Sans Latex, sans DEHP



Risques d'infections réduits


Filtres d'air protégés de l'humidité

2 prises d'air protégées avec membrane hydrophobe, placés au niveau du container et de la poche de recueil, assurent l'équilibrage des pressions lors du remplissage et de la vidange.

Prévention du reflux urinaire

Présence d'une chambre de Pasteur intégrée, représentant un espace clos entre tubulure et réservoir, et avec valve anti-reflux :

- La valve anti-reflux empêche le reflux d'urine dans la tubulure et donc dans la vessie du patient.
- La valve anti-reflux se trouve normalement ouverte pour laisser descendre l'urine dans le container, et se ferme seulement au reflux de l'urine à partir du container.

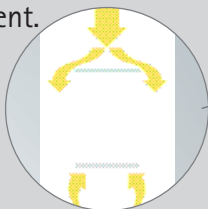

Double sécurité : valve anti-reflux intégrée sur le container ainsi que sur la poche de recueil. Limite une migration bactérienne rétrograde et réduit le risque d'infection urinaire.


Bouchon de vidange "en croix"

- Le bouchon de vidange "en croix" est présent sur toutes les poches de recueil de 2L de la gamme Uréofix® 500 classic
- Il peut être relevé pour éviter tout contact avec le sol.



Prélèvement urinaire sans aiguille

- Tous les systèmes de la gamme Uréofix® 500 classic sont munis d'un site de prélèvement sans aiguille en silicone, situé au niveau du connecteur de la tubulure, pour une plus grande sécurité de l'utilisateur.

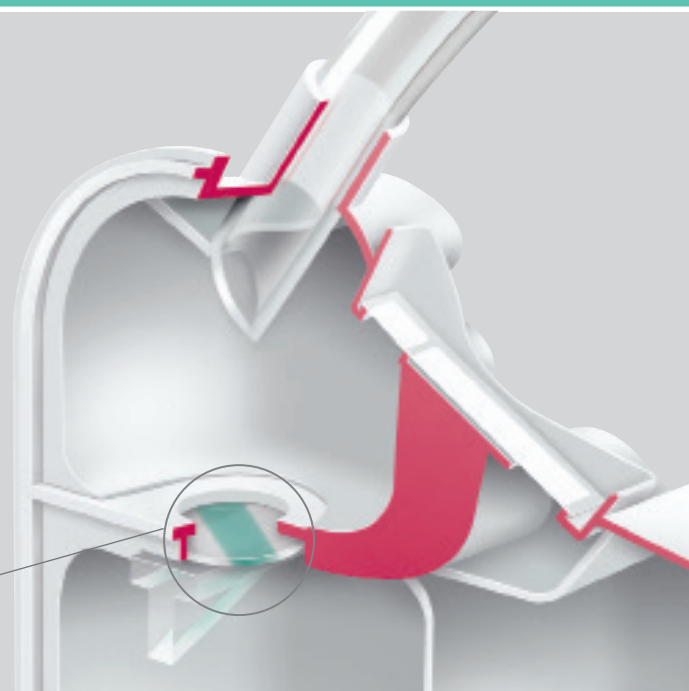

Ureofix[®] 500 classic

Adapté aux besoins des soignants

Un système de mesure de diurèse précis




Une lecture des volumes précise et claire

- La graduation régulière de la chambre de mesure permet une mesure précise.
- La précision au mL près permet la mesure du recueil urinaire en pédiatrie.

Identification des positions d'ouverture et de fermeture

Le container est muni d'une vanne rotative avec identification du système d'ouverture et de fermeture.

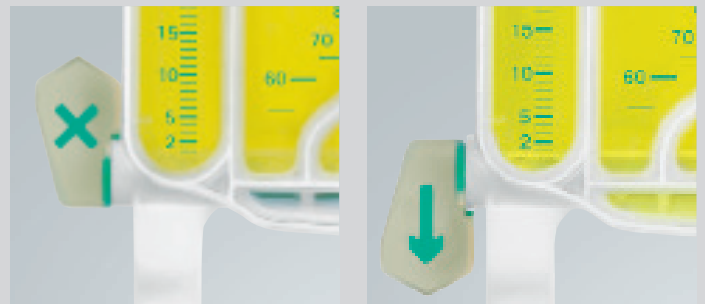

Poche de recueil pré-montée et sécurisée

- Le connecteur Luer Lock sécurise la connexion.
- La poche est accrochée sur le container grâce aux 2 ergots situés de part et d'autre du container

... avec poche de recueil urinaire vidangeable

Poche de recueil de 2 L
vidangeable et pré-montée

- Valve anti-reflux
- Filtre d'arrivée d'air
- Système de vidange
- Espace d'identification patient
- Poches de recharge disponibles seules sans le container.



... ou poche fermée

Poches de recueil des urines de 1,5 L et 3,5 L

- Valve anti-reflux
- Filtre d'arrivée d'air
- Espace d'identification patient
- Poches de recharge disponibles seules sans le container.

SANS LATEX
SANS DEHP



et 4 systèmes de fixation possibles







2 systèmes de fixation intégrés

Le système Uréofix® 500 classic dispose de 2 systèmes de fixation :

- un crochet amovible prémonté et intégré à l'arrière de la chambre de mesure ;
- deux attaches perforées prémontées sur le container.

2 systèmes de fixation en option

- un système de fixation crantée : les bandes de fixation sont directement installées sur le lit.
- une fixation plate amovible.

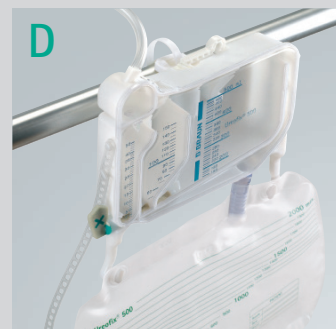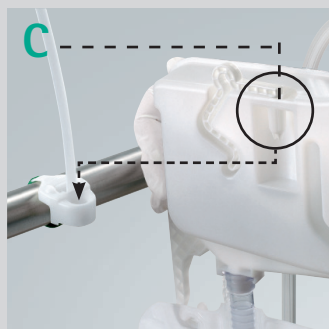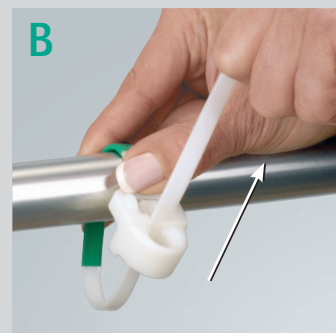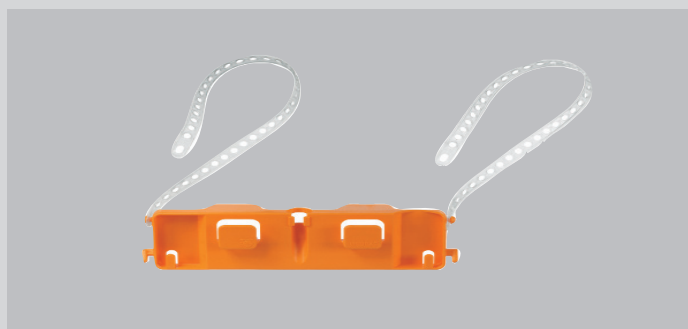

Ureofix® 500 classic



Sets	Longueur de tubulure	Références	Unités par boîte
Ureofix® 500 classic poche fermée 1,5 L	120 cm	4417910	10
	170 cm	4417920	10
Ureofix® 500 classic poche fermée 3,5 L	170 cm	4417960	10
Ureofix® 500 classic poche vidangeable 2 L	120 cm	4417930	10
	170 cm	4417940	10
	200 cm	4417950	10
Poches de rechange et accessoires		Références	Unités par boîte
Poche fermée 1,5 L		4417535	100
Poche fermée 3,5 L		4417543	100
Poche vidangeable 2 L		4417551	100
Fixation crantée		4417755	10 x 10
Fixation plate		4417780	25

Ureofix® 500 classic est un système de mesure de la diurèse en système clos.

Les systèmes de mesure de diurèse Uréofix® 500 classic sont des dispositifs médicaux de Classe I stériles avec fonction de mesurage (sets) et de classe I stériles (poches de rechanges).

Produit non pris en charge au titre de la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables au titre de l'article L165-1 du code de la sécurité sociale)

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Certificat CE délivré par TÜV SÜD (CE 0123)

Edition : 09/2015

URO_20150615

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Fabriqué par :

B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strass 1, D-34212 Melsungen, Allemagne

Distribué par :

B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt – France | Tel. 01.41.10.53.00 | www.bbraun.fr |
B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856