

Aesculap® Contrôle de fonctionnalité des conteneurs de stérilisation

Procéder à un examen visuel de toutes les pièces du conteneur de stérilisation avant chaque utilisation

1



- S'assurer de l'absence de déformation de la cuve, du couvercle et du sur-couvercle, surtout au niveau des zones de jonction entre les différents composants.
- Contrôler la planéité: pour cela retourner la cuve. Procéder de façon identique pour le couvercle

2



- Vérifier qu'il n'y a ni perforation, ni décollement, déformation ou coloration des joints du couvercle et des porte-filtres.
- En l'absence de filtre, la rotation du porte-filtre est impossible lorsqu'il est positionné sur le couvercle.

3



- Vérifier que le rivet central servant à la fixation du porte-filtre ne comporte pas de jeu.

4



- Les filtres utilisés doivent être adaptés à la perforation du couvercle et aux porte-filtres.
- Ils peuvent être :
 - à usage unique, dans ce cas les filtres doivent être changés à chaque cycle.
 - Réutilisables (en PTFE*), dans ce cas, pendant le nettoyage en machine ils peuvent demeurer sur le couvercle. Ils sont prévus pour 1000 cycles de stérilisation et de lavage.


*PTFE : Polytétrafluoroéthylène

5



- Placer le porte-filtre et l'encliqueter en appuyant sur le centre avec la paume de la main. Un «clac» sonore retentit alors.

6

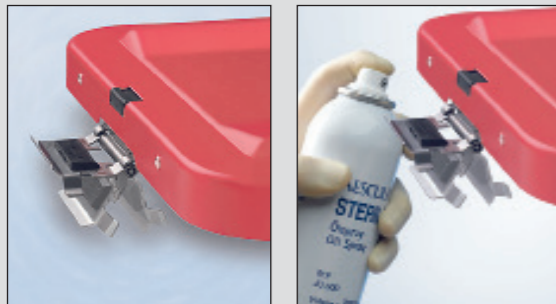

- Contrôler le bon état des plaques de fermeture ainsi que les rivets et écrous, ils ne doivent pas montrer de jeu anormal. Si besoin lubrifier les plaques de fermeture (avant la stérilisation avec une huile de stérilisation comme JG600).

7



- Positionner le couvercle sur la cuve : ils doivent s'ajuster sans forcer. Pour le conteneur Vario, le sur-couvercle peut être placé après fermeture du couvercle.

8



- Fermer le conteneur, en rabattant les plaques de fermeture, un «clac» sonore doit retentir de chaque côté.

9



- Vérifier que les poignées ne sont pas déformées.

10



- S'assurer du bon état des supports des plaquettes d'identification.

Conteneurs de stérilisation. Dispositifs médicaux de classe I, non pris en charge à titre individuel sur la LPPR.

Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage avant utilisation. Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.