

INFUSOMAT® SPACE

FICHE PRATIQUE – NETTOYAGE DE L'APPAREIL

La désinfection d'un appareil évite la transmission croisée de micro-organismes via les dispositifs médicaux (DM) de risque infectieux, et participe à garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

QUELQUES CONSIGNES GÉNÉRALES :


- Avant de désinfecter la pompe, toujours déconnecter cette dernière du patient, mettre hors tension l'appareil et le débrancher de l'alimentation.
- Veiller à enlever tout résidu visible de toutes les surfaces avant de désinfecter.
- Ne pas pulvériser de produits désinfectants directement sur la pompe. Utiliser un chiffon doux non pelucheux humecté mais pas saturé de produit.



1. Nettoyer toutes les surfaces exposées avec un chiffon doux non pelucheux propre avec une solution nettoyante douce d'eau savonneuse tiède.



2. Les glissières latérales peuvent se nettoyer avec un coton tige.

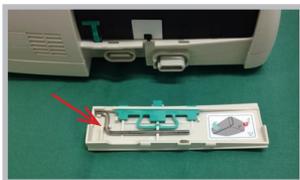

3. Retirer la manivelle qui se trouve à l'intérieur du couvercle de la batterie.



4. Tourner la manivelle pour retirer le couvercle de l'ouverture d'urgence.




5. Tourner la manivelle à l'intérieur de l'ouverture pour ouvrir la porte.




6. L'élément de guidage de ligne peut être retiré à l'aide d'un objet pointu inséré dans l'angle inférieur droit. Il est alors possible de plonger le couvercle dans un liquide pour le nettoyer et d'essuyer les "doigts" avec un chiffon doux.



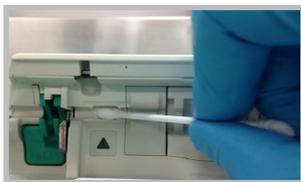

7. Nettoyer le capteur de pression aval.

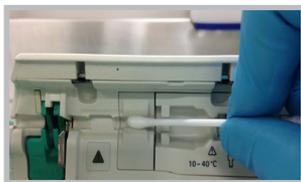

8. Nettoyer le détecteur d'air.



9. Nettoyer le capteur de pression amont.



10. Nettoyer le clamp de sécurité.



11. Nettoyer les charnières et la nappe clavier.



Après nettoyage et désinfection, laisser l'appareil sécher pendant au moins 20 minutes avant utilisation.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits. **Ce document n'est pas une notice d'utilisation. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.**

B.BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE
Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856