

CONTRE-INDICATIONS :

- Sur une peau irritée ou fragilisée.
- Sensibilité connue à l'un des matériaux de la gaine.

AVERTISSEMENT

La réutilisation et/ou le reconditionnement des dispositifs à usage unique peuvent créer un risque potentiel. Ils peuvent entraîner une contamination et/ou une défaillance de la capacité fonctionnelle du dispositif. Une contamination et/ou une fonctionnalité limitée du dispositif peuvent être à l'origine de lésions ou de maladies. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur une peau intacte ou des plaies fermées.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser en cas de réaction allergique ou si vous souffrez d'allergies connues aux composants du dispositif. Pour une bonne hygiène, changez l'étui pénien tous les jours.

L'utilisation d'un dispositif à usage unique pendant plus de 24 heures peut accroître le risque de complications. Suivez les instructions pour le retrait de l'étui pénien si vous constatez un gonflement, un engourdissement, une gêne, des douleurs, une décoloration ou un aspect anormal.

Remarque : En cas de complications lors de l'utilisation du dispositif, veuillez consulter votre professionnel de santé pour obtenir une assistance.

Dans les rares cas où une sensibilité aux matériaux se produirait, cessez d'utiliser l'étui.

Fabriqués par : Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits.

B. Braun Medical | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr

RCS Nanterre 562 050 856 | Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000€

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette avant utilisation.

Edition : Février 2021


ZG00146_20210209_20260209



LIVRET D'INFORMATIONS AUX UTILISATEURS URIMED® VISION

URIMED® VISION

LES BONS GESTES

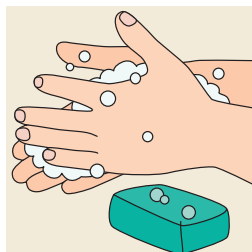

Pour commencer, lavez-vous les mains soigneusement à l'eau et au savon.

1. PRÉPAREZ




Coupez les poils pubiens à l'aide de ciseaux à bouts ronds. Ne pas raser ni épiler.



Faites la toilette de votre pénis à l'aide d'un savon doux et d'eau tiède. Séchez soigneusement.


Une peau mal séchée et/ou l'application de crème/d'huile peuvent réduire la durée de pose.

2. NETTOYEZ

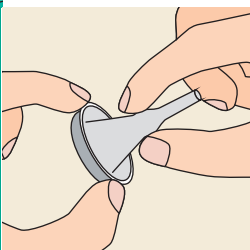


Ouvrez l'emballage en suivant la ligne perforée. Pour les versions «Ultra» et «Short» : retirez l'étui pénien de l'embout en plastique.

3. POSEZ

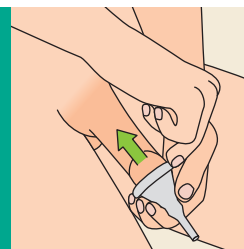


Placez la partie enroulée sur le gland en laissant un petit espace entre le gland et le cône de l'étui pénien.

4. DÉROULEZ

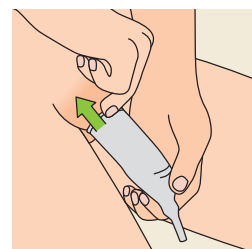

Déroulez l'étui pénien sur le pénis.


5. FAITES ADHÉRER

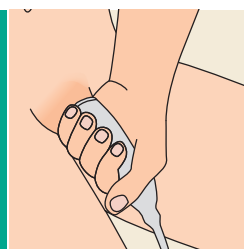

Pressez délicatement l'étui pénien de façon à ce qu'il adhère parfaitement à la peau.

Dans la mesure du possible, évitez de laisser un «bourrelet» enroulé autour de la base du pénis. Si le film adhésif n'adhère pas parfaitement à la peau, la durée de pose pourra être réduite.

6. CONNECTEZ LA POCHE DE RECUEIL

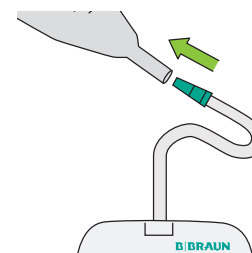


Raccordez l'étui pénien à une poche de recueil des urines. Vérifiez la bonne fixation avant utilisation.

URIMED® VISION

LES BONS GESTES

INSTRUCTIONS DE RETRAIT

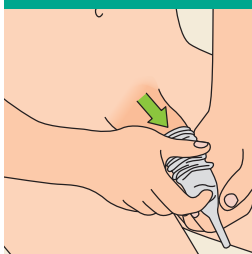

Vérifiez que la poche de recueil des urines est vide.

Débranchez l'étui pénien de la poche de recueil des urines.

Ré-enroulez délicatement l'étui pénien sur lui-même pour l'enlever.

Le cas échéant, appliquez une compresse tiède et humide sur l'étui pénien pour faciliter le décollement du film adhésif.

Vous avez des questions sur le produit en lui-même
ou sur son utilisation ?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE INFO CONSEIL AU :



0 800 51 98 07

à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h. Appel gratuit.

N'hésitez pas à contacter votre infirmier(e) ou votre pharmacien

DÉCOUVREZ LES POCHE DE RECUEIL URIMED® BAGS À CONNECTER AUX ÉTUIS PÉNIENS URIMED® VISION

Poches de recueil de jambe ou poches de grande contenance, elles vous accompagnent au quotidien !

3 POCHE À FIXER À LA CUISSE OU AU MOLLET



Urimed® Bag Plus
500 ml

*Poche compacte avec voile
velours pour protéger la peau*



Urimed® Tribag Plus
800 ml

*3 compartiments pour
épouser la forme de la jambe
Voile velours*



Urimed® Bag Plus
1,5L

*Poche de grande contenance
avec voile velours*

1 POCHE GRANDE CONTENANCE POUR LE RECUEIL DE NUIT



Urimed® Bag 2L

*Poche de grande contenance
Longue tubulure*

Demandez vos échantillons en
flashant ce code avec l'appareil
photo de votre smartphone :



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES POUR LES POUCHES URIMED® BAGS

POUR UNE FIXATION SUR LA CUISSE OU LE MOLLET



URIMED® FIX
notre filet porte-poche
Disponible en 2 tailles pour une fixation sur la cuisse ou le mollet.



URIMED® STRAP
à fixer en haut et en bas de la poche de recueil

POUR UNE FIXATION SUR UN SUPPORT (LIT, FAUTEUIL, ...)




URIMED® HANDLE
Pour fixer votre poche de recueil sur un support, par exemple votre lit, votre fauteuil roulant, ...

DEMANDEZ LA GAMME URIMED® À VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

ÉTUIS PÉNIENS

Urimed® Vision Standard

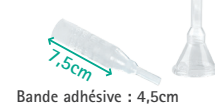

Bande adhésive : 4,5cm

30 étuis péniens auto-adhésifs
Modèle standard

Ø (mm)	Référence	GTIN
25	IH2525	4022495823427
29	IH2529	4022495823465
32	IH2532	4022495823502
36	IH2536	4022495823540
41	IH2541	4022495823588

Urimed® Vision Short



Bande adhésive : 4,5cm

30 étuis péniens auto-adhésifs
Modèle court

Ø (mm)	Référence	GTIN
25	IH4525	4022495823823
29	IH4529	4022495823861
32	IH4532	4022495823908
36	IH4536	4022495823946
41	IH4541	4022495823984

Urimed® Vision Ultra



Bande adhésive : 7,5cm

30 étuis péniens auto-adhésifs
Modèle avec large bande adhésive

Ø (mm)	Référence	GTIN
25	IH3525	4022495823625
29	IH3529	4022495823663
32	IH3532	4022495823700
36	IH3536	4022495823748
41	IH3541	4022495823786

POCHES

	Tubulure	Unités / boîte	Référence	UDI-DI
Urimed® Bag Plus 500ml	60 cm ajustable	30	28501R	26955824007330
Urimed® Tribag Plus 800ml	60 cm ajustable	30	28306R	26955824007316
Urimed® Bag Plus 1,5L	90 cm ajustable	30	28150R	26955824007170
Urimed® Bag 2L	120 cm Raccord pré-monté	30	28300R	26955824007118
Urimed® SP 2L stérile	100 cm Raccord pré-monté	10	28610R	26955824007064

ACCESSOIRES

	Unités/boîte	Référence	UDI-DI	
Urimed® Fix	Petit modèle / mollet	2	68520R	04039239505839
	Moyen modèle / cuisse	2	68530R	04039239505846
Urimed® Strap	Une paire	68550R	06955824007398	
Urimed® Handle	1 unité	68548R	06955824007374	