

Celsite® pour accès veineux

Pose et Entretien de l'aiguille de Huber Surecan® Safety II^{2,3}

Consulter la notice d'instructions de Surecan® Safety II avant utilisation

Indications¹

Chimiothérapie	Nutrition parentérale	Prélèvement sanguin
Antibiothérapie	Médicaments antiviraux	Transfusion sanguine

Tenue recommandée de l'opérateur :

-  Gants stériles
-  Charlotte
-  Masque



Pour plus d'informations, consulter SF2H – Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux

¹ Notice d'utilisation de Celsite®
² SF2H – Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux (2012) <https://sf2h.net/publications/prevention-infections-associees-aux-chambres-a-catheter-implantables-acces-veineux>
³ Notice d'utilisation de Surecan® Safety II

Chambres à cathéter implantables Celsite®
Dispositifs médicaux de classe III. Certificats CE délivrés par le G-MED (CE 0459)
Fabriqués par B. Braun Medical.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.
Non inscrites sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé. ed. 03/2014

Distribué par :
B. Braun Medical | 204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS NANTERRE 562 050 856
ed. 06/2017 301374P_20170626_20220626