

Cathéter court périphérique INTROCAN® SAFETY

POSE DU CATHÉTER COURT SÉCURISÉ

1 PRÉPARER LA POSE DU CATHÉTER




Placer un garrot sur le bras du patient et **PRÉPARER LE SITE DE PONCTION** selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.

Saisir la **CHAMBRE DE VISUALISATION** du cathéter entre le pouce et le majeur et retirer le capuchon protecteur avec l'index.

VERIFIER QUE LA CHAMBRE DE VISUALISATION ET L'EMBASE DU CATHÉTER NE SOIENT PAS DÉOLIDARISÉES.

4 MONTER LE CATHÉTER

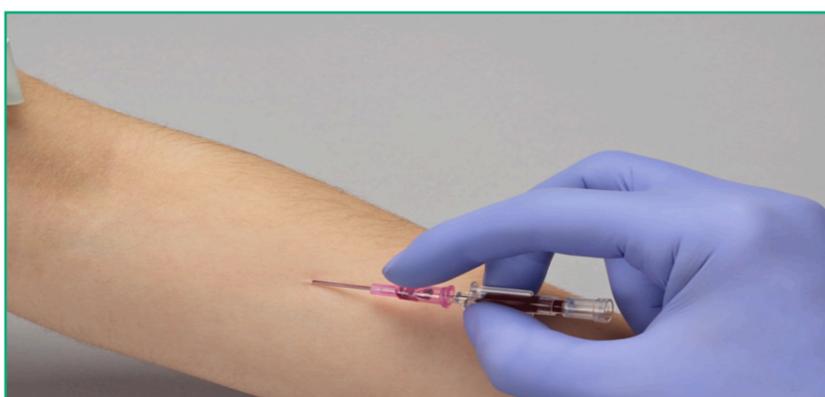

A l'aide de l'ergot, **AVANCER LE CATHÉTER POUR LE DÉTACHER DE L'AIGUILLE** (environ 3 mm).

Observer le second **REFLUX SANGUIN** entre l'aiguille et le cathéter pour confirmer que le cathéter est dans le vaisseau.

Après confirmation, continuer à monter le cathéter dans le vaisseau.


2 INSÉRER LE CATHÉTER



Piquer selon un **ANGLE DE PONCTION ADÉQUAT** (l'ergot vers le haut indique que le biseau est bien orienté pour piquer).

Observer le **REFLUX SANGUIN** dans la chambre de visualisation du cathéter afin de vérifier que le dispositif est bien dans le vaisseau.

5 RETIRER L'AIGUILLE

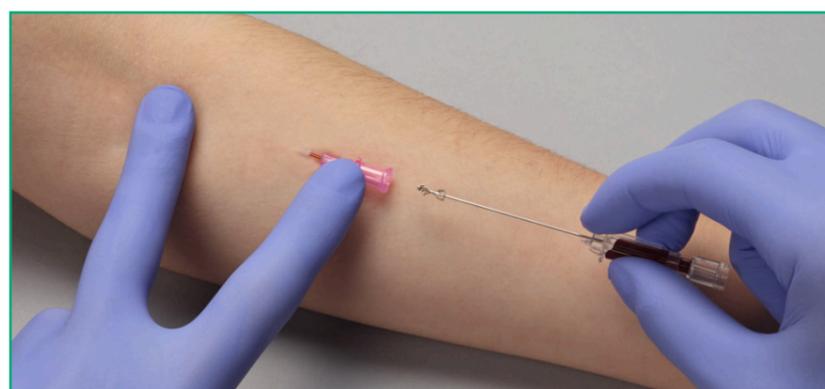

Retirer le garrot, comprimer la veine et maintenir le cathéter avec un doigt sur l'ergot. Retirer l'aiguille (**SÉCURITÉ AUTOMATIQUE**) d'un geste contrôlé et continu (minimiser les rotations et pliures de l'aiguille) et l'éliminer dans un conteneur prévu à cet effet.

3 BAISSER ET AVANCER LÉGÈREMENT LE CATHÉTER



ABAISSER et **AVANCER** légèrement l'ensemble cathéter et aiguille pour s'assurer que l'extrémité du cathéter est dans le vaisseau.

6 FIXER LE DISPOSITIF



Raccorder le cathéter à la tubulure de perfusion et couvrir le site de ponction d'un pansement stérile et transparent en polyuréthane pour permettre la surveillance du point d'insertion¹ selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.

Il est fortement recommandé d'assurer une traçabilité de la pose du cathéter périphérique dans le dossier patient : TYPE DE CATHÉTER PÉRIPHÉRIQUE, DATE DE POSE, DATE D'ABLATION, CALIBRE ET SITE DE POSE, NOM DE L'OPÉRATEUR²



INTROCAN® SAFETY

UNE GAMME SÉCURISÉE

Taille de gauge	Références sans ailettes PUR*	Références avec ailettes PUR*	Références sans ailettes FEP**	Références avec ailettes FEP**	Diamètre ext. (mm)	Longueur (mm)	Débit (ml/mm)
24G	4251607-01	4251614-01	-	-	0,7	14	26
24G	4251601-01	4253523-01	4253500-01	4254501-01	0,7	19	22
22G	4251628-01	4253540-01	4252519-01	4254511-01	0,9	25	35
20G	4251644-01	4253566-01	4252535-01	4254538-01	1,1	32	60
18G	4251687-01	4253604-01	4252560-01	4254562-01	1,3	32	105
18G	4251679-01	4253590-01	4252551-01	4254554-01	1,3	45	100
16G	4251709-01	-	4252586-01	-	1,7	32	215
16G	4251695-01	4253612-01	4252578-01	4254570-01	1,7	50	210
14G	4251717-01	4253639-01	4252594-01	4254597-01	2,2	50	345

Conditionnement : boîte de 50 unités, sous blisters individuels

¹D'après les recommandations de la SF2H "Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés" - Mai 2019 Hygiène. Volume XXVII - N°2 - R10 Niveau de preuve B-1 (il est recommandé de faire - Preuve scientifique établie) et B-3 (il est recommandé de faire - Faible niveau de preuve)

²D'après les recommandations de la SF2H "Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés" - Mai 2019 Hygiène. Volume XXVII - N°2 - R16 Niveau de preuve A-3 (il est fortement recommandé de faire - Faible niveau de preuve)

*PUR : Polyuréthane

**FEP : Propylène d'éthylène fluoré

Dispositif médical de classe IIa

Introcane Safety® est indiqué pour les prélèvements sanguins, le monitoring de la pression sanguine et l'administration des solutions, des produits sanguins ou des médicaments (avec ou sans solution de transport) par perfusion, conformément au RCP du médicament ou de la solution.

Certificat CE délivré par TÜV SÜD (0123)

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage

Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables au titre de l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale)

Fabriqué par B.Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Strasse 1 | D-34212 Melsungen

Pictogrammes provenant de FREEPIK

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

Ref. 301867P_20230418_20280418

Edition Avril 2023

B. Braun Medical | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud

Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 70 83 45 00 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856