

Première mise en service des conteneurs de stérilisation B. Braun Aesculap®

Ces recommandations s'appliquent aux conteneurs de stérilisation Aesculap en aluminium anodisé de type Vario, Basis et AESCULAP Aicon

I. Vérification

- Contrôler la conformité de la commande et du bon de livraison
- Retirer l'emballage
- Contrôler la référence
- Procéder à un examen visuel

II. Stockage

- Conserver les conteneurs de stérilisation dans un endroit sec, propre et protégé

III. Nettoyage

Dissocier la cuve, le couvercle et le sur-couvercle

Lavage machine

- Utiliser un cycle de lavage spécifique aux conteneurs (le cycle instrumentation n'est pas adapté)
- Utiliser un produit à pH compris entre 7,5 et 9,5 (jusqu'à 10,5 au cours des lavages suivants)
- Eviter les zones d'ombre (système de fermeture des couvercles tourné vers l'intérieur ...)

Lavage manuel

- Nettoyer les conteneurs avec un produit de lavage à pH compris entre 7,5 et 9,5 (jusqu'à 10,5 au cours des lavages suivants)
- Ne pas utiliser de brosses métalliques ou abrasives
- Rincer à l'eau osmosée ou déminéralisée
- Pour les parties creuses, l'utilisation d'air comprimé est autorisée

IV. Conditionnement

- Contrôler la fonctionnalité de toutes les pièces du conteneur pour vérifier l'absence de détérioration et le bon fonctionnement
- Mettre en place le filtre adéquat
- Charger les conteneurs de stérilisation de telle sorte que les porte-filtres demeurent dégagés
- Mettre en place l'étiquette plomb de traçabilité

V. Stérilisation

- Positionner les conteneurs dans l'autoclave avec leurs sur-couvercles en place

Pourquoi laver des conteneurs neufs ou revenus de réparation ?
Car la couche de passivation est encore faible, les conteneurs sont plus sensibles aux conditions de traitement

