

INFUSOMAT® SPACE ET PERFUSOR® SPACE

FICHE PROGRAMMATION – KIT PCA

La PCA (*Patient-Controlled Analgesia*), ou analgésie contrôlée par le patient, est une méthode permettant à une personne éprouvant une douleur, de s'administrer un analgésique. Un kit PCA peut être connecté à votre votre appareil Infusomat® Space ou Perfusor® Space, dans le cadre du traitement de la douleur à domicile*.



Le kit PCA se branche directement sur la pompe. Le câble d'alimentation vient ensuite se connecter sur le kit PCA.

Avec votre appareil Infusomat® Space ou Perfusor® Space, la fonction PCA est accessible via la «Bibliothèque de médicaments», sous réserve d'avoir été paramétrée.

1 - ACCÈDER À LA FONCTION PCA

- **Perfusor® Space :**

Une fois l'appareil allumé, ouvrir le verrou de seringue, puis insérer la seringue. Choisir la seringue utilisée à l'aide des flèches ▲ et ▼, puis appuyer sur ◀ pour valider.

- **Infusomat® Space :**

Une fois l'appareil allumé, appuyer sur ▲ puis sur ▲ pour ouvrir la porte et insérer la tubulure.

Une fois la tubulure insérée, refermer la porte, puis choisir la tubulure utilisée à l'aide des flèches ▲ et ▼, puis appuyer sur ◀ pour valider.

- Le message «Util. biblioth. de médic. ?» apparaît. Valider en cliquant sur ▲.
- Utiliser les flèches ▲ et ▼ pour atteindre « PCA ».
- Valider en cliquant sur la touche ◀ ou sur OK.

2 - PARAMÉTRER LE MODE PCA

- Utiliser les flèches ▲ et ▼ pour accéder à l'analgésique souhaité.
- Appuyer sur ◀ pour valider.
- Par sécurité, le clavier est désormais verrouillé.
- Le code de déverrouillage par défaut est 9119.

*Avant la mise en service d'Infusomat® Space ou de Perfusor® Space, toute personne utilisant cet appareil doit en avoir consulté la notice d'utilisation et avoir été dûment formé à son utilisation.

Paramètres du mode PCA

Volume bolus

Il s'agit du volume administré à chaque pression sur le bouton  qui se trouve sur la manette du patient, ou sur le bouton  sur la pompe ou le pousse-seringue.


Fenêtre réfractaire (Fen refr.)

Il s'agit de l'espace minimal de temps entre deux administrations de bolus. Si le patient appuie sur le bouton de bolus pendant ce laps de temps, l'indication sonore sera toujours activée, mais sans administration de l'analgésique.

Dose de charge


Utilisez cette fonction si vous souhaitez administrer un bolus initial.

3 - DÉMARRER LA PERFUSION

Une fois tous les paramètres souhaités indiqués, vous pouvez démarrer la pompe ou le pousse-seringue en appuyant sur .

Lorsque la thérapie est en cours, accédez au menu principal en appuyant sur . Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour afficher les informations suivantes :

- **tps restant** : temps restant de la fenêtre réfractaire, s'il y en a une en cours.
- **A/D** : ratio du nombre de bolus administrés sur le nombre de bolus demandés.

En appuyant une deuxième fois sur  ce ratio apparaît sous forme d'un graphique : les bolus administrés apparaissent en haut, ceux demandés apparaissent en bas.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits. **Ce document n'est pas une notice d'utilisation mais une aide à l'utilisation simplifiée. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.**

B.BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE
Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856