

Allégez votre quotidien...

Plus de 3 millions de femmes en France souffrent d'incontinence urinaire à l'effort !^{(1) (2)}
Les fuites urinaires peuvent vous priver des plaisirs quotidiens les plus simples, comme rire, courir ou sortir sans crainte d'embarras, et vous restreindre dans vos activités physiques et sociales.⁽²⁾

Ne vous laissez pas emprisonner,
choisissez la protection 100% discrète !



Efficacité

 cliniquement prouvée dans la prise en charge de l'incontinence d'effort chez la femme.⁽⁴⁾


Dans l'étude clinique⁽⁴⁾ :

- ☀ Diveen® diminue l'incidence des fuites en moyenne de 69 % [28-100%].
- ☀ Les patientes de l'étude ayant utilisé Diveen® en sont très satisfaites : note de 78/100.*
- ☀ L'utilisation de Diveen® semble améliorer le bien-être émotionnel de ces utilisatrices.

La solution Diveen®

Diveen® est un dispositif médical intravaginal, indiqué pour les femmes souffrant de fuites urinaires dues à une incontinence urinaire d'effort pure ou mixte.
Le dispositif se met en place comme un tampon vaginal.⁽³⁾

Optez pour Diveen® légèreté et efficacité en toute discrétion

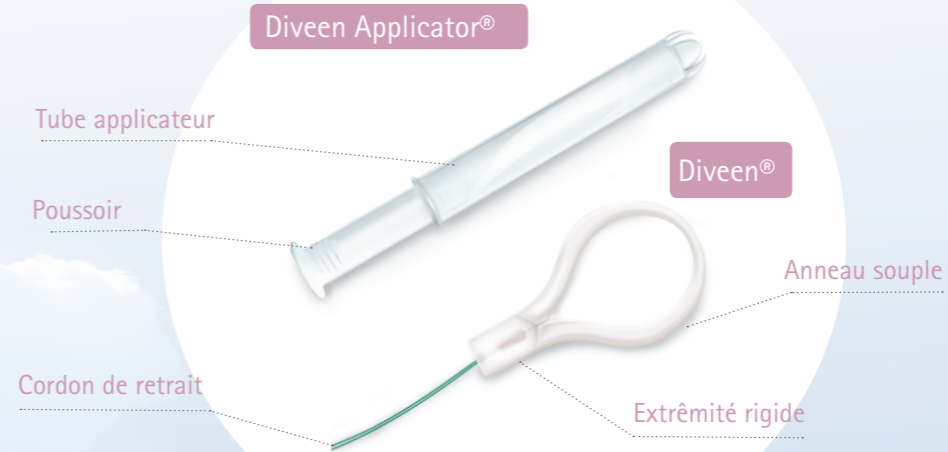

Concept innovant et breveté



Ce dispositif est conçu pour soutenir mécaniquement la paroi supérieure du vagin dans la zone située sous le col vésical. Lors d'un effort, le poids de la vessie va venir exercer une pression sur l'anneau souple du dispositif qui, par un effet de levier, va soutenir le col vésical et ainsi réduire mécaniquement le risque de fuite urinaire.⁽³⁾⁽⁴⁾

Pourquoi utiliser Diveen® ?

- Mécanisme unique qui, dans l'étude clinique, a **réduit significativement le risque de fuites urinaires.**⁽⁴⁾
- Protection 100% discrète.
- **Conçu pour 12h de contrôle de l'incontinence** afin de pratiquer des activités physiques en toute sérénité. Retirer le dispositif la nuit après une journée d'utilisation.⁽³⁾
- Utilisation simple, **sans nécessité de le retirer** pendant la journée, y compris pour uriner.⁽⁵⁾
- Peut s'utiliser sans applicateur.



www.diveen-bbraun.fr

⁽¹⁾ Pyramide des âges au 1er janvier 2014, France. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1913143?sommaire=1912926>

⁽²⁾ Haab F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en Urologie 2001, 11:336-339

⁽³⁾ Notice d'utilisation Diveen®

⁽⁴⁾ Cornu J.N et al. 75NC007 device for non invasive stress urinary incontinence management in women: a randomized controlled trial. Int Urogynecol J (2012);23(12):1727-1734

Etude prospective, contrôlée et randomisée en ouvert portant sur 55 patientes, dont 41 per protocol. Les données présentées sont celles de la population per protocol.

* Versus une note de 5/100 pour l'amélioration des symptômes urinaires par les non utilisatrices de Diveen (p<0,0001)

⁽⁵⁾ Ne pas utiliser le dispositif en période de règles, ni au cours de la grossesse. Ne pas garder le dispositif pendant les rapports sexuels.

Diveen® en quelques gestes*

Insertion avec applicateur.

1. Avant application

- Lavez-vous les mains.
- Installez-vous dans la position qui vous semble la plus confortable.

2. Préparation du dispositif

- Pincez l'anneau du dispositif et introduisez-le dans le tube applicateur.
- Positionnez le poussoir dans le tube applicateur.



3. Introduction du dispositif

- Insérez le tube applicateur de deux centimètres dans le vagin, puis appuyez sur le poussoir pour positionner le dispositif dans le vagin (comme un simple tampon hygiénique avec applicateur).



4. Retrait du dispositif

- Tirez doucement sur le cordon de retrait vers l'extérieur.



* Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Consultez votre médecin pour une première utilisation.



Taille	Ref	EAN 13	Unités/boîte
Small	3132R	4046964675409	5 dispositifs
Medium	3133R	4046964675423	+ 1 applicateur
Small	3022R	4046964262562	15 dispositifs
Medium	3023R	4046964262586	+ 1 applicateur

Dispositif médical intravaginal pour les femmes souffrant de fuites urinaires dues à une incontinence urinaire d'effort pure ou mixte.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Merci de vous reporter aux conseils d'un médecin si besoin.

Fabriqué et distribué par :

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud France | Tél : 01.41.10.53.00
www.bbraun.fr | monservice.diveen@bbraun.com
Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000€.
RCS Nanterre 562 050 856.

Pour plus d'information :

www.diveen-bbraun.fr

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques, les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive du groupe B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable du groupe B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle du groupe B. Braun.
Document et photo non contractuels.

Edition : Mars 2018 ZG00761_20180102_20230102



Crédits photos : Fotolia, © iko, © bigfoot, © rodjulian

DIVEEN®

1er dispositif intravaginal conçu pour réduire les fuites urinaires à l'effort