


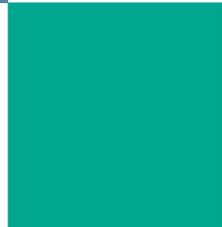

LA TECHNOLOGIE ACTREEN®
UN REGARD NEUF SUR LA LUBRIFICATION HYDROPHILE



LA LUBRIFICATION ACTREEN®

FORMULE À BASE DE GLYCÉRINE & D'EAU POUR UNE LUBRIFICATION HYDROPHILE

Qu'est-ce que la glycérine?⁽¹⁾

La glycérine (ou glycérol) est un polyol de faible poids moléculaire naturellement présent dans l'organisme.

C'est une substance largement utilisée dans les formulations pharmaceutiques, principalement pour ses propriétés **hygroscopiques** et **lubrifiantes**, mais aussi dans les produits cosmétiques pour ses propriétés **humectantes**, **émollientes** et sa **bonne tolérance**.



Notre glycérine est d'origine végétale.⁽²⁾

⁽¹⁾ The Soap and Detergent Association. Glycerine : an overview. 1990.


⁽²⁾ Déclaration de conformité glycérine. 11/01/2016. SPIGA Nord SpA.

Pourquoi utiliser la glycérine dans notre lubrifiant ?

EFFET ÉPAISSISSANT

La glycérine est plus visqueuse que l'eau. Lorsqu'elle est diluée dans l'eau, elle prend la forme de gel.

Sa nature hygroscopique lui permet de retenir l'eau, ce qui stabilise le mélange. ⁽¹⁾ Par conséquent, cela permet une bonne glissance lors de l'insertion de la sonde et évite les éclaboussures.

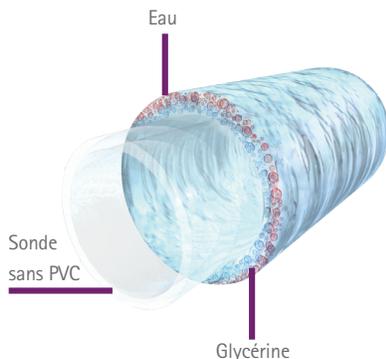

- Formule d'eau gélifiée pour un lubrifiant hydrophile unique
- Effet hygroscopique
- Sonde prête à l'emploi : pas de gestion de l'eau



RETIENT L'HUMIDITÉ SUR UNE LONGUE DURÉE

La glycérine étant fortement hygroscopique, elle retient l'humidité, par exemple sur la peau ou sur la surface d'une sonde.

Les sondes B. Braun Actreen® ne sèchent pas durant plus d'une heure et gardent le même niveau de lubrification : cela garantit une **lubrification identique depuis l'ouverture jusqu'à 60min.**



Nos sondes Actreen® restent au même niveau de lubrification pendant plus de 60 minutes.^{(3)*}

(*) Pour des questions de sécurité et d'hygiène, nous vous conseillons d'utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture.

⁽³⁾ Rapport de test et d'analyse B. Braun 7.5.AC.059.1. Perte de masse sondes urinaires. 19/11/2012. Test réalisé sur Actreen® Lite Cath.



STABILITÉ

Le mélange glycérine/eau permet aux sondes B. Braun d'être laissées à des températures extrêmes sans altérer la qualité de la lubrification.

- Les tests ont montré que les propriétés du lubrifiant restent identiques après un stockage entre -20°C et $+55^{\circ}\text{C}$.
- Pour des raisons de sécurité, utiliser le produit à température ambiante (20°C environ).⁽⁴⁾



Références (4) : Rapport de test et d'analyse B. Braun Hi-Lite Cath : 7.5.AC.082.3; Hi-Lite Set : 7.5.AB.054.2; Mini Cath : 7.5.AC.084.2; Mini Set : 7.5.AB.056.1. Tests réalisés en conditions de vieillissement accéléré sur une durée de 15 jours.

NON-SPERMICIDIE

- La glycérine n'interfère pas avec les ECBU (examen cyto bactériologique des urines).⁽⁵⁾
- Le sondage ne laisse pas de résidus dans l'urètre.^{(6)**}

⁽⁵⁾ Rapport de test B.Braun 7.5.AA.029.3.

⁽⁶⁾ Rapport de test et d'analyse B.Braun 7.5.AA.034.4. Jusqu'à une concentration de lubrifiant dans l'urine de 2%.

**Test réalisé avec Actreen® Glys en PVC.

Les sondes B. Braun n'ont pas d'effet sur la viabilité des spermatozoïdes.

Nos sondes n'ont également pas d'effet sur :

- La vitalité des spermatozoïdes
- Leur motilité
- Le pH et l'osmolarité⁽⁷⁾



⁽⁷⁾ J. Auger Et al. Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters on sperm vitality, motility and kinematics in vitro. Minerva Urol Nefrol 2007;59:115-24.

(RE)DÉCOUVREZ LA GAMME ACTREEN®

Nos sondes et sets pour sondage intermittent Actreen® Mini et Actreen® Hi-Lite sont issus de la Recherche et du Développement de B. Braun Medical dans le Centre d'Excellence de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).



GAMME ACTREEN® MINI

La gamme Actreen® Mini a été spécialement conçue pour les femmes, pour les accompagner tout au long de leur journée et en fonction de leurs troubles de la continence.

ACTREEN® MINI CATH

Nelaton 13 cm



CH	GTIN	Références
● 08	4046955312689	228008R
● 10	4046963489137	228010R
○ 12	4046963489311	228012R
● 14	4046963489472	228014R
● 16	4046955313211	228016R

ACTREEN® MINI SET

Nelaton 9 cm



CH	GTIN	Références
● 10	4046964287664	239010R
○ 12	4046964287695	239012R
● 14	4046964287725	239014R



GAMME ACTREEN® HI-LITE

La gamme Actreen® Hi-Lite est disponible en sonde seule et en set de sondage. Deux embouts de sondes sont disponibles : Nelaton et Tiemann. L'embout de sonde Tiemann a été spécialement conçu pour faciliter le passage de la sonde à travers l'urètre.

ACTREEN® HI-LITE CATH

Nelaton 41 cm

CH	GTIN	Références
● 08	4046964138089	238208R
● 10	4046964138201	238210R
○ 12	4046964138324	238212R
● 14	4046964138447	238214R
● 16	4046964138560	238216R
● 18	4046964138683	238218R

Nelaton 20 cm

CH	GTIN	Références
● 06	4046964138805	238306R
● 08	4046964138928	238308R
● 10	4046964139048	238310R
○ 12	4046964139161	238312R
● 14	4046964139284	238314R
● 16	4046964139406	238316R

Tiemann 41 cm

CH	GTIN	Références
● 08	4046964137365	238108R
● 10	4046964137488	238110R
○ 12	4046964137600	238112R
● 14	4046964137723	238114R
● 16	4046964137846	238116R
● 18	4046964137969	238118R



ACTREEN® HI-LITE SET

Nelaton 37 cm

CH	GTIN	Références
● 10	4046964802973	242210R
○ 12	4046964803093	242212R
● 14	4046964803215	242214R
● 16	4046964803338	242216R
● 18	4046964803451	242218R

Tiemann 37 cm

CH	GTIN	Références
● 10	4046964802256	242110R
○ 12	4046964802379	242112R
● 14	4046964802492	242114R
● 16	4046964802614	242116R
● 18	4046964802737	242118R

Actreen® Hi-Lite ^{Cath}, Actreen® Hi-Lite ^{Set}, Actreen® Mini ^{Cath} et Actreen® Mini ^{Set} sont des sondes pour sondage intermittent, dispositifs médicaux de classe I stérile. Produits pris en charge au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Pour les conditions de prise en charge au titre de la LPPR, se reporter au site internet : www.ameli.fr. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE0123).

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B.Braun. Toute présentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. B. Braun décline toute responsabilité quant à l'utilisation du présent support, et plus particulièrement en cas de dommage subi par l'utilisateur, résultant de l'utilisation du présent support ou de l'impossibilité de l'utiliser. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

Fabriqué par :

B. Braun Medical SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

ZG00361_20190814_20240626