

Edition 10.2016

Distribué par :

B. Braun Medical | 204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-
Billancourt - France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

B. Braun Medical, SAS au capital de 31 000 000 euros |

RCS Nanterre 562 050 856

Fabriqué par :

B. Braun Surgical SA | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubi | Espagne

Tél. +34 93 5 86 62 00 | Fax +34 93 6 99 73 03

Document et photos non contractuels

Le présent document, son contenu et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.



Imprimé sur papier issu de forêt éco-gérée

HISTOACRYL® Flexible - Fermeture de plaies cutanées soumises à des tensions minimales

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

301356P_20161007_20211007



Si vous avez des questions supplémentaires, contactez votre médecin.



Histoacryl® Flexible

Pour la fermeture de plaies
et incisions chirurgicales cutanées.

Informations patients

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Plutôt que de vous "recoudre", votre médecin a choisi d'utiliser une colle : Histoacryl® Flexible, pour refermer votre plaie.

Histoacryl® Flexible est une colle spécialement conçue pour fermer certaines plaies de la peau. Elle permet de maintenir rapprochés les bords de la plaie durant la cicatrisation qui durera en moyenne de 5 à 10 jours.

Une fois appliquée, la colle sèche et prend l'aspect d'une pellicule transparente. Celle-ci ne nécessite aucun soin supplémentaire.

Les colles cutanées contribuent à de bons résultats esthétiques.



Comme pour toutes les plaies cutanées, quelques précautions sont à prendre :

- Surveillez l'aspect général de votre plaie à mesure que la cicatrisation progresse. Un gonflement, de légères douleurs ou une rougeur, qui disparaissent en quelques jours, sont fréquents lors de la cicatrisation d'une plaie.

Si ces symptômes persistent ou s'aggravent, contactez votre médecin.

- Si votre plaie vous paraît mal se refermer, si votre plaie s'ouvre ou si vous présentez des signes d'infection (comme une augmentation de la gêne, une rougeur, un gonflement, une suppuration de la plaie) : contactez rapidement votre médecin.

REPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ VOUS POSER

OÙ HISTOACRYL® FLEXIBLE EST-IL APPLIQUÉ ?

Histoacryl® Flexible est utilisé pour la fermeture de certaines plaies cutanées. Il est appliqué sur la surface de la peau.

COMMENT LA COLLE HISTOACRYL® FLEXIBLE FONCTIONNE-T-ELLE ?

Au contact de la peau, Histoacryl® Flexible, liquide initialement, durcit et forme une pellicule transparente. C'est ce film qui maintient solidement rapprochés les bords de la plaie.

HISTOACRYL® FLEXIBLE EST-IL AUSSI EFFICACE QU'UNE SUTURE ?

Histoacryl® Flexible est une colle tissulaire synthétique. Depuis plus de quarante ans, les professionnels de santé du monde entier font confiance et utilisent ces colles. Pour certaines plaies, ces colles sont aujourd'hui une vraie alternative aux sutures conventionnelles.

PUIS-JE PRENDRE UNE DOUCHE AVEC HISTOACRYL® FLEXIBLE ?

Sauf avis contraire de votre médecin, vous pouvez vous doucher après les premières 24 heures suivant la pose d'Histoacryl® Flexible. Veillez tout de même, pendant 7 à 10 jours, à limiter le temps de contact de votre plaie avec l'eau au maximum (période de cicatrisation). Evitez de prendre un bain et d'aller à la piscine.

Pour vous sécher, tamponnez légèrement la plaie sans la froter.

La pellicule transparente d'Histoacryl® Flexible se détachera naturellement à la fin de la cicatrisation. Vous ne devez pas l'enlever vous-même !

DOIS-JE PROTÉGER MA PLAIE AVEC UN PANSEMENT SUPPLÉMENTAIRE ?

Non, aucun pansement supplémentaire n'est nécessaire. Toutefois, évitez d'exposer votre plaie à des risques de frottements.

Si votre plaie devait être protégée par un pansement, veillez à ne pas coller directement la partie adhésive du pansement sur la pellicule d'Histoacryl® Flexible.

De plus, n'appliquez ni pommades, ni crèmes sur la plaie.

Si vous avez des doutes ou des questions supplémentaires, rapprochez-vous de l'établissement, du service, du médecin qui vous a pris en charge.