


Flexima® Active O'Convex Roll'Up

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		<i>Date de mise à jour : 03/02/2022</i> <i>Date d'édition :</i>
1.1	Nom : B. Braun Medical	
1.2	Adresse complète : 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 45 00 e-mail : infofrance@bbraun.com Site internet : http://www.bbraun.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Manuelle SCHNEIDER-PONSOT	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 44 95 e-mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com
2. Informations sur le dispositif ou équipement		
2.1	Dénomination commune : Poches iléostomie et colostomie	
2.2	Dénomination commerciale : Flexima® Active O'Convex Roll'Up	
2.3	Code CLADIMED A57CA01 POCHE POUR ILEOSTOMIE	
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : cf. tableau p.3 * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1	
2.5	Classe du DM : I Directive de l'UE applicable : Règlement (UE) 2017/745 Selon Annexe n° IV Numéro de l'organisme notifié : NA Date de première mise sur le marché dans l'UE : 2017 Fabricant du DM : B. BRAUN MEDICAL 26 Rue Armengaud 92210 Saint-Cloud FRANCE	
2.6	Descriptif du dispositif : Les poches vidables Roll'Up de la gamme Flexima® Active O'Convex sont des systèmes de recueil 1-pièce vidable avec un protecteur cutané total convexe souple. La poche est destinée au recueil des effluents chez les personnes ayant subi une dérivation de type entérostomie (colostomie ou iléostomie). Convexité douce assurée par un anneau souple intégré -Convexité pour réduire les fuites pour les stomies planes ou légèrement rétractées - Profondeur de 6 mm - Pente douce	

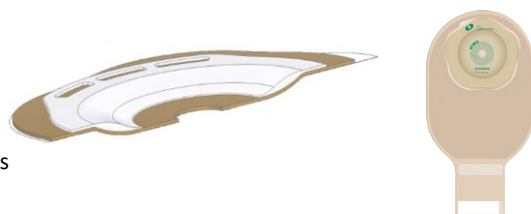

- Profil de bord atraumatique
- Plat intégré : matière souple
- Trois positions disponibles pour la ceinture

Sécurité

- Films barrières qui assurent une de protection contre les odeurs et étanchéité totale –
- Films de confort qui assurent un contact doux avec la peau du patient

Confort

- Filtre Haute Protection permettant la désodorisation des gaz odorants lors du dégazage
- Filtre intégré : pas de contact du charbon avec les vêtements, réduit le risque de ballonnement de la poche –
- Poche souple sans arêtes vives
- Non tissé doux côté peau de la poche
- Forme ergonomique
- Protecteur cutané en forme de fleur qui permet une bonne application de la poche sur la peau même en cas de ventre courbé

Manchon roll'up :

Clamp intégré

Bandes auto-agrippantes

Large (7cm) et fixation auto-agrippante pour la sécurité et la manipulation.

Forme compacte une fois fermée

2.7 Références Catalogue :

Taille	∅	Poches	Références	Code LPPR fabricant	UDI-DI
Midi (580ml)	15-45	Quicklook	4622716FR	6156499	04046955574865
Maxi (690ml)	15-45	Quicklook	4622717FR		04046955574896
		Transparent	4621716FR		04046955574742

UCD (Unité de Commande) : 1 paquet

CDT (Multiple de l'UCD) : 10 pièces

QML (Quantité minimale de livraison) : 1 paquet

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

Composants	Matériaux
Film protecteur	<ul style="list-style-type: none"> • Papier siliconé à faces superposées
Protecteur cutané	Gomme hydrocolloïdes (composants principaux : polyisobutylène, carboxyméthylcellulose, pectine) Protecteur en non-tissé polyéthylène blanc à faces superposées Forme : fleur
Poche de recueil	<ul style="list-style-type: none"> • Film de Copolymère de polyéthylène chloré / EVA/ chlorure de polyvinylidène/ EVA/ EVA • Pour la poche transparente : Côté peau : un film beige opaque et un non tissé beige Face extérieure : un film transparent • Pour la poche beige avec fenêtre de vision : Côté peau : un film beige et un non-tissé beige Face externe : un film transparent + deux non tissés beiges superposés
Filtre HP	<ul style="list-style-type: none"> • Une bande de mousse imprégnée de charbon actif, hermétiquement scellée dans des films étanches à l'eau et aux gaz, et dont l'entrée de gaz est protégée par un tissu high tech respirant membrane imperméable à l'eau
Anneau de convexité	<ul style="list-style-type: none"> • EVA inhété



	Roll'Up	
	Manchon d'évacuation	<ul style="list-style-type: none"> Films barrières multicouches : Copolymère de polyéthylène chloré polychlorure de vinylidène / EVA/ EVA
	Bande auto-agrippante	<ul style="list-style-type: none"> Ruban extrudé de polypropylène auto-adhésif (adhésif base élastomère synthétique) Adhésif double face à base de film polypropylène transparent et adhésif à base d'élastomère de synthèse
	Bande auto-agrippante ré-adhésivée	<ul style="list-style-type: none"> Adhésif double face constitué d'un film blanc en polypropylène et d'adhésif à base d'élastomère synthétique
	Languette de préhension	<ul style="list-style-type: none"> Film polyéthylène transparent Bande auto-agrippante (voir ci-dessus) Adhésif double face constitué d'un film blanc en polypropylène et d'adhésif à base d'élastomère synthétique
	Indicateur de pli	Polyéthylène basse densité, épaisseur 450 microns, blanc. Adhésif double face à base de film polypropylène transparent et adhésif à base d'élastomère synthétique
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Absence de latex/PVC ✓ Absence de phtalates (DEHP) <p>Dispositifs et accessoires associés à lister. N/A</p>	
2.9	<p>Domaine - Indications : Domaine d'utilisation : Chirurgie digestive Indications : Iléostomie</p>	
3. Procédé de stérilisation :		
3.1	<p>DM stérile : NON Mode de stérilisation du dispositif : NA</p>	
4. Conditions de conservation et de stockage		
4.1	<p>La date de péremption des poches et des supports est de 3 ans. Conserver à l'abri de la chaleur Conserver dans un endroit sec</p>	
5. Sécurité d'utilisation		
5.1	<p>Sécurité technique : N/A</p>	
5.2 Sécurité biologique (s'il y a lieu) :		
6. Conseils d'utilisation		
6.1	<p>Mode d'emploi : cf. notice en annexe Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s'il y a lieu), en particulier pour l'ancillaire s'il y a lieu</p>	
6.2	<p>Indications : Les poches vidables Roll'Up de la gamme Flexima® Active O'Convex sont des systèmes de recueil 1-pièce pour les patients ayant subi une dérivation de type entérostomie (colostomie ou iléostomie).</p>	
6.3	<p>Précautions d'emploi : cf. notice en annexe</p>	
6.4	<p>Contre- Indications : cf. notice en annexe</p>	
7. Informations complémentaires sur le produit		

7.1

Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... : N/A

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)

8.1

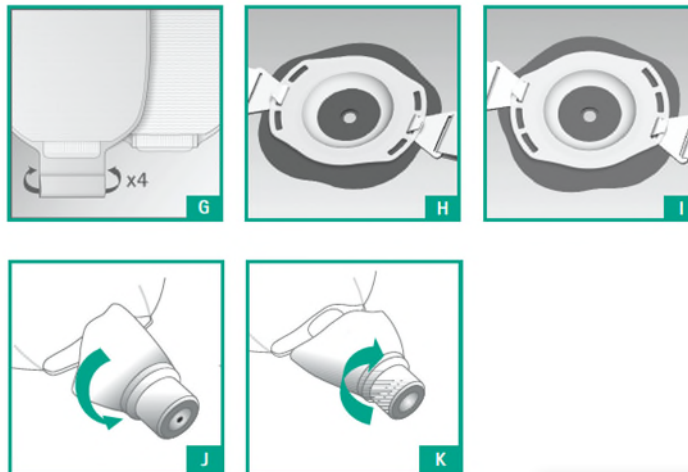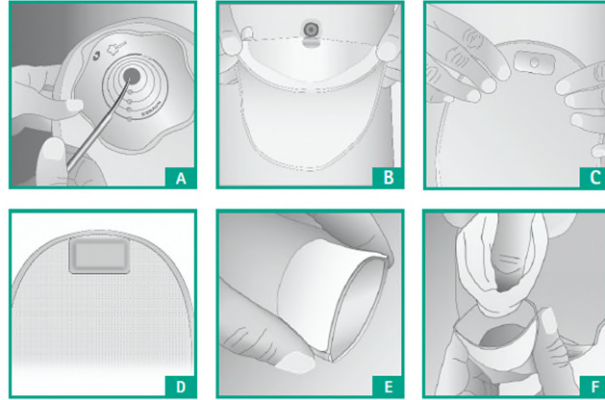

FR Notice d'utilisation

Qu'est-ce que Flexima® / Softima® Active et comment l'utiliser ?

Flexima® / Softima® Active est un système de recueil en 1 pièce pour les patients présentant une stomie digestive ou urinaire comprenant différents types de poches*

- Fermée pour les patients présentant une stomie digestive,
- Vidable pour les patients présentant une stomie digestive avec l'une ou l'autre des manchon d'évacuation,
- Vidangeable pour les patients présentant une stomie urinaire avec un robinet « Uro » et un connecteur « Uro » permettant une connexion à une poche de recueil à distance B. Braun.

Flexima® / Softima® Active peut être utilisé avec les accessoires de stomathérapie B. Braun.

Destination et indication :

Ce produit est indiqué pour le recueil des selles ou d'urine chez des patients présentant une stomie digestive ou urinaire. Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur une peau ou une muqueuse présentant une altération pathologique ou consécutive à une maladie ou à une blessure

Les poches fermées sont principalement destinées aux patients colostomisés ; les poches vidables « Roll'up » sont destinées aux patients colostomisés avec des selles molles ou liquides et aux patients iléostomisés ; les poches « Uro » sont destinées aux patients urostomisés.

Le protecteur cutané convexe souple Flexima-Softima Active O'Convex est spécialement conçu pour assurer une étanchéité sûre autour des stomies

- situées dans des plis cutanés peu ou moyennement profonds,
- à fleur ou légèrement rétractées.

Le protecteur cutané souple et convexe aide à prévenir les fuites, en s'ajustant à la zone péristomiale. Pour plus de sécurité, il est possible d'utiliser l'une des trois positions (H,I) des encoches de ceinture du protecteur cutané souple et convexe pour fixer la ceinture.

Bénéfices cliniques Et performances :

Les appareillages de stomie compensent la perte de continence fécale et/ou urinaire.

Population de patient :

Adultes ou enfants âgés de plus de quatre ans présentant une stomie digestive ou urinaire.

Contre-indication:

Il n'y a aucune contre-indication formelle à l'utilisation du Flexima® / Softima® Active.

Risques résiduels ou effets secondaires :

Des complications au niveau de la peau péristomiale peuvent survenir lors de l'utilisation du Flexima® / Softima® Active.

1 Préparation de la peau

Se laver les mains avant de commencer la procédure.

Nettoyer délicatement la zone péristomiale à l'eau tiède. Éviter l'éther, l'alcool ou tout autre produit topique qui pourrait interférer avec l'adhérence du support. Sécher la peau avec soin en la tamponnant avec un chiffon doux et non pelucheux.

2 Préparation du support

En cas d'utilisation d'un produit à découper, découper l'ouverture centrale de l'adhésif hydrocolloïde à la taille de la stomie (A), éventuellement à l'aide du guide de stomie. Ne pas découper au-delà du diamètre maximal possible et s'assurer qu'il y a toujours une marge de 2 à 3 mm autour de la stomie afin de ne pas étrangler ou léser la muqueuse stomiale.

Remarque : Les produits prédécoupés ne sont pas destinés à être découpés. Afin d'améliorer l'adhérence du Flexima-Softima Active et Flexima-Softima Active O'Convex "Roll'Up", placer des mains sur le support pour le réchauffer.

3 Pose du dispositif

Retirer le papier de protection. Placer la partie inférieure du protecteur cutané autour de la base de la stomie (B).

Appuyer doucement sur la partie inférieure du protecteur cutané pour l'appliquer sur la peau, puis placer la partie supérieure et appuyer dessus (le protecteur cutané est flexible et s'adapte parfaitement aux mouvements du corps) (C).

En cas d'erreur de positionnement, il est possible de retirer la poche et de la remettre en place correctement. Si le port d'une ceinture (avec le produit convexe) est souhaité, veiller à utiliser 2 encoches diamétralement opposées (H,I).

4 Mise en place de la poche (fermée et vidable)

Pour les poches vidables « Roll'Up », fermer le manchon d'évacuation avec le clamp intégré. Pour les poches vidangeables « Uro », s'assurer que le robinet est fermé.

Séparer les parois de la poche en la froissant légèrement pour y introduire de l'air.

Replier l'extrémité du manchon quatre fois à l'aide du guide et rabattre la languette.

Pour fermer le manchon d'évacuation, exercer une pression sur toute la longueur des deux bandes de fixation en face l'une de l'autre.

Remarque : le manchon fermé est caché sous la pellicule non tissée souple (G).

5 Manipulation des poches vidables

■ Poches vidables « Roll'Up » :

Fermeture du manchon d'évacuation « Roll'Up » :

Replier l'extrémité du manchon quatre fois à l'aide des guides et rabattre la languette. Pour fermer le manchon d'évacuation, s'assurer que les deux bandes de fixation sont alignées et en face l'une de l'autre et exercer une pression sur toute la longueur (G).

Vidage de la poche :

Se positionner correctement, puis relâcher les deux bandes auto-agrippantes et dérouler le manchon. Attention, la vidange débute à ce moment. Pour ouvrir complètement le bas du manchon d'évacuation, placer les doigts de chaque côté (E). Le vidage achevé, expulser au maximum les matières qui pourraient encore se trouver dans le manchon en le pressant légèrement de haut en bas. Nettoyer soigneusement son extrémité (utiliser uniquement un matériau non pelucheux) (F). Enfin, fermer à nouveau le manchon d'évacuation.

Pour fermer la poche, plier le manchon comme indiqué ci-dessus.

■ Poches vidangeables « Uro » :

Fermeture du robinet « Uro » :

Pour fermer le robinet une fois que la poche a été vidée, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit revenu à sa position initiale (J).

Vidage de la poche :

Diriger le robinet dans la cuvette des toilettes, faire tourner doucement

le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la vitesse d'écoulement désirée (K).

Connexion de la poche de recueil à distance B. Braun :

La connexion de la poche de recueil à distance B. Braun peut nécessiter l'utilisation du connecteur « Uro » fourni. Pour clipser le connecteur « Uro » du B. Braun Uribag, appuyer sur les deux ailettes et l'insérer dans le robinet de la poche. Ouvrir le robinet en le tournant d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour permettre à l'urine de s'écouler dans la poche de recueil à distance B. Braun. Pour le déclipser, fermer le robinet de la poche en le tournant d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre et retirer le connecteur « Uro » ou le B. Braun Uribag en appuyant sur les deux ailettes.

6 Utilisation des étiquettes adhésives pour filtre

Avant de prendre un bain ou une douche, coller une étiquette adhésive pour filtre sur les ouvertures destinées à l'évacuation des gaz du filtre (D) afin de préserver les performances du filtre. Pour une poche avec fenêtre, il faut ouvrir la fenêtre de vision et coller une étiquette adhésive pour filtre directement sur le film de la poche. Après un bain ou une douche, retirer les étiquettes adhésives pour filtre.

7 Retrait des produits




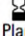


Retrait de la poche :

Tirer légèrement sur le dessus de la poche et la retirer de haut en bas, tout en maintenant une légère pression sur la peau autour de la stomie avec l'autre main.

* La disponibilité peut varier d'un pays à l'autre.

Si des changements sont constatés au niveau de la stomie et/ou de la peau péristomiale, contacter un professionnel de santé.

La réglementation nationale relative à la destruction des matières potentiellement infectieuses doit être respectée.

Flexima® Active			REF 4622716FR
10	 15-45 mm	6156499	
Système 1 pièce convexe souple découpable, poche vidable Roll'up, Midi, avec fenêtre		DIGESTIF, POCHE RECUEIL, AC SUPP (ST 1 PC) NON STD, VIDAB B/10, B.BRAUN MEDICAL	
 LOT 000000	 0000-00		
 Plant n° 000000	V161219	(01)04046955574865(17)000000(10)000000	



9. Images (s'il y a lieu)

9.1

