



## DIVEEN® SET

Pour ne plus en parler,  
testez-le !

# Diveen®


## BRISEZ LE TABOU DE L'INCONTINENCE !

Qu'est-ce que c'est ?


Diveen® est un dispositif intra-vaginal indiqué pour les femmes souffrant de fuites urinaires dues à une incontinence urinaire d'effort pure ou mixte.

Comment ça marche ?

Aussi simple à appliquer qu'un tampon hygiénique, Diveen® a été conçu pour soutenir mécaniquement la paroi supérieure du vagin dans la zone située sous le col vésical.

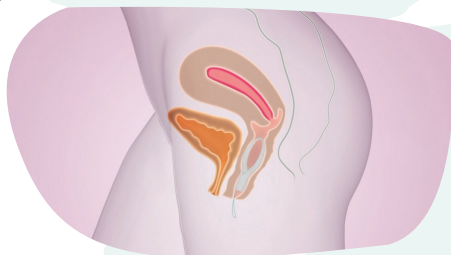

Lors d'un effort, le poids de la vessie va venir exercer une pression sur l'anneau souple du dispositif qui, par un effet de levier, va soutenir le col vésical et ainsi réduire mécaniquement le risque de fuite urinaire.\*<sup>(1)</sup>

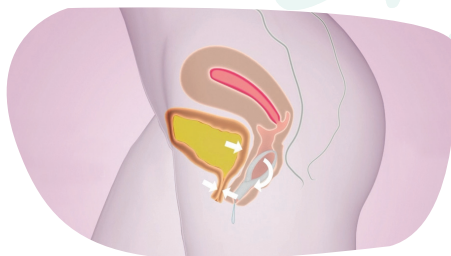

Pourquoi l'utiliser ?



100% discret



Conçu pour 12h de contrôle de l'incontinence



Utilisation simple sans nécessité de le retirer durant la journée y compris pour uriner




Dans l'étude menée pour démontrer l'efficacité de Diveen, la fréquence des fuites a été diminuée de 69% ± 22% [-100 à -28] <sup>(1)</sup>

## Diveen® Set

Diveen® Set c'est un format permettant aux nouvelles utilisatrices de tester la taille qui s'adapte à leur morphologie.

Il se compose de :

- 1 Diveen taille Medium
- 1 Diveen taille Small
- 1 applicateur

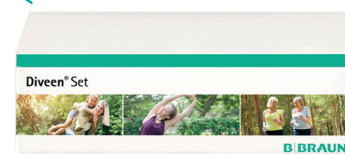

# Diveen®



| TAILLE            | REF   | GTIN          | UNITÉS/BOÎTE                     |
|-------------------|-------|---------------|----------------------------------|
| Small +<br>Medium | 3025R | 4046955569878 | 2 dispositifs<br>+ 1 applicateur |
| Small             | 3132R | 4046964675409 | 5 dispositifs                    |
| Medium            | 3133R | 4046964675423 | + 1 applicateur                  |
| Small             | 3022R | 4046964262562 | 15 dispositifs                   |
| Medium            | 3023R | 4046964262586 | + 1 applicateur                  |

Pour plus d'information :  
[www.diveen-bbraun.fr](http://www.diveen-bbraun.fr)

(1) Cornu J.N et al. 75NC007 device for non invasive stress urinary incontinence management in women: a randomized controlled trial. *Int Urogynecol J* (2012);23(12):1727-1734. Etude prospective, contrôlée et randomisée en ouvert portant sur 55 patientes, dont 41 per protocole. Les données présentées sont celles de la population per protocole. Analyse per protocole.

\* Notice d'utilisation Diveen®

Contre-indications : Réservé à l'adulte à partir de 18 ans. Ne pas utiliser le dispositif au cours de la grossesse et en période de règles. Après un accouchement, attendre la cicatrisation des sutures éventuelles et la fin des pertes de sang avant d'utiliser le dispositif. Ne pas garder le dispositif pendant les rapports sexuels. Pour une première utilisation, en cas de virginité, consultez un médecin.

Dispositif médical intravaginal pour les femmes souffrant de fuites urinaires dues à une incontinence urinaire d'effort pure ou mixte. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d'information.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques, les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive du groupe B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable du groupe B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle du groupe B. Braun. Document et photo non contractuels.

Fabriqué par : B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE | Tél : 01 41 10 53 00

[www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) | [monservice.diveen@bbraun.com](mailto:monservice.diveen@bbraun.com)

Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000

RCS Nanterre 562 050 856

ZG00790\_20201105\_20251105

Édition Novembre 2020