

Diveen®


Fuites urinaires

Retrouvez votre liberté !



1^{er} dispositif intravaginal conçu
pour réduire les fuites urinaires
à l'effort⁽¹⁾



Pour toute information :
www.diveen-bbraun.fr 

(1) Breveté

Diveen®

en quelques gestes*

1. Avant application

- Lavez-vous les mains.

2. Préparation du dispositif

- Pincez l'anneau du dispositif et introduisez-le dans le tube applicateur.

- Positionnez le poussoir dans le tube applicateur.



3. Introduction du dispositif

- Insérez le tube applicateur dans le vagin, puis appuyez sur le poussoir pour positionner le dispositif dans le vagin (comme un simple tampon hygiénique avec applicateur).



4. Retrait du dispositif

- Tirez doucement sur le cordon de retrait vers l'extérieur.



Taille	Ref	EAN 13	Unité/boîte
Small	3132R	4046964675409	5 dispositifs
Medium	3133R	4046964675423	+ 1 applicateur
Small	3022R	4046964262562	15 dispositifs
Medium	3023R	4046964262586	+ 1 applicateur

Dispositif médical intravaginal pour la prise en charge de l'incontinence urinaire d'effort. Ce produit de santé réglementé porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE..

*Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Merci de vous reporter aux conseils d'un médecin si besoin.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques, les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive du groupe B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable du groupe B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle du groupe B. Braun. Document et photo non contractuels.

Edition : octobre 2016

ZG00758_20161019_20211019

Distribué et fabriqué par:

B. Braun Medical

204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt - France

Tél: 01 41 10 53 00 | monservice.diveen@bbraun.com

www.diveen-bbraun.fr

B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000€.

RCS Nanterre 562 050 856.

