



1. Ouvrez la porte, tirez sur le verrou de seringue et tournez-le à droite

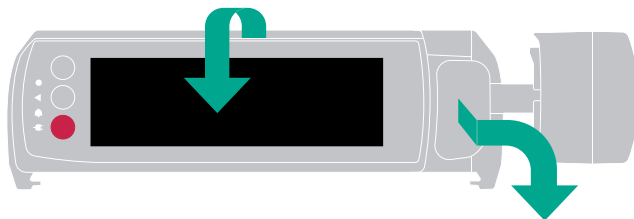


2. Insérez la seringue et fermez le verrou de seringue

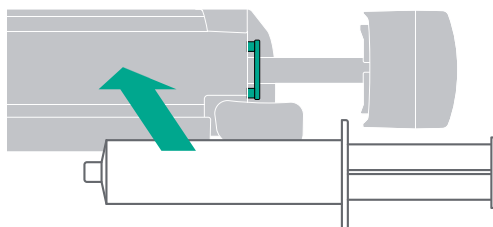

⚠ ATTENTION


Les ailettes de la seringue doivent se trouver dans les encoches prévues à cette effet.

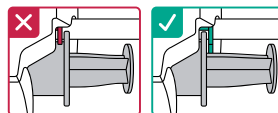

3. Fermez la porte et suivez les instructions à l'écran

Programmer une perfusion

1. Appuyez sur le bouton d'accueil

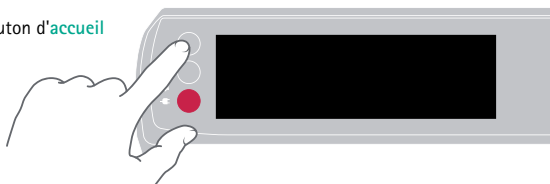


2. Appuyez sur **nouvelle perfusion**




3. Suivez les instructions à l'écran

1. Arrêtez la perfusion et
Déconnectez le patient

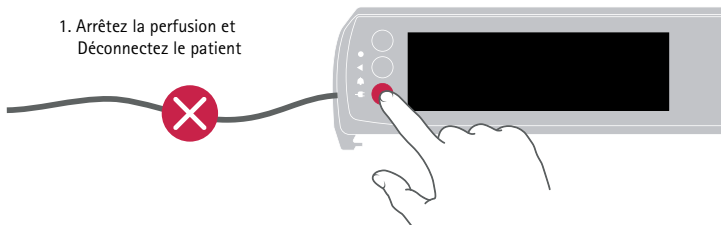


2. Ouvrez la porte, tirez le verrou de seringue et déplacez-le vers la droite.

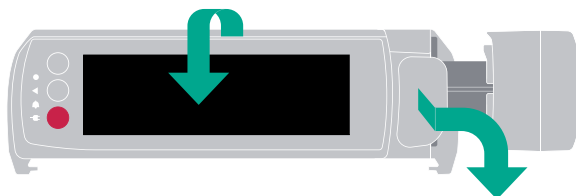

Administer un bolus

⚠ IMPORTANT

L'administration d'un bolus est possible uniquement lorsque la perfusion est en cours

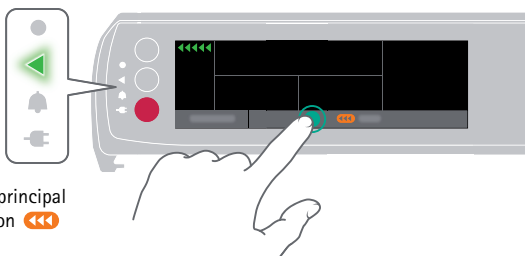

1. Rendez-vous à l'écran principal et appuyez sur le bouton <<<<
2. Choisissez le type de bolus souhaité



Bolus pré-programmé

- Le bolus est administré après avoir renseigné la quantité et le temps souhaité.

Bolus manuel

- Le bolus sera administré uniquement lorsque vous Maintenez le bouton

