





Aide à l'utilisation

Insérer une seringue


1. Ouvrez la porte, tirez sur le verrou de seringue et tournez-le à droite.

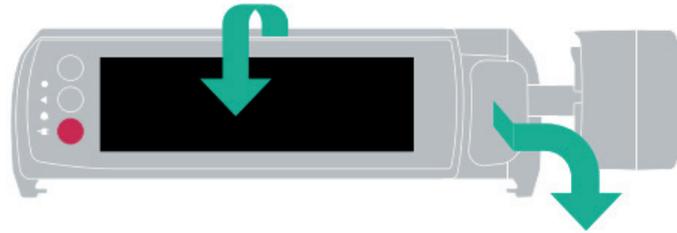

2. Insérez la seringue (avec les ailettes verticales) et fermez le verrou de seringue.

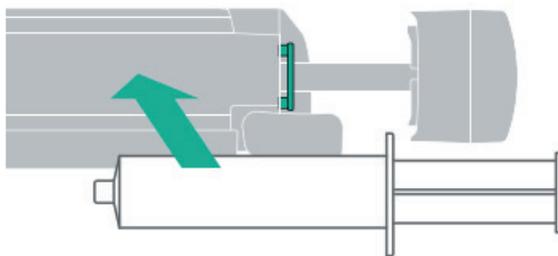
**ATTENTION**

Les ailettes de la seringue doivent se trouver dans les encoches prévues à cet effet.

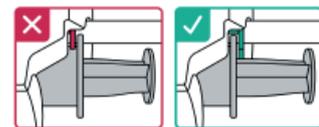

3. Fermez la porte et suivez les instructions à l'écran.


Programmer une perfusion

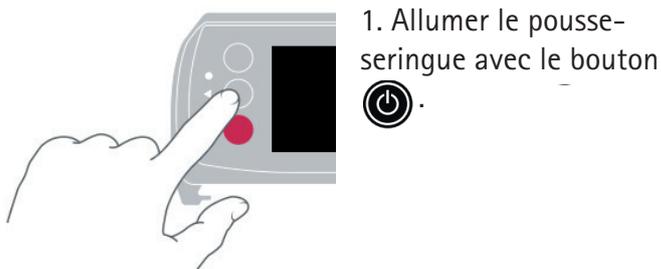


2. Choisir «Nouveau patient» ou «Même patient».




3. Choisir «Bibliothèque de médicaments» ou «Débit/Volume/Temps».

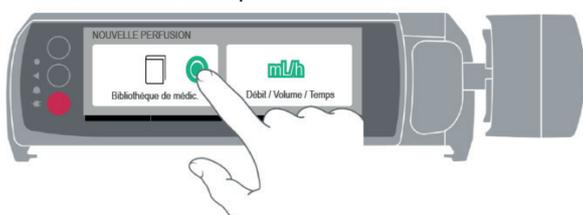

4. Remplir tous les onglets en bas de l'écran.

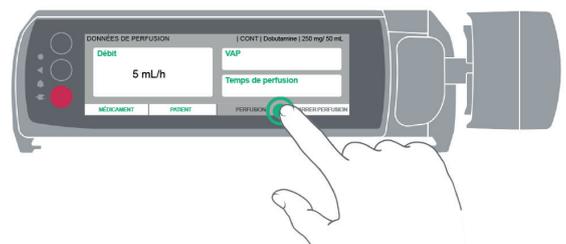

5. Insérer correctement la seringue (avec les ailettes verticales).

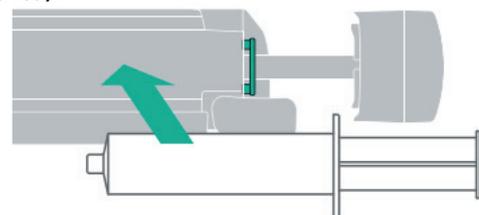

6. Cliquer sur «Démarrer perfusion».

**ATTENTION**

«Démarrer» s'allume en vert lorsque tous les paramètres de perfusion requis ont été saisis.

Changement de seringue



1. Arrêtez la perfusion en appuyant sur le bouton  et déconnectez le patient.



2. Ouvrez la porte, tirez le verrou de seringue et déplacez-le vers la droite.



3. Remplacez la seringue par une nouvelle.

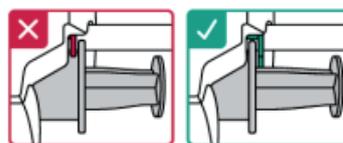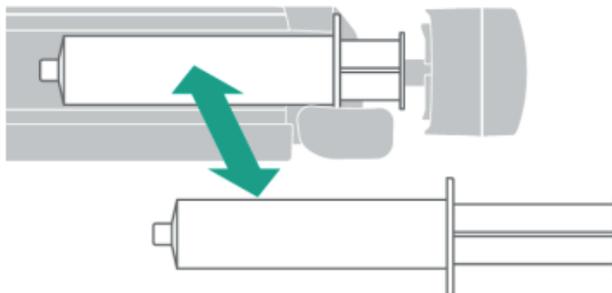


ATTENTION

Les ailettes de la seringue doivent se trouver dans les encoches prévues à cet effet.

Administer un bolus

ATTENTION

L'administration d'un bolus est possible uniquement lorsque la perfusion est en cours et qu'il a été programmé dans la bibliothèque de médicaments.

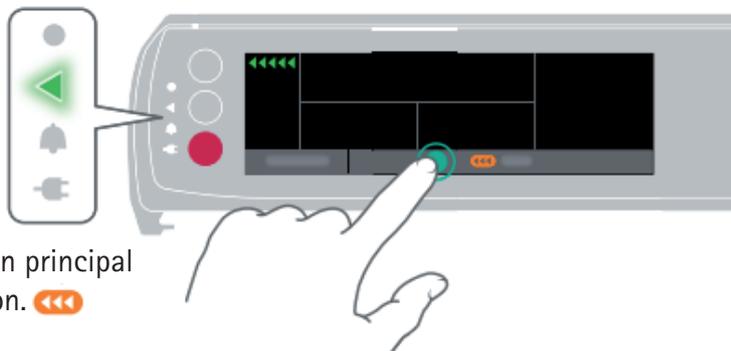

1. Rendez-vous à l'écran principal et appuyez sur le bouton. 

2. Choisissez le type de bolus souhaité.



Bolus pré-programmé

Le bolus est administré après avoir renseigné la quantité et le temps souhaité.

Bolus manuel

Le bolus sera administré uniquement lorsque vous Maintenez le bouton.

