

Aesculap® Instruments AdTec® Mini 3,5mm

Entretien/démontage/montage




Instruments réutilisables Ø 3.5 mm



- 1 Crémaillère
- 2 Etoile de rotation
- 3 Partie mobile de la poignée



ENTRETIEN

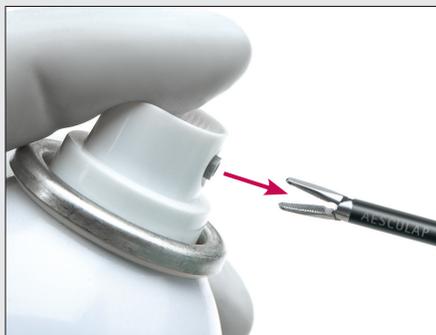

Lubrifier particulièrement : la crémaillère et le mors

Retraitement Et Accessoires

- Retraiter le produit immédiatement après usage
- Le produit peut être stérilisé, démonté ou assemblé
- Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, suivre le mode d'emploi
- Pour les dernières informations sur le retraitement, consulter <https://extranet.bbraun.com>

Réparation

Afin de maintenir la qualité et la garantie des instruments Aesculap®, seules les personnes autorisées par Aesculap® sont habilitées à effectuer des réparations.

Merci d'envoyer les produits pour réparations à :

B. Braun Médical
Service Technique
ZI 520 rue Lavoisier
54713 Ludres

Tél 03 83 57 40 00 - Fax 03 83 57 41 24

Email: bbraun_adv_sav@bbraun.com

DEMONTAGE




Désactiver la crémaillère

Uniquement pour la poignée PO381R, basculer le bouton rouge vers le bas




Déconnecter le système de verouillage de la poignée

Tirer l'étoile de rotation de la poignée, l'anneau mobile de la poignée remonte automatiquement

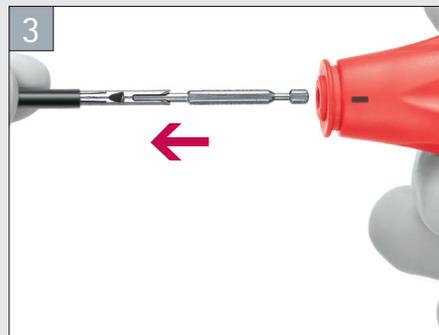


Détacher la tige de la poignée

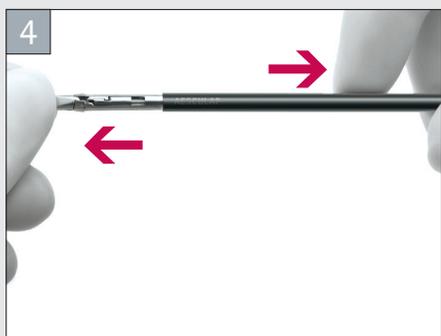


Démonter la tige

Tenir l'insert et le tube de poussée, et retirer le tube extérieur isolant

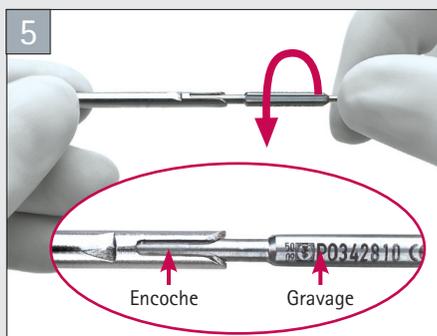

Démonter la tige


Tourner le guide de poussée à 90° : le gravage doit se trouver en face de l'encoche de l'insert

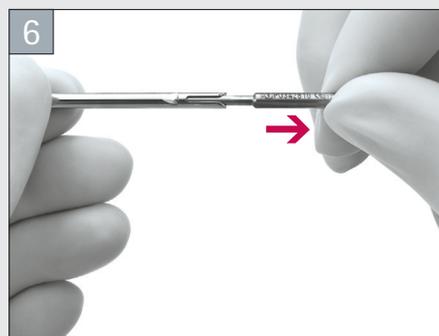

Démonter la tige


Retirer le guide de poussée

MONTAGE

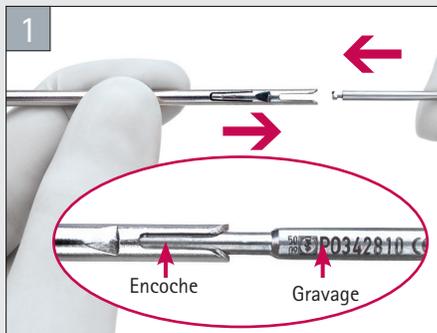


Remonter la tige

Insérer le guide de poussée dans l'insert en positionnant le gravage du guide de poussée en face de l'encoche de l'insert

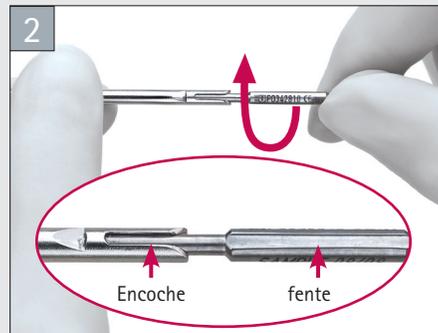

Remonter la tige

Tourner le guide de poussée à 90° (dans le sens des aiguilles d'une montre) de telle sorte qu'il soit bloqué

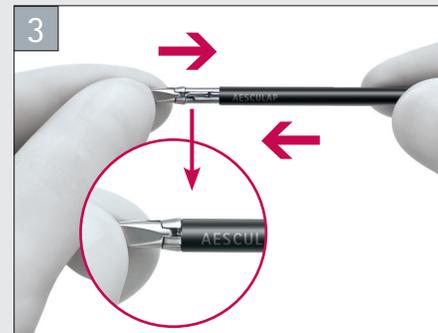

Remonter la tige

Insérer la gaine isolante extérieure jusqu'au bout de l'insert



Préparer la poignée

Désactiver la crémaillère de la poignée PO381R en basculant le bouton rouge vers le bas



Connecter la tige et la poignée

Maintenir le mors de la tige et l'étoile de rotation de la poignée fermement. Glisser la tige dans la poignée jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Important ne pas toucher les parties mobiles de la poignée.



Test de fonctionnement

Tester l'ensemble de l'instrument en ouvrant et en fermant la poignée pour s'assurer de l'ouverture et de la fermeture du mors.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé.

Distribué par :

B. Braun Medical SAS | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt - France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par : Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

ed. 12/2013 CEL_20131213 Document et photo non contractuels.