

CHALLENGER® TI-P

PINCES À CLIPS

CHIRURGIE MINI-INVASIVE



CHALLENGER® TI-P

Pinces à clips 4

Boite de clips 4

Composantes et pièces détachées 5




Entretien 8

Montage / démontage

Démontage 9

Montage 10

CHALLENGER® TI-P

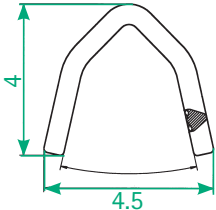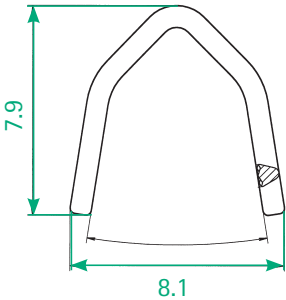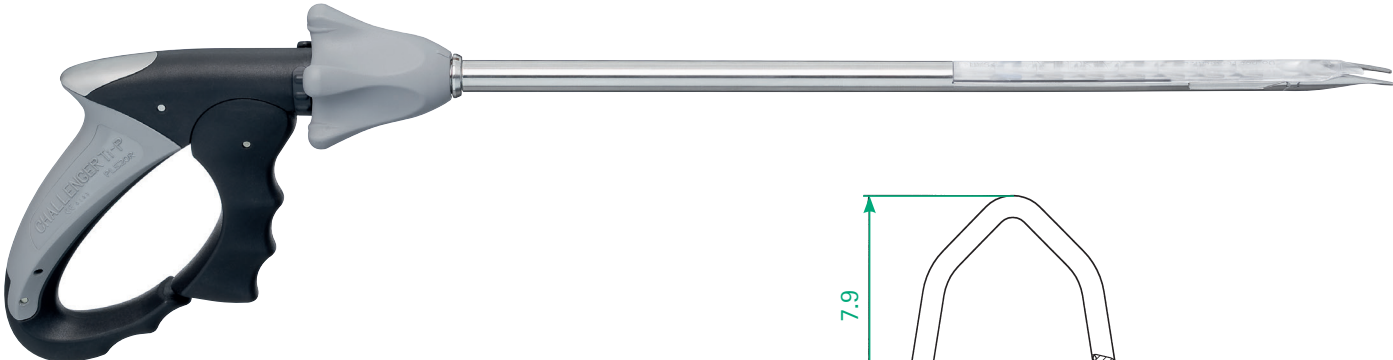

NOTRE GAMME



ML

PL606R

PL608R

Pince à clips

diam. 10 mm, longueur 370 mm

diam. 10 mm, longueur 260 mm

PL579T



Boite de clips



12 barrettes stériles,
8 clips en titane par barrette,
et 12 cartouches de CO2
code couleur pour le dernier clip

taille du clip: **medium-large (ML)**

SM

PL604R

PL603R

Pince à clips

diam. 5 mm, longueur 310 mm

diam. 5 mm, longueur 205 mm

PL574T



Boite de clips



12 barrettes stériles,
12 clips en titane par barrette,
et 12 cartouches de CO2
code couleur pour le dernier clip

taille du clip: **small-medium (SM)**

CHALLENGER® TI-P




Composantes et pièces détachées


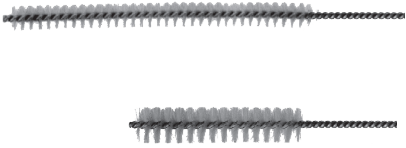
Tige complète	PL536R Longueur de la tige 370 mm Diamètre 10 mm	PL538R Longueur de la tige 260 mm Diamètre 10 mm	PL522R Longueur de la tige 310 mm Diamètre 5 mm	PL609R Longueur de la tige 205 mm Diamètre 5 mm
Tube interne	PL536802 Longueur de la tige 370 mm	PL538802 Longueur de la tige 260 mm	PL522801 Longueur de la tige 310 mm	PL601801 Longueur de la tige 205 mm
Barre de poussée	PL536801 Longueur de la tige 370 mm	PL538801 Longueur de la tige 260 mm	PL522800 Longueur de la tige 310 mm	PL601800 Longueur de la tige 205 mm
Poignée	PL520R	PL520R	PL520R	PL520R
Cartouche de CO ₂ Pack de 3 unités, emballage stérile par unité	PL575SU	PL575SU	PL575SU	PL575SU
Bague de sécurité	PL520301	PL520301	PL520301	PL520301

ML

SM

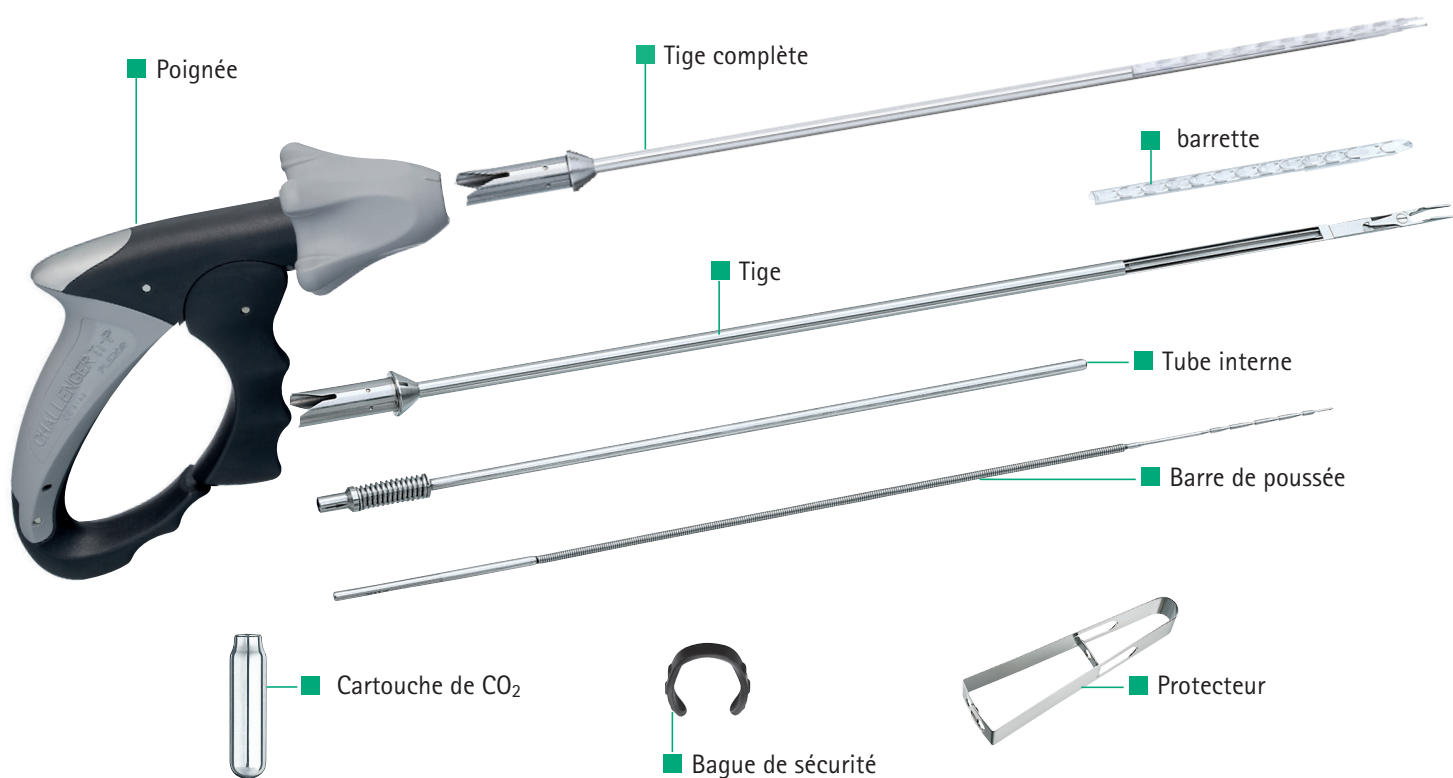

ENTRETIEN

<p>Protecteur</p> 	<p>PL522810 Protège les mors durant le montage, le démontage et le traitement diam. 5 mm</p> <p>PL536810 Protège les mors durant le montage, le démontage et le traitement diam. 10 mm</p>
<p>Brosse de nettoyage</p> 	<p>GK469R Pour tube interne diam. 5 mm, longueur 550 mm, pack de 6 unités</p> <p>PM995R Pour tube interne diam. 10 mm, longueur 550 mm, pack de 6 unités</p>

CHALLENGER® TI-P

Mise en place de la cartouche de CO₂ et de la barrette de clips au bloc opératoire



Etape 1

Montage de la tige et de la poignée



Etape 2



Mise en place de la cartouche de CO₂ opercule vers le haut



Etape 3

Mise en place de la barrette de clips

ENTRETIEN

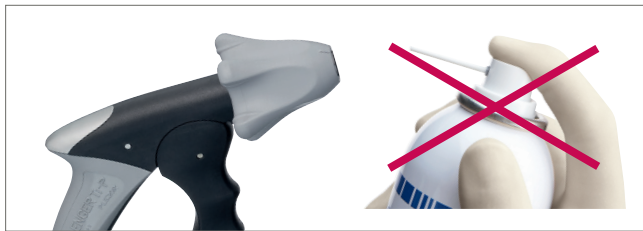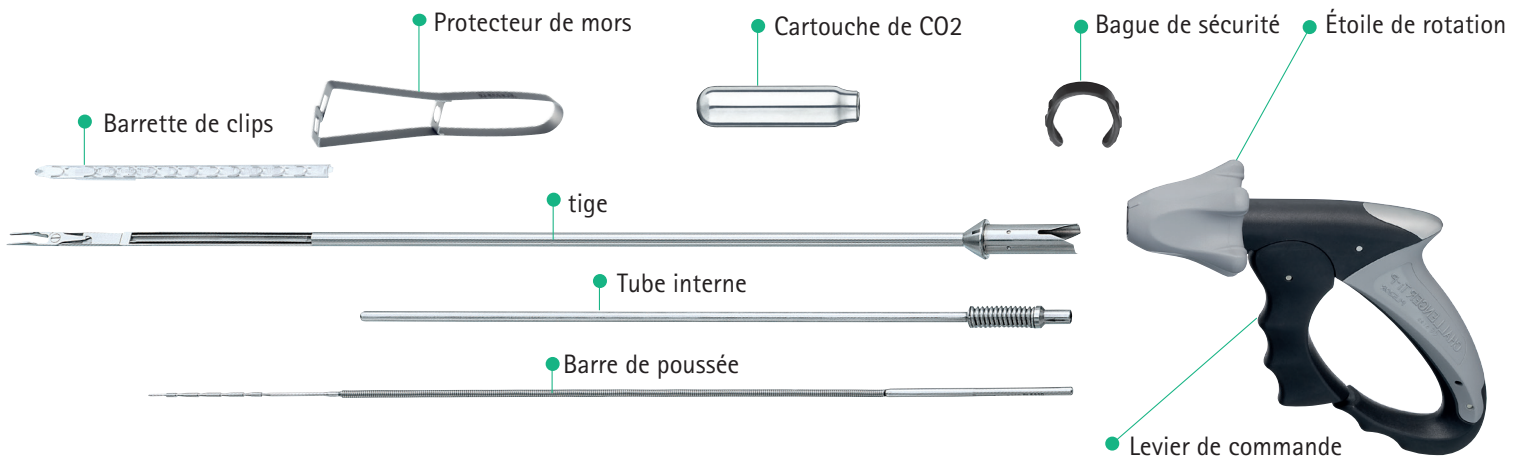

- Ne pas lubrifier la poignée
- Après l'étape de lavage/séchage, toutes les parties mobiles des pinces à clips doivent être lubrifiées.



- Après la lubrification de la tige, ouvrir et fermer les mors à plusieurs reprises à l'aide de la poignée.



- Pour éviter des dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement, mettre le protecteur.

ENTRETIEN ET ACCESSOIRES

- Nettoyer et stériliser le produit immédiatement après usage
- Le produit peut être stérilisé démonté ou assemblé
- Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, suivre le mode d'emploi.

RÉPARATION

Afin de maintenir la qualité et la garantie des instruments Aesculap®, seules les personnes autorisées par Aesculap® sont habilitées à effectuer des réparations.


Merci d'envoyer les produits pour réparations à :

B. Braun Medical
Service Technique
ZI 520 rue Lavoisier
54713 Ludres
Tél 01 41 10 53 00 - Fax 03 83 57 41 24
Email: bbraun_adv_sav@bbraun.com


DÉMONTAGE




1 Fermer les mors de la pince en exerçant une pression sur la poignée, ôter la barrette de clips par la partie distale

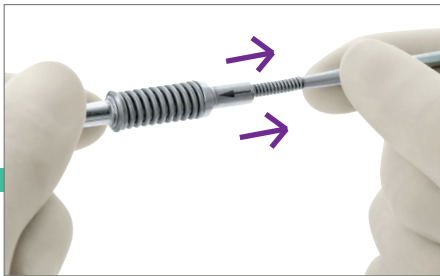

6 Sortir la barre de poussée du tube interne

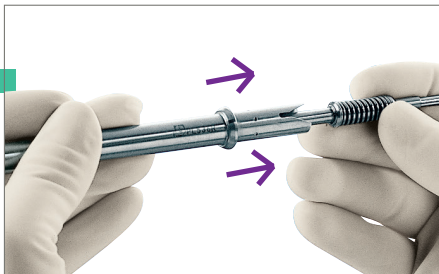


5 Retirer le tube interne de la tige

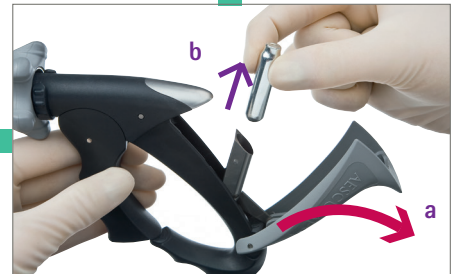

2 Retirer la cartouche de CO2 de la poignée




3 Tourner la bague de sécurité de sorte que l'ouverture soit alignée avec le levier de commande de la poignée

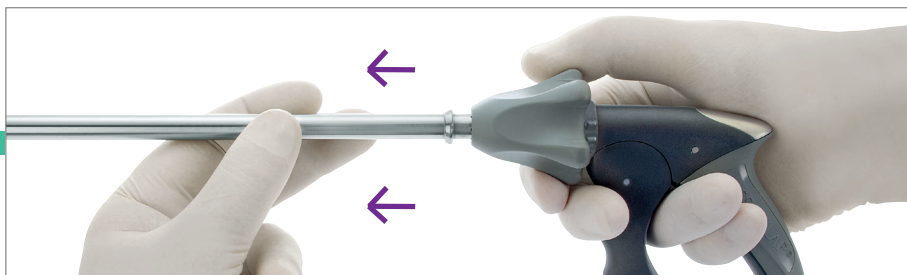

4 Retirer la tige en tirant sur l'étoile de rotation dans le sens opposé


MONTAGE

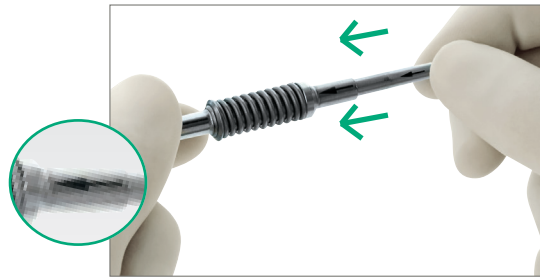

1 Vérifier l'état de la barre de poussée : elle ne doit pas être courbée ou fissurée. L'insérer ensuite dans le tube interne



5 Faire pivoter la bague de sécurité de 180° de telle sorte que l'ouverture soit orientée vers le haut

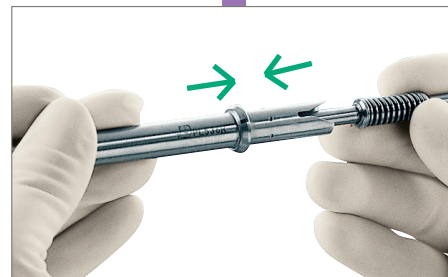

2 Insérer l'ensemble (tube intérieur + barre de poussée) dans la tige



4 Positionner la bague de sécurité entre l'étoile de rotation et le levier de commande



3 Tirer l'étoile de rotation. Insérer la tige face au repère sur l'étoile de rotation et encliqueter

CONTRÔLE DE FONCTIONNALITÉ

- Appuyer sur la gachette de fermeture des mors au maximum puis relâcher. Il se peut qu'elle se bloque par mesure de sécurité.
- Vous pouvez l'activer une fois la gachette noire pressée.
- Fermer les mors. Leurs parties distales doivent se toucher et les mors doivent se fermer parallèlement.
- Si au moins un des éléments n'est pas fonctionnel, procéder à l'échange de la totalité de la pince.

Distribué par :

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Lire attentivement les instructions figurant dans notices et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition 03/2023