

BLOC OPÉRATEIRE

Démontage / Pré-désinfection des pinces à clips Challenger Ti Aesculap®

DÉMONTAGE



1 Fermer les mors de la pince à l'aide de la gâchette noire, ôter la barrette de clips en tirant en premier la partie distale



2 Retirer l'étoile de rotation noire




3 Tourner la bague de sécurité de sorte que l'ouverture soit en face de la gâchette



4 Tenir la tige et tirer sur l'anneau de rotation vers l'arrière pour libérer la tige



5 Retirer la tige et relâcher l'anneau de rotation

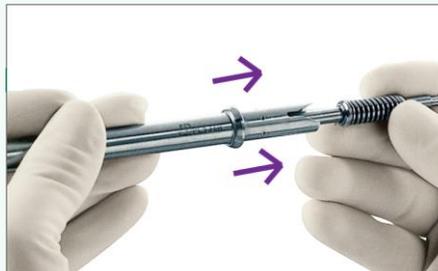

6 Retirer le tube intérieur de la tige



7 Sortez la barre de poussée du tube intérieur

MISE EN PLACE DU PROTECTEUR DE MORS



PL522810 – Diam. 5mm
PL536810 – Diam. 10mm

Pour éviter des dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement, mettre le protecteur.

PRE-DÉSINFECTION

Immerger les instruments dans une solution détergente désinfectante.

Brosser, écouvillonner et irriguer.

Rincer sous l'eau courante.

En cas de besoin :

- Tube interne diam. 5mm, longueur 550mm, pack de 6

GK469R



- Tube interne diam. 10mm, longueur 550mm, pack de 6

PM995R

