

STÉRILISATION

Entretien / Montage des pinces à clips Challenger Ti Aesculap®

LUBRIFICATION

Après l'étape de lavage/séchage, toutes les parties mobiles des pinces à clips doivent être lubrifiées.




Après la lubrification de la tige, ouvrir et fermer les mors à plusieurs reprises à l'aide de la poignée.



En cas de besoin : JG600

Huile Aesculap d'entretien, en flacons pressurisés avec deux diffusions (avec ou sans embout). Pour la lubrification des instruments de chirurgie avant la stérilisation.

MONTAGE

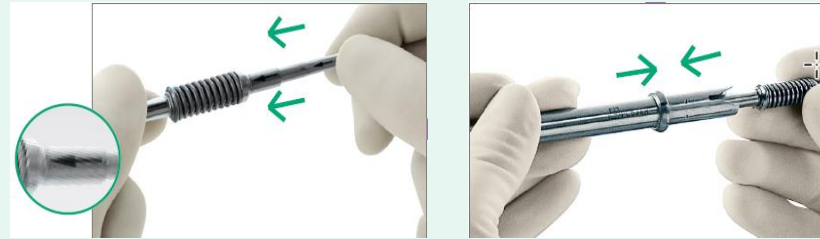

1 Vérifier l'état de la barre de poussée : elle ne doit pas être courbée ou fissurée. L'insérer dans le tube intérieur

2 Insérer l'ensemble (tube intérieur + barre de poussée) dans la tige



3 Tirer l'anneau de rotation vers l'arrière et insérer la tige dans la poignée. La flèche noire sur l'anneau de rotation et le gravage sur la tige doivent être alignés

4 Glisser la bague de sécurité sur la poignée et le positionner derrière l'anneau de rotation



5 Faire pivoter la bague de sécurité de 180° de telle sorte que la partie « ouverte » soit sur le dessus

6 Remettre l'étoile de rotation sur l'anneau de rotation

CONTRÔLE DE FONCTIONNalité

- Appuyer sur la gâchette de fermeture des mors au maximum puis relâcher. Il se peut qu'elle se bloque par mesure de sécurité. Vous pouvez l'activer une fois la gâchette noire pressée.
- Fermer les mors. Leurs parties distales doivent se toucher et les mors doivent se fermer parallèlement.
- Si au moins un des éléments n'est pas fonctionnel, procéder à l'échange de la totalité de la pince.

MISE EN PLACE DU PROTECTEUR DE MORS



PL522810 – Diam. 5mm
PL536810 – Diam. 10mm

Pour éviter des dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement, mettre le protecteur.

