

BLOC OPÉRATOIRE

Mise en place et retrait barrette Challenger Ti Aesculap®

MISE EN PLACE




Etape 1: Montage de la tige et de la poignée




Etape 2: Mise en place de la barrette de clips

RETRAIT


Etape 1: Presser la gâchette noire pour fermer les mors de la pince

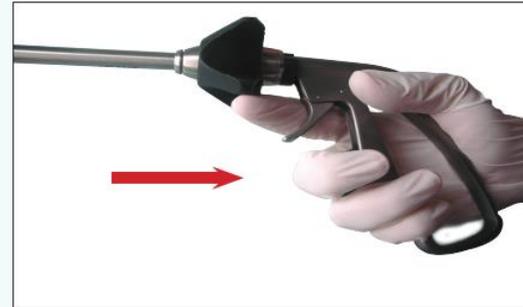

Etape 3: Attraper l'extrémité de la barrette avec le pouce et l'index et tirer délicatement pour retirer la barrette de clips

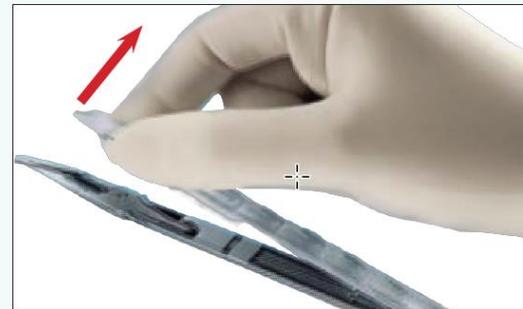

Etape 2: La fermeture des mors entraîne un dégagement de la barrette au niveau de la partie distale

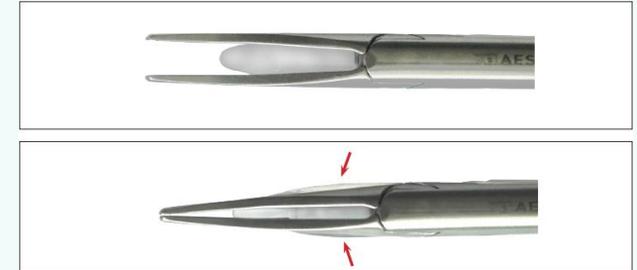

Etape 4: Mettre le protecteur pour éviter les dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement

