

BLOC OPÉRATOIRE

Mise en place et retrait Cartouche/barrette Challenger Ti-P Aesculap®

MISE EN PLACE



Etape 1: Montage de la tige et de la poignée



Etape 2: Mise en place de la cartouche de CO₂ opercule vers le haut



Etape 3: Mise en place de la barrette de clips

RETRAIT


Etape 1: Presser la poignée pour fermer les mors de la pince



Etape 3: Attraper l'extrémité de la barrette avec le pouce et l'index et tirer délicatement pour retirer la barrette de clips



Etape 2: La fermeture des mors entraîne un dégagement de la barrette au niveau de la partie distale.

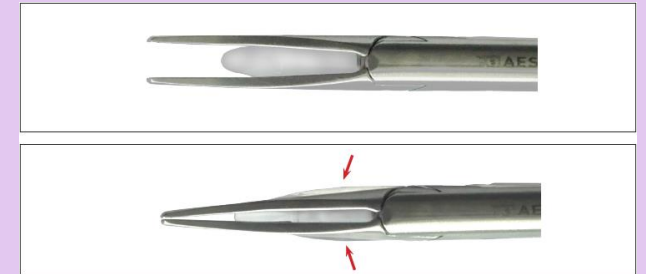

Etape 4: Mettre le protecteur pour éviter les dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement.

