

## RONGEURS DÉMONTABLES AESCULAP


# RONGEURS DÉMONTABLES AESCULAP




Droit




Courbé

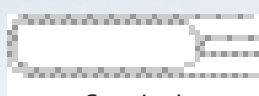

Standard

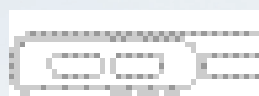

Semi-dentelé

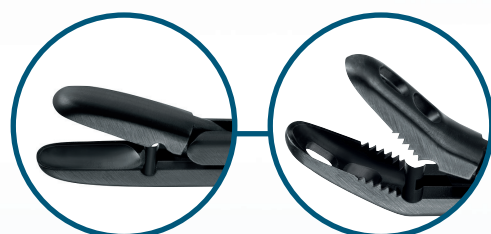

Revêtement NOIR anti-reflets



## UNE GAMME COMPLÈTE


86 modèles :

- Longueurs de travail de 150 mm à 280 mm
- Largeurs de l'empreinte de 1,5 mm à 5 mm
- Mors standard et semi-dentelés /droits et courbés à 150°

Tous les modèles sont livrés avec le revêtement NOIR anti-reflets.

## ASSEMBLAGE/DÉSAMBLAGE RAPIDE, SIMPLE ET INTUITIF

Le bouton doré indique l'amovibilité et permet un montage/démontage intuitif, facile et rapide. En position ouverte, toutes les parties restent connectées, ce qui évite la perte de pièces lors du cycle de stérilisation.

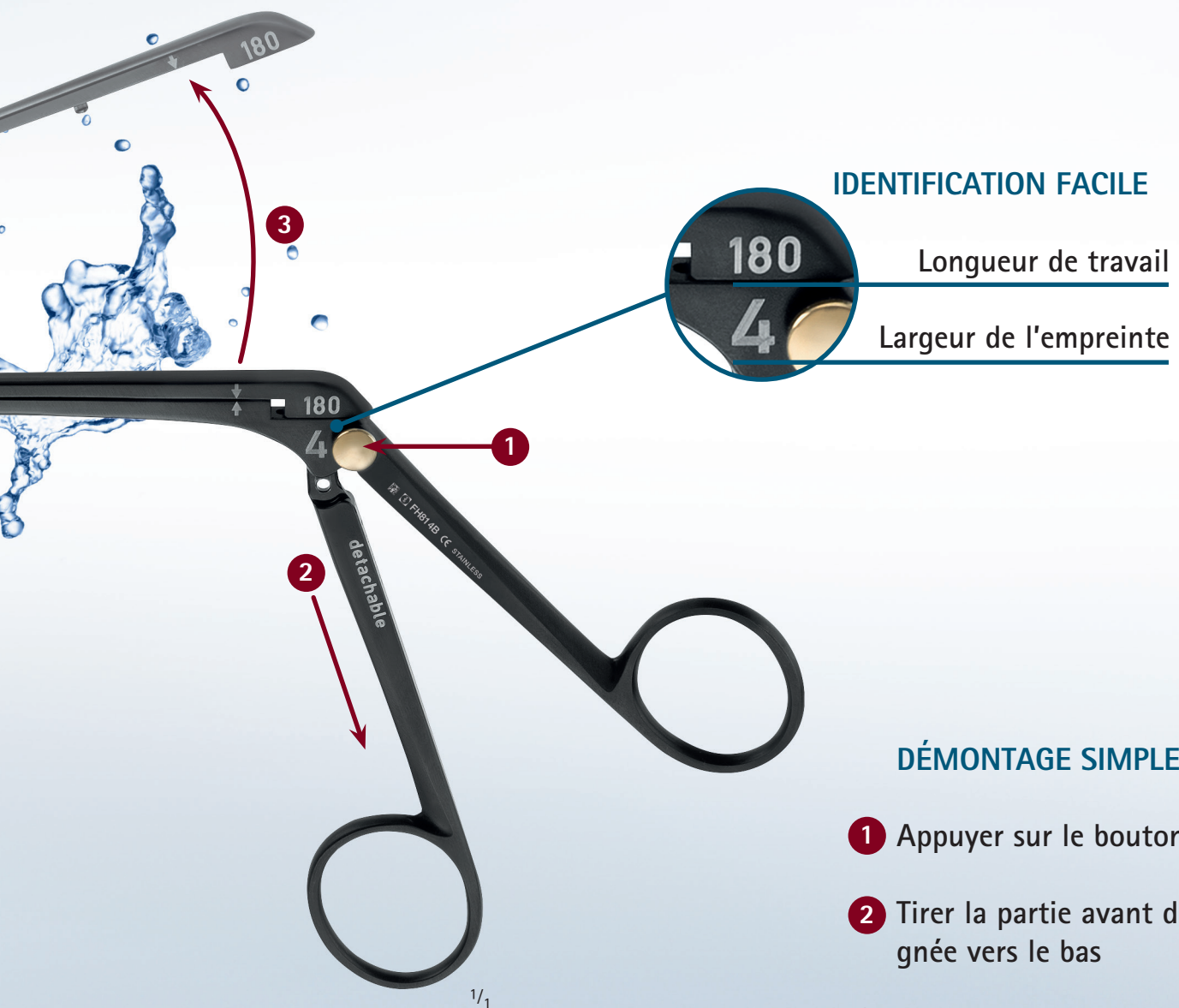

### IDENTIFICATION FACILE

Longueur de travail


Largeur de l'empreinte

### DÉMONTAGE SIMPLE

- 1 Appuyer sur le bouton doré
- 2 Tirer la partie avant de la poignée vers le bas
- 3 Soulever la partie amovible



# RONGEURS DÉMONTABLES AESCULAP

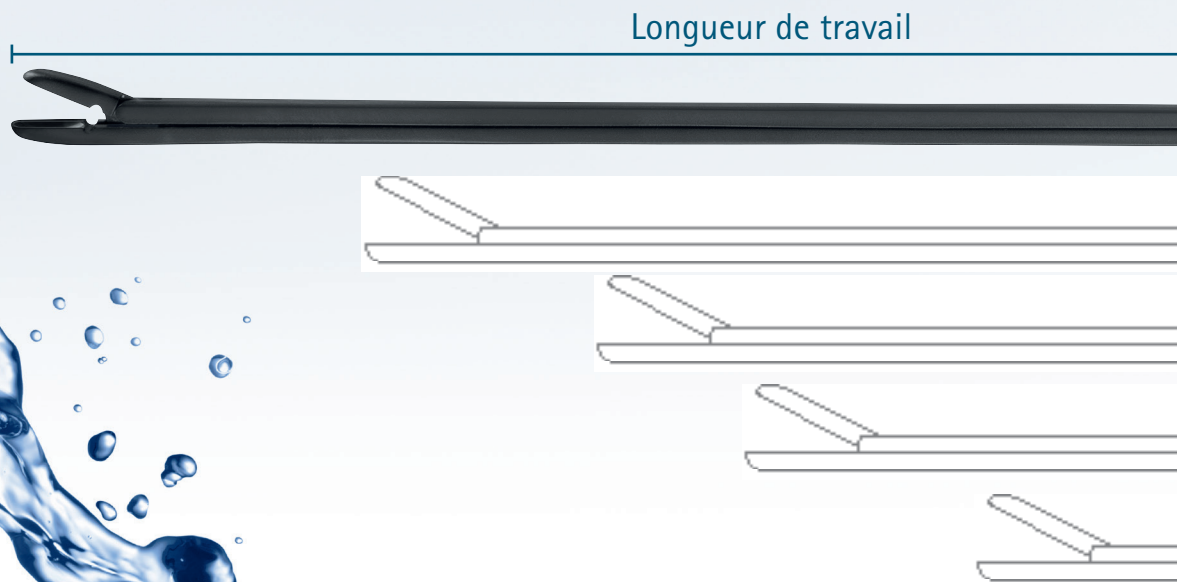

## Rongeurs standard



Longueur de travail	Types de mors	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
150 mm		FH801B	FH802B	FH803B	FH804B	FH805B
150 mm		FH901B	FH902B	FH903B	FH904B	FH905B
180 mm		FH811B	FH812B	FH813B	FH814B	FH815B
180 mm		FH911B	FH912B	FH913B	FH914B	FH915B
200 mm		FH821B	FH822B	FH823B	FH824B	FH825B
200 mm		FH921B	FH922B	FH923B	FH924B	FH925B
230 mm		FH891B	FH892B	FH893B	FH894B	FH895B
230 mm		FH931B	FH932B	FH933B	FH934B	FH935B
280 mm		-	-	FH837B	FH838B	FH839B



1/1



### Rongeurs semi-dentelés

Longueur de travail	Types de mors	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
150 mm		FH851B	FH852B	FH853B	FH854B	FH855B
150 mm		FH951B	FH952B	FH953B	FH954B	FH955B
180 mm		FH861B	FH862B	FH863B	FH864B	FH865B
180 mm		FH961B	FH962B	FH963B	FH964B	FH965B
200 mm		FH871B	FH872B	FH873B	FH874B	FH875B
200 mm		FH971B	FH972B	FH973B	FH974B	FH975B
230 mm		FH881B	FH882B	FH883B	FH884B	FH885B
230 mm		FH981B	FH982B	FH983B	FH984B	FH985B
280 mm		-	-	FH847B	FH848B	FH849B

# RONGEURS DÉMONTABLES AESCULAP



## LUBRIFIER


Lubrifier les parties mobiles (en particulier les articulations) avec de l'huile d'entretien appropriée (Aesculap Sterilit JG598 ou JG600) pour la stérilisation à la vapeur



## NETTOYER

Garder le mors et la partie amovible ouverts pour le nettoyage

# SOLUTIONS DE CALAGE AESCULAP

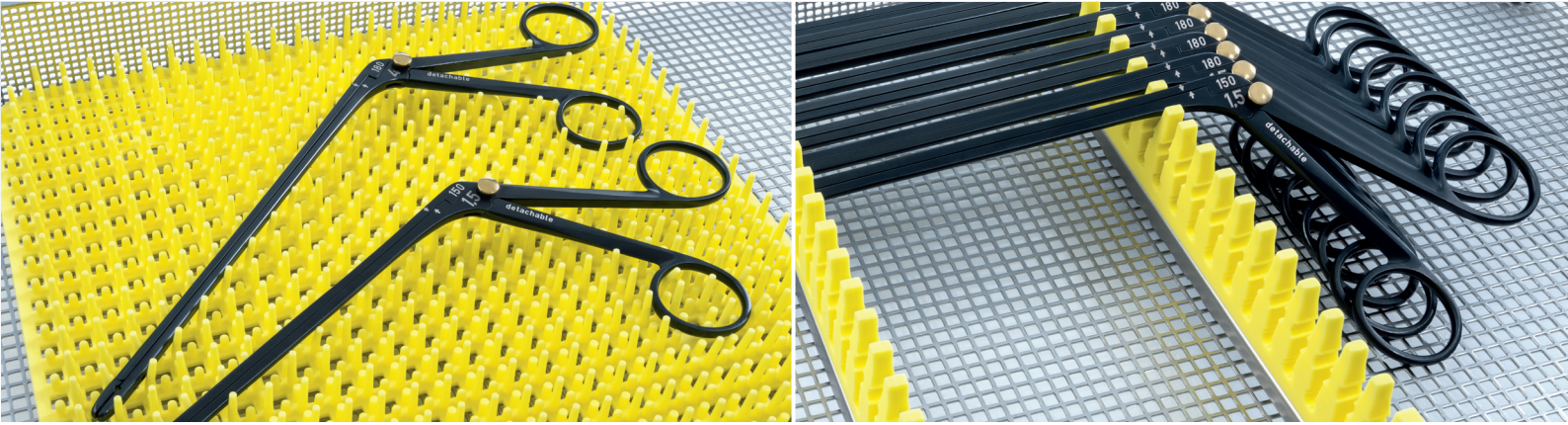

La protection des instruments pendant la pré-désinfection, le lavage, la stérilisation et le transport vers le lieu de stockage ou le bloc opératoire revêt une importance capitale.



Retrouvez le catalogue « Conteneurs de stérilisation » pour plus d'informations sur les solutions de calage Aesculap.

Rongeurs démontables, instruments pour la chirurgie du rachis et du crâne utilisés pour les ablations de tissus mous. Dispositifs médicaux de classe I.

Stérilit JG598 et Stérilit JG600, Huiles pour la lubrification des articulations et des mécanismes d'arrêt, etc, des instruments avant la stérilisation à la vapeur. Dispositifs médicaux de classe I.

Dispositifs médicaux non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.  
Document réservé aux professionnels de santé.

Document et photo non contractuels.

Distribué par :

B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt - France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

B. Braun Medical au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

NRC\_20160428

Edition : Avril 2016