

AESCULAP Aicon® – Etiquette tout-en-une¹

ÉTIQUETTE AMOVIBLE



1 AVANT STÉRILISATION

Collez l'étiquette sur la surface de l'emballage stérile


Quel papier protecteur retirer pour quel type d'emballage ?



Application sur surfaces en aluminium anodisé et sachet d'emballage : retirez le papier protecteur

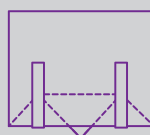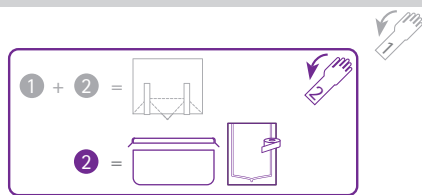

Application sur feuille non-tissée de stérilisation : avant utilisation, retirez complètement le papier protecteur

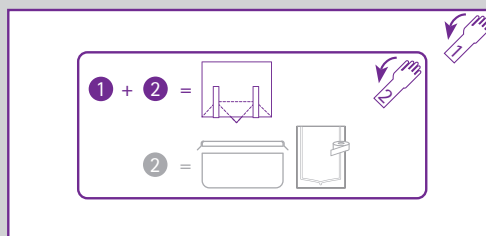

2 APRÈS STÉRILISATION

Retirez l'étiquette de l'emballage stérile pour la coller dans le dossier patient.

3 POUR DOCUMENTATION

Collez l'étiquette dans le dossier patient

Retirez le papier protecteur et **ENTIÈREMENT** le film intermédiaire.



Étiquette avec témoin de passage pour la stérilisation à la vapeur

Description du changement de couleur

Avant stérilisation

Après stérilisation

bleu

brun

- L'indicateur de processus est conforme à la norme ISO 11140-1 Type 1

Spécifications

- Taille d'étiquette 75 x 35 mm
- Marquage CE
- Rubans à transfert thermique

AESCULAP® :

IC-V008

convient pour imprimante industrielle

IC-V014

convient pour imprimante de bureau

impression extérieure en noir

AESCULAP® – Étiquette tout-en-une

Utilisation flexible sur différentes surfaces :

- aluminium anodisé
- sachet d'emballage
- feuille non-tissée de stérilisation
- papier pour la documentation du dossier patient

¹Pour stérilisation à la vapeur uniquement

Edition 05/2020.
CTN_20200510

Étiquette tout-en-une Aesculap. Dispositif médical de classe I.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Produits non pris en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

Fabriqués par : Aesculap AG | Am Aesculap Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne.

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France | Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 |

www.bbraun.fr | Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856