


**1 BISTOURI DÉACTIVÉ**



- Retirer le bistouri de son emballage
- Le bistouri est stérile et prêt à l'emploi

**2 BISTOURI ACTIVÉ**

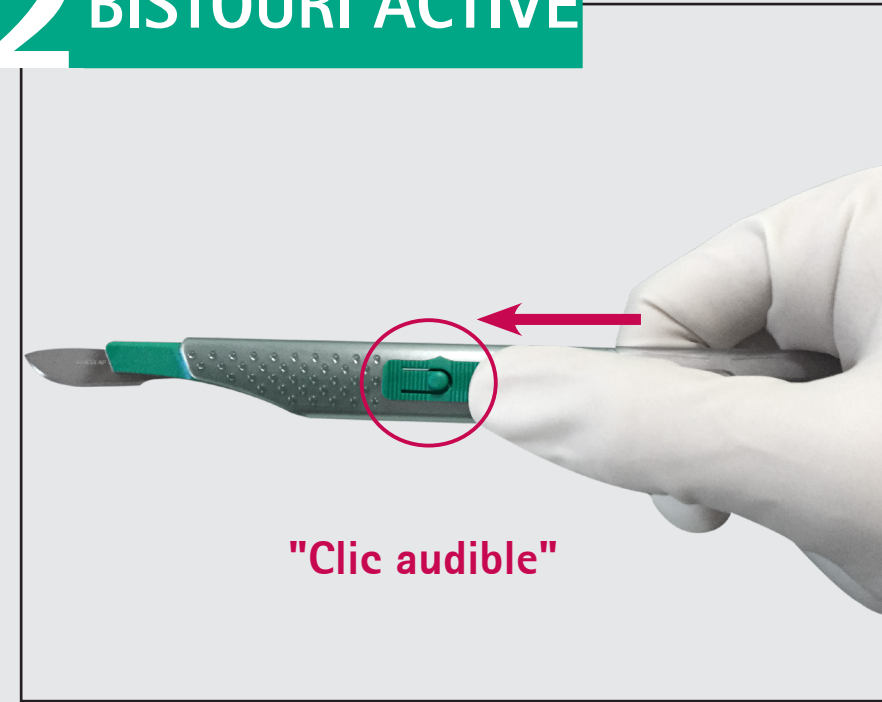

- Pour utiliser le bistouri, pousser le mécanisme pour sortir la lame jusqu'à entendre un clic audible. Le mécanisme est alors bloqué en position distale et le bistouri est prêt à être utilisé

**3 BISTOURI SÉCURISÉ**




- Entre 2 manipulations, tirer sur le mécanisme pour rétracter la lame et sécuriser le bistouri et éviter ainsi les risques de blessure

**4 BISTOURI VERROUILLÉ**



- Une fois la manipulation terminée, tirer à nouveau sur le mécanisme pour verrouiller la lame
- Le mécanisme de verrouillage empêche la réutilisation du bistouri

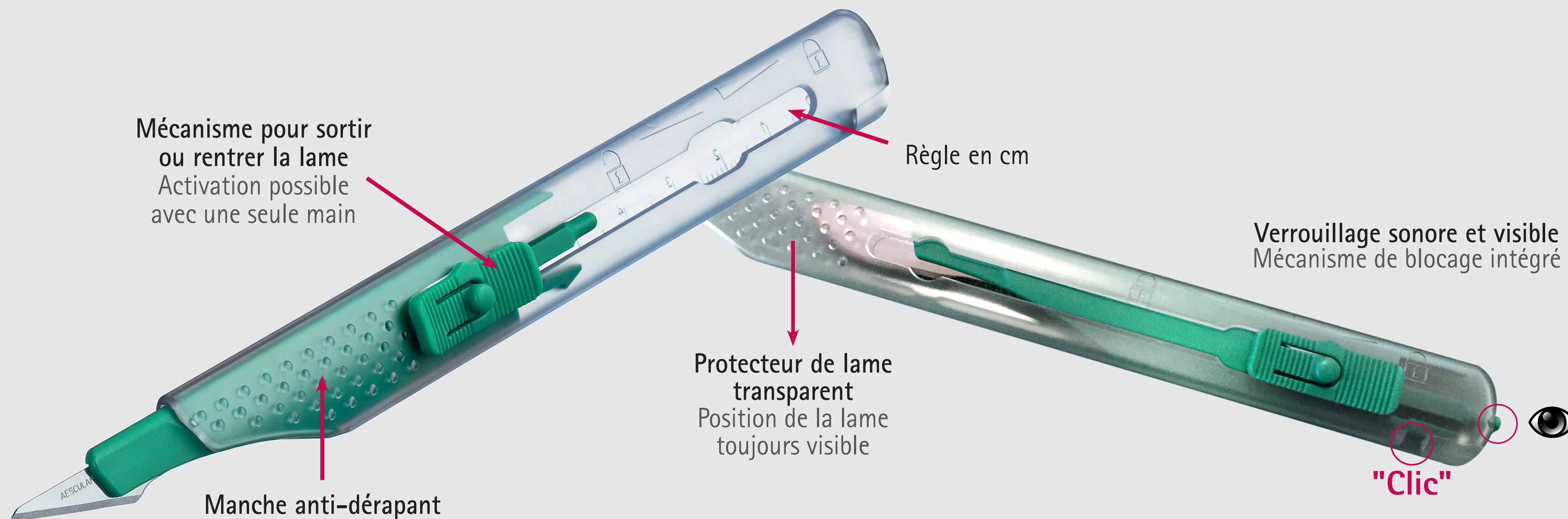

Bistouri sécurisé, Dispositif médical de classe IIa.  
Après utilisation, jeter le bistouri dans les collecteurs prévus à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.

B. Braun Medical | 26 Rue Armengaud  
| 92210 Saint-Cloud France |  
Tél. 01 41 10 53 00 |  
Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |  
B. Braun Medical au capital de 31 000  
000 € | RCS Nanterre 562050856  
Fabriqué par : Aesculap AG

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage.  
301337P\_20210215\_20260215  
Edition : Février 2021

**BISTOURIS SÉCURISÉS À USAGE UNIQUE AESCULAP**  
CONSEILS D'UTILISATION