


# BLOC OPÉRATOIRE

## Démontage / Pré-désinfection des pinces à clips Challenger Ti-P Aesculap®

### DÉMONTAGE




1 Fermer les mors de la pince en exerçant une pression sur la poignée, ôter la barrette de clips par la partie distale

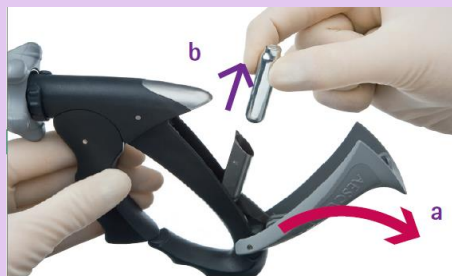

2 Retirer la cartouche de CO2 de la poignée



3 Tourner la bague de sécurité de sorte que l'ouverture soit alignée avec le levier de commande de la poignée

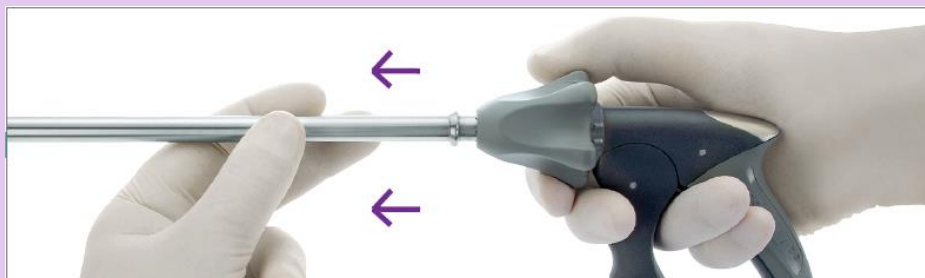

4 Retirer la tige en tirant sur l'étoile de rotation dans le sens opposé



5 Retirer le tube interne de la tige



6 Sortir la barre de poussée du tube interne

### MISE EN PLACE DU PROTECTEUR DE MORS



PL522810 – Diam. 5mm  
PL536810 – Diam. 10mm

Pour éviter des dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement, mettre le protecteur.

### PRÉ-DÉSINFECTION

Immerger les instruments dans une solution détergente désinfectante.

Brosser, écouvillonner et irriguer.

Rincer sous l'eau courante.

En cas de besoin :

- Tube interne diam. 5mm, longueur 550mm, pack de 6

GK469R



- Tube interne diam. 10mm, longueur 550mm, pack de 6

PM995R

