

1. NETTOYAGE

Démonter les différents éléments. Brosser les éléments mobiles avec une brosse à poils souples. Ecouillonner le moteur et les mandrins.

Répéter ces 3 étapes si nécessaire

2. RINÇAGE

Rincer sous l'eau courante pendant au minimum 1 min pour retirer toutes traces de résidus opératoires.

3. PRÉ-DÉSINFECTION

Désinfecter les moteurs et mandrins à l'aide d'un tissu non pelucheux imbibé d'une solution détergente désinfectante. (produit alcalin doux 7<pH<11)

CONDITIONNEMENT


Positionner le moteur et ses accessoires sur les systèmes de support ECCOS adéquats.

2

COMPATIBILITÉ

Exclusivement avec des laveurs désinfecteurs et sans ultrasons.

PROGRAMME DU LAVEUR DÉSINFECTEUR

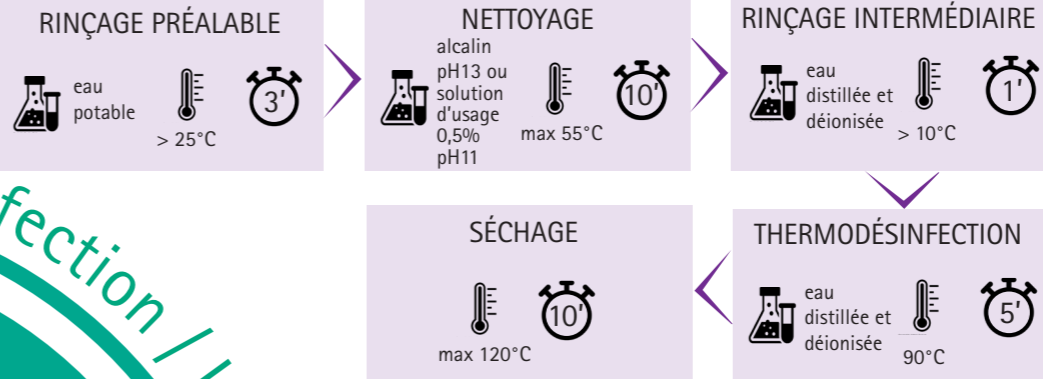

VÉRIFICATION

Après chaque nettoyage, contrôler l'absence de détérioration, et la propreté des moteurs.

Répéter ce programme si nécessaire

Pré-désinfection

Gammes Acculan

NE PAS IMMERGER LES MOTEUR ET LES MANDRINS

LES BATTERIES NE SONT PAS AUTOCLAVABLES !

Stérilisation à la vapeur

Lubrification


LUBRIFIER LES MOTEURS ET LES MANDRINS APRÈS CHAQUE CYCLE DE NETTOYAGE

La lubrification améliore la longévité des engrenages et évite le grippage interne des moteurs et des mandrins.

ACCESSOIRES

Les adaptateurs permettent une diffusion homogène de l'huile dans le mécanisme des moteurs.

Sterilit huile de lubrification

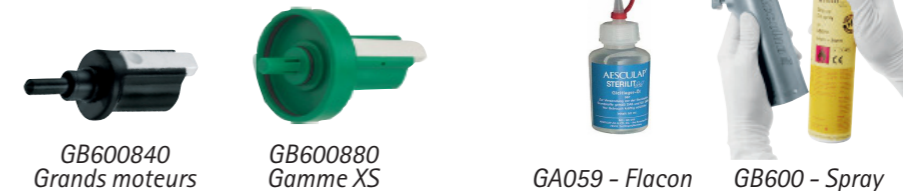

MANIPULATION


- 1 Pulvériser l'huile à l'aide de l'adaptateur, et du spray d'huile Sterilit GB600 pendant 2 secondes minimum en maintenant la bouteille verticale.
- 2 L'huile passée au contact des rouages du moteur doit ressortir claire. Dans le cas contraire répéter l'étape de lavage.
- 3 Lubrifier les parties mobiles et les actionner.
- 4 Absorber l'excès d'huile avec de la cellulose ou un tissu non pelucheux.

1

CONDITIONNEMENT

Positionner le moteur et ses accessoires sur les systèmes de support ECCOS adéquats. Ces fixations permettent le calage du matériel, mais aussi l'inclinaison des moteurs pour éviter la stagnation de tout liquide dans le dispositif. dis.

STÉRILISATION

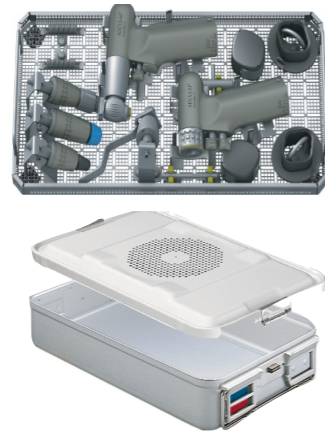

134°C
78 MINUTES

STOCKAGE

Stocker les produits stérilisés dans une pièce de T° homogène, sèche et propre.

4