


### INSTALLATION DE L'IRRIGATION




- I. Connecter un des deux embouts ci-contre dans la poche dédiée à l'irrigation (NaCl). Clamper la sortie qui n'est pas utilisée. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser les deux embouts en parallèle pour anticiper le changement de poche.

CONSEIL : Utiliser une poche de 500ml au minimum.

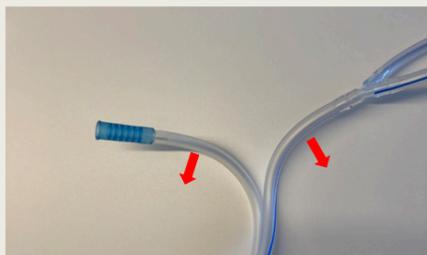

- II. Connecter l'embout ci-contre sur le bocal d'aspiration. Vous pouvez "peler" la tubulure pour augmenter la longueur de cette dernière et l'adapter à l'installation en salle.

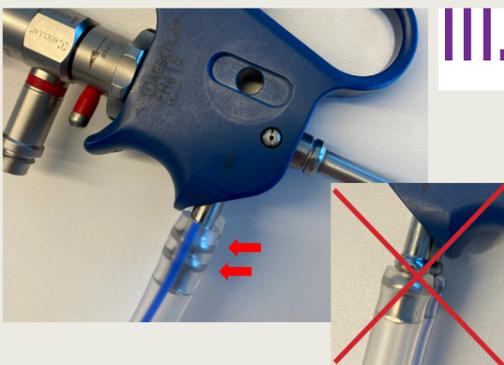

- III. Connecter les embouts ci-contre sur la poignée d'irrigation de référence FH615. Enfoncer les tubulures au maximum au-delà des deux repères pour éviter toute fuite. Des flèches gravées sur les embouts métalliques vous indiquent le sens d'insertion des tubulures. CONSEIL : Vous pouvez peler l'embout pour faciliter l'insertion.



Munissez-vous de la tubulure d'irrigation  
Réf FH605SU



Attention au sens de connexion

↑ Tubulure ligne bleue  
↓ Tubulure translucide

### TROCARD & OPTIQUE



- I. Insérer l'optique dans le trocart dédié.

CONSEIL : Pour faciliter les étapes suivantes, veillez à ce que la connexion vers le câble de lumière froide de l'optique soit vers le bas, et que l'inscription "close" du trocart soit en haut comme sur la photo ci-contre.



Attention au code couleur


VERT : OPTIQUE 0°



ROUGE : OPTIQUE 30°



- II. Verrouiller l'optique dans le trocart en tournant le petit loquet de couleur rouge ou vert d'un quart de tour vers le bas.

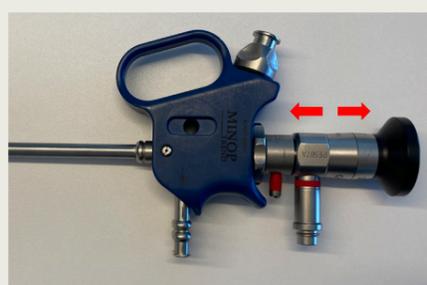

- III. Insérer le trocart dans la poignée d'irrigation FH615 et clipser l'ensemble avec une légère pression. Vérifier que le bouton de l'irrigation de la poignée soit correctement vissé.


CONSEIL : Pas de système de verrouillage. Lors du démontage, tirer délicatement le trocart hors de la poignée d'irrigation.

### INSTALLATION SUR LE M-TRAC



Visser l'adaptateur RT099R de part et d'autre de la poignée FH615 dans la forme prévue à cet effet.

*CONSEIL : Un détrompeur vous indique le sens pour visser correctement l'adaptateur.*

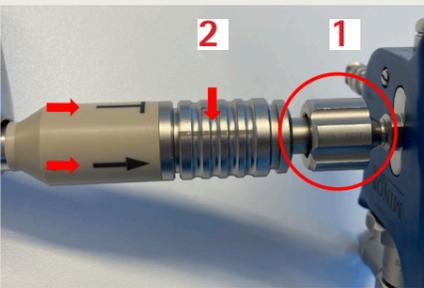

L'adaptateur se clipse sur l'embout du bras M-Trac.

2 niveaux de verrouillage:

1) Visser l'écrou ci-contre.

2) Tourner la bague ci-contre. Un trait gravé sur la bague métallique vous indique si le système de verrouillage est enclenché ou non.

*CONSEIL : Pour désenclencher, une fois les deux systèmes de verrouillage désactivés, pousser la bague pour désolidariser la poignée du bras.*

### EXEMPLE D'INSTALLATION



Afin d'installer votre système MINOP TREND de la manière la plus ergonomique possible, nous vous conseillons de positionner les différents éléments comme sur les exemples ci-contre:

- Tubulure d'irrigation et câble de lumière froide sur le côté.
- Embout du bras mécanique vers le haut.

