

NETTOYAGE DESINFECTIION DES CONTENEURS DE STÉRILISATION B. BRAUN AESCULAP®

GAMMES BASIS, VARIO, PRIMELINE PRO ET AICON

Ces recommandations s'appliquent aux conteneurs de stérilisation Aesculap en aluminium : neufs, déjà en service ou en retour de réparation.

I. Vérification

- Contrôler la conformité de la commande et du bon de livraison
- Retirer l'emballage
- Contrôler la référence
- Procéder à un examen visuel

II. Stockage

- Conserver les conteneurs de stérilisation dans un endroit sec, propre et protégé

III. Nettoyage

Dissocier la cuve, le couvercle et le sur-couvercle.
Pour les conteneurs PrimelinePro, la cartouche filtrante JP050 reste en place.

Lavage machine

- Utiliser un cycle de lavage spécifique aux conteneurs (le cycle instrumentation n'est pas adapté)
- Utiliser un produit de lavage* à pH compris entre 6,5 et 8,5
- Positionner le couvercle de façon à ce que toute sa surface intérieure soit bien accessible lors du lavage et en position verticale pour un bon écoulement de l'eau

Lavage manuel

- Nettoyer les conteneurs avec un produit de lavage* à pH compris entre 6,5 et 8,5
- Ne pas utiliser de brosses métalliques ou abrasives
- Rincer à l'eau osmosée ou déminéralisée

** Seuls doivent être utilisés des produits lessiviels compatibles avec les dispositifs médicaux en aluminium. Toutes les prescriptions d'application du fabricant des produits lessiviels doivent être strictement respectées. Respecter les indications sur la concentration, la température et le temps d'action. Ne pas dépasser la température de désinfection de 95 °C.*

IV. Conditionnement

- Contrôler la fonctionnalité de toutes les pièces du conteneur pour vérifier l'absence de détérioration et le bon fonctionnement
- Une distance de 2cm doit être respectée entre le bord de la cuve et le chargement (1 cm pour les conteneurs Aicon)*

V. Stérilisation

- Les conteneurs de stérilisation d'un même modèle peuvent être superposés dans l'autoclave.



⚠ **ATTENTION** : risque de dégradation ou de destruction du conteneur en raison d'un produit de nettoyage/désinfection inadéquat et/ou des températures trop élevées !

Des résidus blancs (poudre d'aluminium ou alumine) peuvent être observés sur le conteneur, ils peuvent être dus à :

- un pH élevé (par exemple en raison d'une solution de nettoyage alcaline)
- la qualité de l'eau
- des paramètres de processus divergents.

Vérifier le pH de l'eau et de la solution détergente tout au long du processus - ramener le pH entre 6,5 et 8,5. Si nécessaire, répéter le processus de nettoyage/désinfection.

Le résidu blanc n'a aucune incidence sur la forme, l'ajustement ou la fonction du conteneur.

Le système de containers Aesculap est un container de stérilisation réutilisable. Il sert d'emballage à des articles stériles, pour recevoir des articles et/ou textiles stériles pendant la stérilisation et pour le maintien de la stérilité pendant le stockage et le transport dans des conditions hospitalières appropriées.

Dispositifs médicaux de classe I. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage. Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale).

Se reporter à la notice d'utilisation pour les autres instructions du fabricant.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les maques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

Fabriqués par : Aesculap AG | Am Aesculap Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Distribués par : B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt | France. Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre. Edition 03/2025. CTN_20252403