


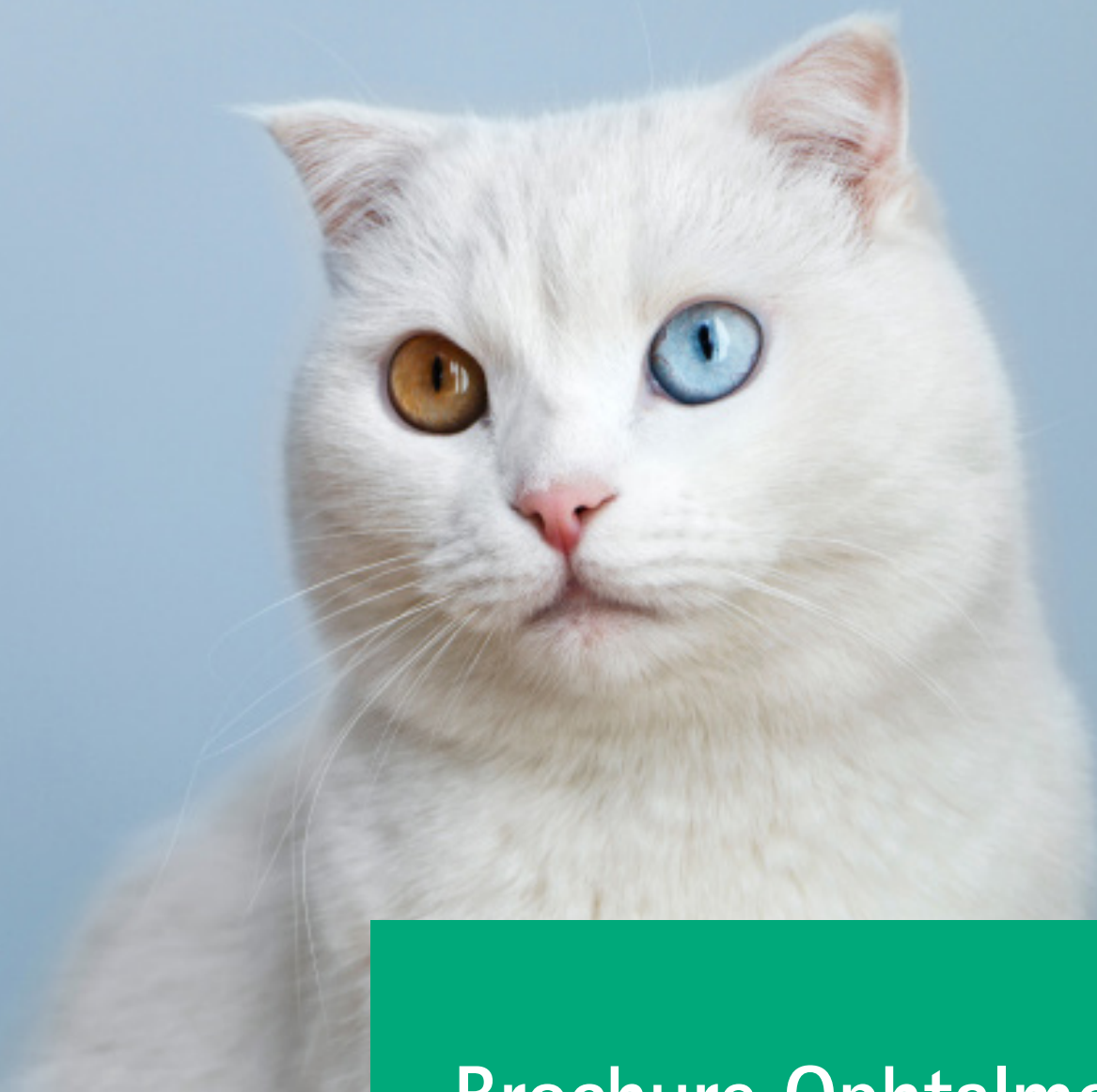

Brochure Ophtalmologie

B. Braun va vous taper dans l'oeil !



SOMMAIRE

01

LES SUTURES

08-09	Monosyn®
10-11	Novosyn Quick®
12-13	Novosyn®
14-15	Dafilon®
16-17	Optilène®
18	Histoacryl®

02

INSTRUMENTATION

22-24	Ciseaux
25-26	Micro-ciseaux
27	Porte-Aiguilles
28	Bistouris
29-31	Pinces
31	Clamps Bulldog
32	Ecarteurs

03

STERILISATION

36-37	Paniers
37-38	Conteneurs
40-42	Accessoires

04

SYSTEMES DE PERFUSION

45	Easypump®
----	-----------

01. LES SUTURES






INFORMATIONS SUR LES SUTURES

Les opérations chirurgicales de l'oeil requièrent une haute exigence concernant le matériel de suture et la géométrie de l'aiguille.

Pour satisfaire ces exigences, B.Braun a développé une gamme d'aiguilles adaptée à la chirurgie de l'oeil.


Indication	Aiguille recommandée	Fil recommandé	Perte de résistance à la tension de 50%
Opération dans la région de l'oeil	Aiguille DRT Aiguille DS Aiguille DSMP	Novosyn Quick Glycolide, Polyfilament	5 jours
		Novosyn PGA, polyfilament	21 jours
		Monosyn Glyconate, monofilament	14 jours
		Optilène Polypropylène et polyéthylène	Non-résorbable
		Dafilon Polyamide, monofilament	Non-résorbable
Opération de l'oeil	Aiguilles lancéolées Aiguille HLm Aiguille DLm Aiguille VLm Aiguille PLm	Optilène Polypropylène et polyéthylène	Non-résorbable
		Dafilon Polyamide, monofilament	Non-résorbable

Pour découvrir l'ensemble de notre gamme de **sutures** et télécharger notre **brochure**, n'hésitez pas à flasher ce QR code :

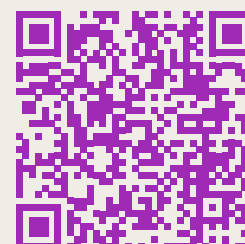



INFORMATIONS SUR LES AIGUILLES

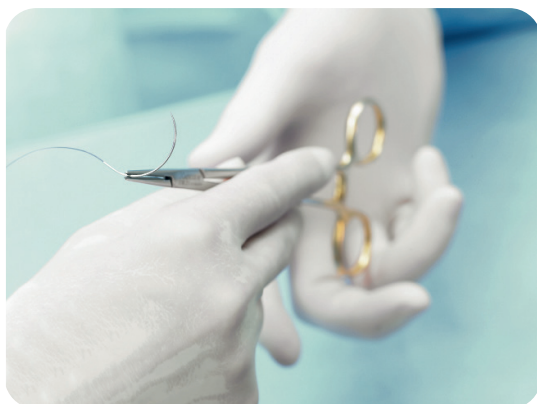

EasySlide - L'aiguille spéciale pour un passage en douceur. Toutes les aiguilles standard sont EasySlide (en acier inoxydable de la série 300).

- Résistance à la torsion et à la rupture
- Traitement de surface qui améliore la pénétration de l'aiguille
- Corps d'aiguille aplati qui assure une bonne stabilité dans le porte-aiguille
- Les aiguilles sont toutes siliconées permettant un bon piquant persistant

Courbure d'aiguille	Corps d'aiguille	Pointe d'aiguille	Longueur d'aiguille	Plus d'informations
S 1/8 cercle	R Rond	T Pointe diamant		s Aiguille forte
V 1/4 cercle	S Triangulaire	N Pointe mousse	Ceci correspond à la distance entre la pointe de l'aiguille et la zone de sertissage, distance mesurée le long de l'aiguille en mm.	ss Aiguille très forte
D 3/8 cercle	L Spatulé	S Sternale		v Aiguille sécable
H 1/2 cercle		C Micropointe		
F 5/8 cercle		MP Micropointe de précision		
G Droite		mV Microvasculaire		
P Composite/ progressive		m Microchirurgie		
J Crochet				
SK Ski				

Quelques exemples :


Courbure d'aiguille	Corps d'aiguille	Pointe d'aiguille	Longueur d'aiguille	Plus d'informations
H	R	T	37	s
Exemple 1: HRT 37s = 1/2 cercle, ronde, avec pointe diamant, longueur 37 mm, aiguille forte				
D	S	MP	16	
Exemple 2: DSMP 16 = 3/8 cercle, aiguille triangulaire, pointe de précision, longueur 16 mm				
H	S		19	
Exemple 3: HS 19 = 1/2 cercle, aiguille triangulaire, longueur 19 mm				

Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur)

DS | HS





Aiguille de section triangulaire avec un apex à bords tranchants qui se prolonge le long de la courbure de l'aiguille.

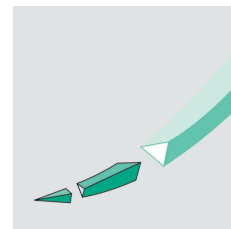**Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur),
pointe de précision**

DSMP





Aiguille présentant une géométrie spécifique à pointe fine et un apex à bord tranchant. Le corps s'aplatit progressivement après la pointe de l'aiguille pour une plus grande stabilité dans le porte-aiguille.

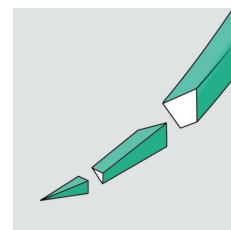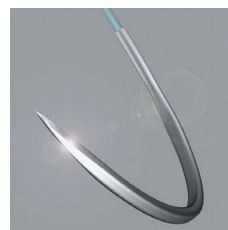**Aiguille ronde avec pointe diamant**

DRT | HRT





Aiguille avec pointe tranchante robuste à quatre arêtes qui se prolonge par un corps rond effilé. Cette aiguille assure une bonne pénétration dans les tissus scléreux avec un trauma tissulaire minime.

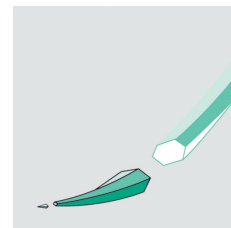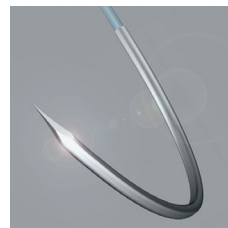**Aiguille ronde micropointe**



DRC



Aiguille ronde avec extrémité de la pointe triangulaire qui améliore la pénétration dans les vaisseaux calcifiés et les tissus scléreux. Son corps carré et non aplati permet une résistance accrue à la flexion. Cette aiguille est spécialement conçue pour les indications cardiovasculaires.

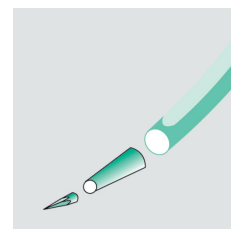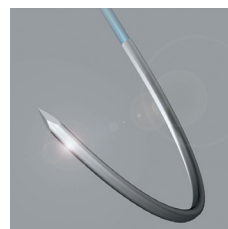**Aiguille spatulée de microchirurgie**HLm | DLm
PLm | VLm

Pointe d'aiguille spécialement conçue pour traverser les structures ophtalmiques sans endommager la couche supérieure et inférieure du stroma.

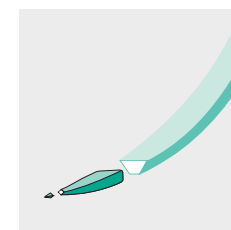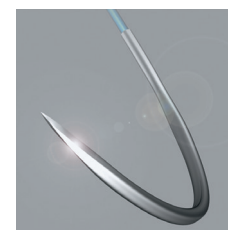

Les porte-aiguilles AESCULAP sont adaptés, grâce à la structure de leurs mors en métal dur, à la taille de l'aiguille utiliser suivant les indications. Des mors lisses ainsi que 3 profils différents garantissent la prise sûre de l'aiguille.

Nous recommandons :

- les mors en métal dur à surface lisse pour les sutures de : 9/0 - 11/0
- à profil de 0,2 mm pour les sutures de : 6/0 - 10/0
- à profil de 0,4 mm pour les sutures de : 4/0 - 6/0
- à profil de 0,5 mm pour les sutures : jusqu'à 3/0

**Codage des articles permettant d'identifier
le contenu des boîtes**

Le code des sutures se compose d'1 lettre et 7 chiffres.
La lettre indique le nombre d'unités dans chaque boîte :

G Boîte de 12**B** Boîte de 24**C** Boîte de 36

Les Sutures Résorbables

Monosyn®


Monofilament synthétique résorbable à moyen terme

- Description

Monosyn® est un monofilament synthétique résorbable composé de glyconate, disponible en incolore pour la fermeture des plaies superficielles et en violet pour les autres indications.

- Propriétés

- Conserve 50% de sa résistance initiale après 14 jours
- Résorption complète en 60 à 90 jours

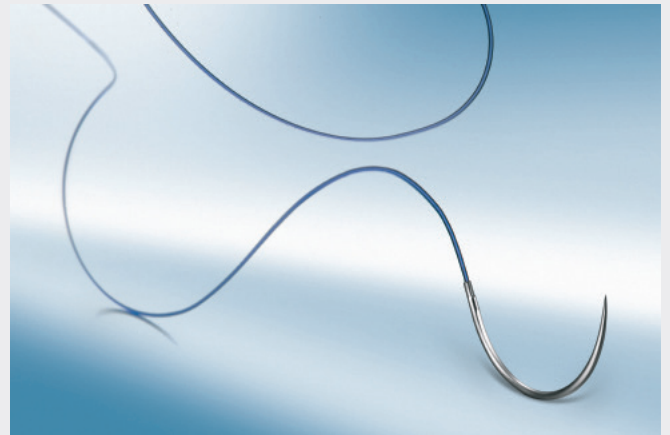

Aperçu produit:

Structure	Monofilament
Couleur	Violet ou Incolore
Composition chimique	Glyconate (72% glycolide, 14% carbonate de triméthylène, 14% e-caprolactone)
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 7/0 (Déc. 0,5) à USP 2 (Déc. 5)
Résorption	Résorption par hydrolyse
Stérilisation	Oxyde d'éthylène

Monosyn®										14 jours
Aiguilles	Fil		USP Métrique							
Longueur (mm)	Longueur (cm)	Couleur	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille Ronde pointe Diamant 1/2 cercle										
HRT 13	70	Violet				C0022310	C0022311			
HRT 17	70	Violet				C0022322	C0022323	C0022324		
Aiguille Ronde Micropointe 3/8 cercle										
DRC 12	70	Violet				C0022392	C0022403			
Aiguille Triangulaire 3/8ème pointe de précision										
DSMP 11	45	Incolore				C2023642	C2023643			
DSMP 13	45	Incolore				C0023602				
DSMP 13	45	Violet					C0022433			

Les Sutures Résorbables

Novosyn Quick®

Tresse synthétique résorbable à court terme

- **Description**

Novosyn® Quick est une tresse synthétique à résorption rapide, à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite, disponible en incolore.

Novosyn® Quick est indiqué pour le rapprochement des tissus mous, lorsqu'un support de la plaie à court terme est requis et que la résorption rapide de la suture apporte un effet bénéfique.

- **Propriétés**

- Conserve 50% de sa résistance initiale après 5 jours
- Résorption totale en environ 42 jours



Aperçu produit:

Structure	Tresse
Couleur	Incolore
Composition chimique	glycolide (90 %) et L-lactide (10 %)
Enduction	glycolide (30 %), L-lactide (70%) et stéarate de calcium
Origine	Synthétique
Calibres	USP 6/0 (Déc. 0,7) à USP 2 (Déc. 5)
Résorption	Par hydrolyse, totale en 42 jours
Résistance à la traction	50% après 5 jours d'implantation 0% après 14 jours d'implantation
Stérilisation	Irradiation Gamma

Novosyn Quick®										5 Jours
Aiguilles		Fil		USP Métrique						
Longueur (mm)	Longueur (cm)	Couleur	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille ronde 1/2 cercle Micropointe										
DRC 12	70	Incolore								C3046311
Aiguille triangulaire 3/8 cercle										
DS 12	70	Incolore			C3046201	C3046202	C3046203			
Aiguille triangulaire avec pointe de précision(tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle										
DSMP 7	45	Incolore			C3046612					
DSMP 11	45	Incolore			C3046607	C3046610				
DSMP 11	45	Incolore			C3046603					
DSMP 13	45	Incolore				C3046619	C3046620			
DSMP 16	45	Incolore					C3046625			

Les Sutures Résorbables

Novosyn®

Tresse synthétique résorbable à moyen terme


- **Description**

Novosyn® est une tresse résorbable synthétique à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite, disponible en violet et en incolore.

Novosyn® est indiqué pour le rapprochement des tissus mous et pour la ligature dans toutes les spécialités chirurgicales où la pratique requiert l'utilisation de tresses résorbables à moyen terme.

- **Propriétés**

- Conserve 40-50% de sa résistance initiale après 21 jours
- Résorption complète en 56 à 70 jours

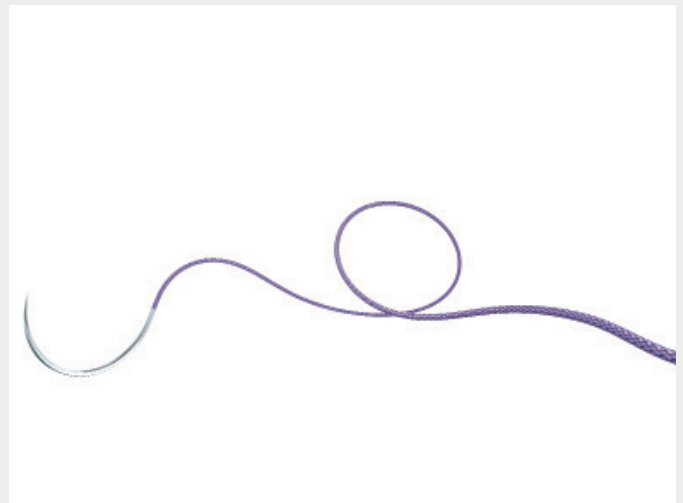

Aperçu produit:

Structure	Tresse
	
Couleur	Violet ou Incolore
Composition chimique	Acide polyglycolique / acide L-lactique (90/10)
Enduction	Acide polyglycolique / acide L-lactique / Stéarate de calcium
Origine	Synthétique
Calibres	USP 8/0 - 2 (Déc. 0,4 - 5)
Résorption	Résorption par hydrolyse
Stérilisation	Oxyde d'éthylène

Novosyn®

21 jours

Aiguilles	Fil		USP Métrique							
Longueur (mm)	Longueur (cm)	Couleur	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille lancéolée 1/2 cercle Micropointe										
2 x HLm 6	30	Violet	G0068715							
2 x HLm 8	30	Violet	G0068740							
2 x HLm 8	45	Violet		G0068741	G0068966	G0068967				
2 x HLm 8	45	Incolore			G0069740		G0068968			
Aiguille lancéolée de micro-chirurgie 3/8ème										
2 x DLm 6	30	Violet	G0068699							
DLm 6	15	Violet	G0068615							
DLm 6	30	Violet	G0068724							
DLm 6s	30	Violet	G0068620	G0068621						
2 x DLm 6	30	Violet	G0068702							
2 x DLm 6	45	Violet	G0068701							
2 x DLm 6s	30	Violet	G0068710	G0068712						
2 x DLm 6s	45	Violet	G0068713	G0068711						
Aiguille lancéolée de micro-chirurgie 1/2 cercle										
2 x HLm 8	45	Violet		G0068734						
Aiguille lancéolée de micro-chirurgie 1/2 cercle Micropointe										
2 x VLM 8	45	Violet		G0068734	G0068735					
Aiguille triangulaire 3/8ème										
DS 9	45	Violet			C0068202					
DS 12	45	Violet			C0068206	C0068207	C0068208			
Aiguille triangulaire 3/8ème pointe de Précision										
DSMP 11	45	Violet		C0068684	C0068685					
DSMP 11	45	Incolore			C0069607	C0069608				
2 x DSMP 11	45	Violet			C0068726					

Les Sutures Non Résorbables

Dafilon®

Monofilament synthétique non résorbable de polyamide


- Description

Dafilon® est un monofilament non résorbable synthétique composé de polymères de Polyamide 6/6.6 (bleu), Polyamide 6.6 (noir) ou Polyamide 6 (incolore).

Dafilon® bleu et Dafilon® incolore sont indiqués pour la fermeture de plaies superficielles et la chirurgie plastique. Dafilon® bleu est également utilisé en neurochirurgie.

Dafilon® noir est utilisé pour les interventions ophtalmiques et microchirurgicales.

Comme toute suture de nylon, bien que non résorbable, une hydrolyse progressive de la suture peut se produire, entraînant une diminution de sa résistance dans le temps.

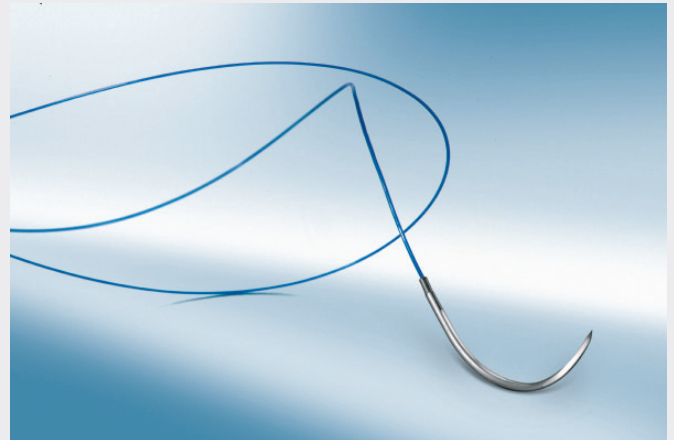

Aperçu produit:

Structure	Monofilament
Couleur	Bleu, Noir ou Incolore
Composition chimique	Polyamide
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 11/0 (Déc. 0.1) à USP 5 (Déc. 7)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Irradiation Gamma / Oxyde d'Ethylène (microchirurgie 7/0 à 11/0)

Dafilon®			Non résorbable							
Aiguilles	Fil		USP Métrique							
Longueur (mm)	Longueur (cm)	Couleur	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2
Aiguille lancéolée de micro-chirurgie 3/8ème										
DLm 6	15	Noir	G1118722	G1118730						
DLm 6s	15	Noir	G1118781	G1118790	G1118579					
2 x DLm 6s	30	Noir	G1118765	G1118773						
DLm 6s	45	Noir			G1118854					
Aiguilles lancéolée de micro-chirurgie 1/2 cercle										
HLm 6	15	Noir	G1118625	G1118633						
2 HLm6	30	Noir	G1118609	G1118617						
Aiguilles lancéolée de micro-chirurgie Progressive										
2 x PLm 5	20	Noir	G1111922							
Aiguilles triangulaire 3/8ème										
DS 12	45	Bleu					C0932060	C0932078	C0932086	
DS 16	45	Bleu					C0932116	C0932124	C0932132	
Aiguilles triangulaire 3/8ème pointe de Précision										
DSMP 11	45	Bleu					C0936022	C0936014		
DSMP 13	45	Bleu					C0936081	C0936090	C0936103	

Les Sutures Non Résorbables


Optilène®

Monofilament synthétique non résorbable de polypropylène et polyéthylène

- Description

Optilène® est un monofilament non résorbable de polypropylène et polyéthylène, disponible en bleu pour améliorer la visibilité.

Optilène® présente la particularité d'être disponible en conditionnement LongPack et RacePack®, et équipé pour certaines références de pledgets PremiPatch® en PTFE.

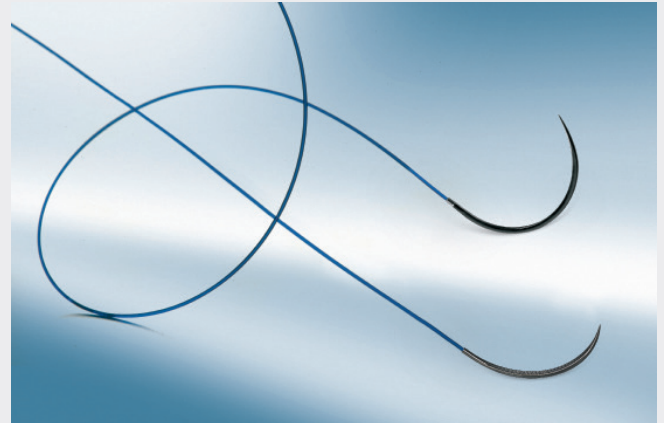

Aperçu produit:

Structure	Monofilament
Couleur	Bleu
Composition chimique	Polypropylène et polyéthylène
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 10/0 (Déc. 0.2) à USP 2 (Déc. 5)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Oxyde d'éthylène

Optilène®											Non résorbable		
Aiguilles	Fil		USP Métrique										
Longueur (mm)	Longueur (cm)	Couleur	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2			
Aiguille lancéolée de micro-chirurgie 3/8ème													
DLm 6s	15	Bleu	G3090594										
2 x DLm 6	30	Bleu	G3090591										
2 x DLm 6s	30	Bleu	G3090596	G3090597									
Aiguille triangulaire 3/8ème													
DS 12	45	Bleu					C3090206	C3090207	C3090208				
DS 16	45	Bleu					C3090211	C3090212	C3090213				
Aiguille triangulaire 3/8ème, pointe de Précision													
DSMP 11	45	Bleu					C3090606	C3090607	C3090608				
DSMP 11	75	Bleu					C3090406	C3090407					
DSMP 13	45	Bleu					C3090617	C3090618	C3090619	C3090620			
DSMP 13	75	Bleu							C3090409	C3090410			

La Colle Tissulaire

Histoacryl® *



• Description

La **colle tissulaire** est une alternative aux sutures ou aux agrafes. Elle permet la fermeture sans suture des petites plaies de la peau .

- Excellents **résultats esthétiques**
- Sans anesthésie locale
- Film de **protection** empêchant l'entrée des bactéries dans la plaie
- Résistant à l'eau
- Se conserve à une température **inférieure à 22°C**
- Composition : Embucrylate (cyanoacrylate-2-n-butyle)

Contenance	Couleur	Conditionnement (unités)	Code article B. Braun
0,5 mL	Bleu	5	1050052
0,5 mL	Bleu	10	1050044

* Ne pas appliquer Histoacryl® sur les muqueuses ou les jonctions cutané-muqueuses, sur les zones riches en poils ou dans le sac conjonctival de l'œil.

Histoacryl® ne doit pas être appliqué sur la surface de l'œil. Si Histoacryl® entre accidentellement en contact avec l'œil, rincer immédiatement à l'eau.

Si en utilisant Histoacryl®, une adhérence ou un dépôt se produisent, notamment dans l'œil, ceux-ci s'élimineront d'eux-mêmes au bout de quelques jours. Ne pas forcer l'ouverture des yeux.

02. INSTRUMENTATION





INFORMATIONS SUR L'INSTRUMENTATION

B. Braun fabrique des instruments de chirurgie sous la marque Aesculap® depuis plus de 140 ans et propose aujourd'hui un portefeuille complet d'instruments.

Les instruments de chirurgie sont essentiels à la bonne réalisation de nombreux actes chirurgicaux.

Aesculap a développé ses propres normes de fabrication afin de répondre aux exigences des chirurgiens et d'assurer le bien être du patient.

Parmi les principales familles d'instruments on retrouve:

- Ciseaux
- Pincés à disséquer
- Pincés hémostatiques
- Portes aiguilles
- Ecarteurs
- [...]



Pour découvrir l'ensemble de notre gamme d'**instrumentation** et télécharger notre **catalogue**, n'hésitez pas à flasher ce QR code :




Les Ciseaux

Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
CISEAUX STEVENS FIN			
	Droit, Pointus	115	BC008R
	Courbes, Pointus	115	BC009R
	Droits	115	BC010R
	Courbes	115	BC011R
CISEAUX RAGNELL FIN			
	Droits	135	BC026R
	Courbes	135	BC027R
CISEAUX POUR MICROSCOPIE			
	Droits	105	BC060R
	Courbes	105	BC061R
CISEAUX À IRIDECTOMIE ET LIGATURE			
	Droits	110	BC110R
	Courbes	110	BC111R
CISEAUX POUR OPHTHALMOLOGIE ET A LIGATURE			
	Droits	130	BC140R
	Courbes	130	BC141R
CISEAUX CHIRURGICAUX JOSEPH			
	Droits	150	BC156R
	Courbes	150	BC157R
CISEAUX À STRABISME EM / EM			
	Droits	115	BC164R
	Courbes	115	BC165R
	Courbes, W-Cut	110	BC211WB
CISEAUX À DISSECTION DE KILNER			
	Courbes	125	BC166R


Les Ciseaux

Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
CISEAUX A TENDONS STEVENS			
	-	110	BC170R
	-	110	BC172R
	Droits	125	BC194R
	Courbes	125	BC195R
CISEAUX FIL NOIR			
	Droits	110	BC210B
	Courbes	110	BC211B
DUROTIP CISEAUX A DISSECTION			
	Droits	115	BC256R
	Courbes	115	BC257R
CISEAUX PREPARATION NOIR			
	Courbes	115	BC257B
	Courbes, W-cut	115	BC257WB
DUROTIP CISEAUX P-FILS W			
	Courbes	145	BC294W
SUPERCUT CISEAUX JAMESON			
	Courbes	130	BC911R
CISEAUX À ENUCLEATION LANDOLT			
	Courbes	125	OC430R

Les Ciseaux

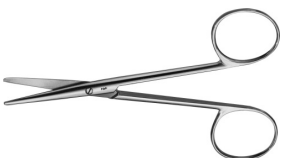Visuel	Particularités	Longueur (mm)	WCode article B. Braun
CISEAUX VANNAS P.CATARACTE			
	Droits	85	OC498R
CISEAUX À CATARACTE VANNAS			
	Courbes	85	OC499R
CISEAUX NASAUX DE COTTLE-KNAPP			
	Droits	105	OK368R



Les Micro-ciseaux

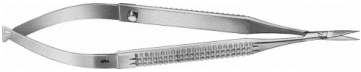Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
CISEAUX-RESSORT POUR MICROCHIRURGIE			
	Droits	120	FD012R
	Courbes	120	FD013R
MICRO-CISEAUX A RESSORT MANCHE ROND			
	Droits	145	FD100R
	Courbes	145	FD101R
	Courbes	145	FD103R
MICRO-CISEAUX A RESSORT PTU / PTU			
	Courbes	180	FD251R
	Droites	180	FM042R
MICRO-CISEAUX A FIL PTU / PTU			
	Courbes	180	FD252R
MICRO-CISEAUX MUELLER PTU/PTU			
	Droits	120	FM010R
	Courbes	120	FM011R
PINCE-CISEAUX À IRIDECTOMIE MC'CLURE			
	Droits	95	OC480R
PINCE-CISEAUX CASTROVIEJO P.CORNEE			
	Coudées Latéralement	95	OC485R

Les Micro-ciseaux

Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
CISEAUX À IRIDECTOMIE CASTROVIEJO			
	Courbes	95	OC486R
PINCE-CISEAUX CASTROVIEJO P.CORNEE			
	Gauche	110	OC491R
	Droit	110	OC492R
PINCE-CISEAUX POUR MICROCHIRURGIE			
	Droit	105	OC496R
	Courbe	105	OC497R

Porte-Aiguilles

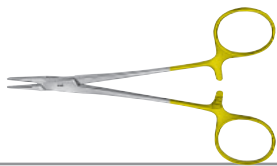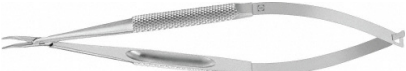Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
DUROGRIP PORTE-AIGUILLE HALSEY			
	Durogrip	130	BM012R
DUROGRIP PORTE-AIGUILLE CASTROVIEJO			
	Durogrip, Mors Lisse	145	BM001R
	Durogrip	145	BM002R
PORTE-AIGUILLE BARRAQUER			
	Incurvé	120	BM560R
PORTE-AIGUILLE MICROCHIRURGIE DE BARRAQUER			
	Droite, Sans crémaillère	120	FD230R
	Courbe, Sans crémaillère	120	FD231R
	Droite, Avec crémaillère	120	FD232R
	Courbe, Avec crémaillère	120	FD233R
DIADUST MICRO PORTE-AIGUILLE,			
	Diadust, Avec crémaillère	120	FM520R
	Diadust, Sans crémaillère	120	FM524R

Les Bistouris


Les manches de bistouris

Visuel	Longueur (mm)	Type	Conditionnement (unités)	Code article B. Braun
	125	3	1	BB073R
	135	4	1	BB084R
	215	4	1	BB085R
	160	3	1	BB077R
	135	4	1	BB088R


Les bistouris sécurisés

Visuel	Description	Longueur (mm)	Conditionnement	Code article B. Braun
	#10	170	10	BA810SU
	#11	170	10	BA811SU
	#12	170	10	BA812SU
	#13	170	10	BA813SU
	#15	170	10	BA815SU
	#15-C	170	10	BA815-CSU
	#18	170	10	BA818SU
	#19	170	10	BA819SU
	#20	170	10	BA820SU
	#21	170	10	BA821SU
	#22	170	10	BA822SU
	#23	170	10	BA823SU
	#24	170	10	BA824SU
	#25	170	10	BA825SU
	#36	170	10	BA836SU

Les Pinces

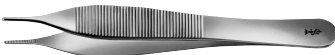Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
PINCE A DISSECTION			
	Largeur Moyenne	180	BD030R
	-	180	BD050R
	Modèle Suédois	200	BD069R
PINCETTE A DISSECTION DE MICRO-ADSON			
	Mors très Fin avec Plateau	120	BD220R
PINCETTE A DISSECTION DE ADSON			
	Mors très Fin	120	BD222R
PINCETTE A DISSECTION DE MICRO-ADSON			
	Mors très Fin	150	BD223R
PINCE POUR MICRO SUTURE DE LAZAR			
	Mors : 0,5 mm	155	BD260R
PINCE POUR MICRO SUTURE			
	Mors : 0,5 mm	185	BD264R
PINCE POUR MICROSCOPIE			
	Droite	100	BD320R
	Courbe	100	BD321R
PINCE POUR MICROCHIRURGIE			
	Mors : 0,2 mm	110	BD330R
	Mors : 0,15 mm	110	BD331R
	Mors : 0,2 mm	115	BD333R
	Mors : 0,3 mm	135	BD335R
PINCE POUR MICRO-SUTURE DE VISE			
	Droite	135	BD336R
	Courbe	135	BD337R

Les Pinces

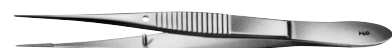Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
PINCE CHIRURGICALE TRES FINE			
	1 x 2 Griffes	110	BD501R
PINCE CHIRURGICALE DE BONNER MODELL			
	1 x 2 Griffes	95	BD505R
PINCE CHIRURGICALE DE ADSON			
	1 x 2 Griffes	120	BD508R
	1 x 2 Griffes avec Plateau	120	BD512R
PINCE CHIRURGICALE			
	1 x 2 Griffes	180	BD560R
PINCE ATRAUMATA DE BAKEY			
	Droite, 2 mm de large	150	FB400R
	Droite, 2 mm de large	200	FB402R
	Droite, 1.5 mm de large	150	FB411R
	Droite, 1.5 mm de large	200	FB412R
	Droite, 2.8 mm de large	200	FB415R
PINCE A NOUER			
	Droite Mors 0,3 mm	120	FD280R
	Courbe Mors 0,3 mm	120	FD281R
	Droite Mors 0,3 mm	150	FD284R
	Droite Mors 0,3 mm	150	FD284R
PINCE A IRIS			
	Droite	100	OC020R
	Légèrement Courbe	100	OC021R
	Courbe	100	OC022R
	1 x 2 Griffes Droite	100	OC024R
	1 x 2 Griffes Légèrement Courbe	100	OC025R
	1 x 2 Griffes Courbe	100	OC026R


Les Pinces

Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
PINCE POUR CORNEE DE THORPE			
	Droite	120	OC069R
PINCE CHIRURGICALE DE ST. MARTIN			
	1 x 2 Griffes	80	OC091R
PINCE A SUTURES CASTROVIEJO			
	Droite	100	OC094R
PINCE CHIRURGICALE DE GRAEFFE			
	5 x 6 Griffes	110	OC100R
PINCE A CHALAZION DESMARRE			
	-	90	OC231R

Les Clamps Bulldog

Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
CLAMP VASCULAIRE DE DIEFFENBACH			
	Droite	38	BH020R
	Courbe	38	BH021R
	Droite	48	BH022R
	Courbe	48	BH023R
	Droite	58	BH026R
	Courbe	58	BH027R
MINI-PINCE BULLDOG			
	Droite	35	FB328R
	Courbe	35	FB329R
	Droite	45	FB330R
	Courbe	45	FB331R
MINI-PINCE BULLDOG ATR			
	Droite	50	FB362R
	Coudé	50	FB363R

Les Ecarteurs

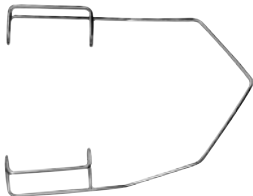Visuel	Particularités	Longueur (mm)	Code article B. Braun
ECARTEUR A PAUPIERES DE BARRAQUER N.MAGNET			
	-	45	OA200R
ECARTEUR A PAUPIERES SAUER			
	-	35	OA218R
ECARTEUR A PAUPIERES DE LANCASTER			
	-	80	OA225R
CROCHET A PAUPIERE DESMARRES			
		140	OA311R
	-	140	OA312R
		140	OA313R
CROCHET A IRIS GUTHRIE POINTU			
	2 Griffes	125	OA334R
	2 Griffes	130	OA335R
CROCHET A IRIS ROLLET POINTU			
	2 Griffes	130	OA336R
	4 Griffes	135	OA337R

Les Bonnes Pratiques de Stérilisation

Entretien / Contrôle des instruments

- Après chaque nettoyage et décontamination, contrôler l'instrument : propreté, bon fonctionnement et absence de détérioration.
Par exemple: absence d'éléments tordus, brisés, fissurés, usés et rompus.
- Mettre au rebut l'instrument endommagé, défectueux et le remplacer.
- En sortie de lavage, laisser refroidir l'instrument à température ambiante.
- Huiler légèrement les pièces mobiles (p. ex. les articulation et fermetures) avec une huile d'entretien stérilisable et perméable à la vapeur (par exemple spray d'huile Sterilit JG600).
- Procéder au cycle de stérilisation.



Nous vous recommandons le produit JG600 pour l'entretien des instruments et la stérilisation.



• Description

Spray d'huile Aesculap en vaporisateur (sans CFC), pour l'entretien des instruments avant la stérilisation.
Biocompatible.

Nom	Contenance (mL)	Conditionnement (unités)	Code article B. Braun
Sterilit	300	6	JG600

3. STÉRILISATION





INFORMATIONS SUR LA STÉRILISATION

Stérilisation des instruments chirurgicaux

Une bonne stérilisation des instruments utilisés en bloc opératoire est essentielle pour la qualité et la prestation de la chirurgie.

Les conteneurs B. Braun, sous la marque Aesculap, répondent aux exigences en termes d'hygiène, de sécurité et de fiabilité attendues par les établissements de santé animale. Des paniers et solutions de calage ont été développés afin d'organiser les instruments au sein des conteneurs et faciliter leur utilisation.



Pour découvrir l'ensemble de notre gamme de **stérilisation** et télécharger notre **brochure conteneurs**, n'hésitez pas à flasher ce QR code :



Les Paniers

- Mini paniers



Avec Perforation
2 mm

Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
85 x 44 x 35	JF145R
80 x 39 x 18	



Avec perforation
4 mm

Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
85 x 45 x 25	JF146R
80 x 39 x 18	
354 x 44 x 35	JF147R
349 x 39 x 28	
145 x 44 x 25	JF148R
140 x 39 x 18	



Avec Perforation
4 mm


Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
236 x 72 x 27	JF155R
230 x 66 x 20	



Avec Perforation
2 mm
Pour petites pièces, deux paniers
perforés. Insérable dans les mini
conteneurs JK188 ou JN188

Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
135 x 120 x 47	JF149R
128 x 113 x 38	

Les Paniers

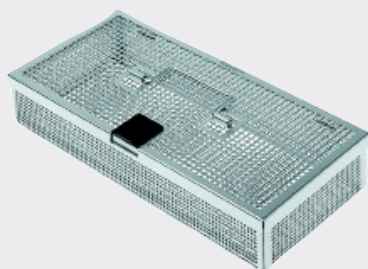

Avec perforation
4 mm

Les dimensions citées
correspondent : longueur
x largeur x hauteur (mm)
Pour micro-instruments,
insérable dans les
mini conteneurs
Aesculap JK188 ou JN188

Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
267 x 125 x 49	JF159R
261 x 118 x 41	




Avec Perforation
4 mm

Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
80 x 80 x 33	JF140R



Panier Dentaire

Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
188 x 84 x 30	JG387R
181 x 82 x 23	

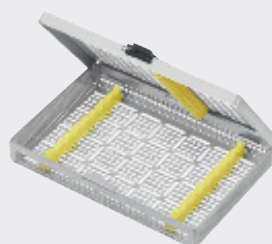

Panier Dentaire

Dimensions extérieures (mm)	Code article
Dimensions intérieures (mm)	B. Braun
188 x 125 x 30	JG388R
181 x 123 x 23	

Les Conteneurs

Les Mini-Conteneurs



• Description

Mini Conteneurs pour Kits et Instruments de petite dimension.

Les mini conteneurs ont été spécialement développés pour :

- Les petits sets (p. ex. traitement des plaies de petite taille)
- Les petits instruments délicats, qui sont utilisés notamment en microchirurgie.

- Sans perforation de la cuve = JK
- Avec perforation de la cuve = JN

• Cuves

Visuel	Particularités	Dimensions extérieures (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	Code article B. Braun
	Sans Perforation	310 x 132 x 30	JK187
	Sans Perforation	310 x 132 x 57	JK188
	Perforée	310 x 132 x 30	JN187
	Perforée	310 x 132 x 57	JN188

• Couvercles

Visuel	Coloris	Code article B. Braun
	Rouge	JK170
	Bleu	JK171
	Vert	JK172
	Or	JK173
	Argent	JK174

Les Conteneurs

Les Conteneurs Basis



Description

Le système Basis en aluminium peut être équipé d'un sur-couvercle protégeant la zone perforée du système de filtration. Cela convient en particulier aux transports sur de longues distances ou hors de l'établissement.

- Hauteurs de cuve disponibles: 90, 120, 135, 187 et 247 mm
- Aluminium: Al Mg 05
- Filtres à usage unique ou filtres permanents en PTFE validés pour 1000 cycles
- Sans perforation de la cuve = JK
- Avec perforation de la cuve = JN

Cuves


Particularités	Dimensions extérieures (mm)	Code article
	Longueur x Largeur x Hauteur	B. Braun
Sans poignée de transport	300 x 274 x 57	JK339
-	300 x 274 x 90	JK340
-	300 x 274 x 120	JK341
-	300 x 274 x 135	JK342
-	300 x 274 x 187	JK344
-	300 x 274 x 247	JK346

Couvercles

Visuel	Coloris	Code article B. Braun	
		Pour cuve JK339	Autres
	Rouge	JK395	JK385
	Bleu	JK396	JK386
	Vert	JK397	JK387
	Or	JK398	JK388
	Argent	JK399	JK389

Les Accessoires

Éléments de calage en silicone pour micro-instruments

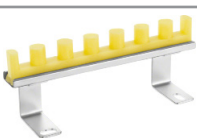Visuel	Visuel	Dimensions extérieures (mm) Longueur x Largeur	Nombre d'espace	Code article B. Braun
		123 x 18	7	JG321
		123 x 18	6	JG322
		123 x 18	13	JG323
		Appui pour instruments recourbés 123 x 45	7	JG324
		Elements de calage à picots 160 x 30	19	JG325
		240 x 30	29	JG326
	-	120 x 40	20	JG327
		120 x 40	4	JG328
		60 x 40	2	JG333
		120 x 40	4	JG329
		60 x 40	2	JG334

Les Accessoires

Plaquettes d'identification



• Description

Plaquettes d'identification avec inscription sur une seule ligne (hauteur de caractères 6 mm) ou sur deux lignes (hauteur de caractères 5 mm), 13 caractères max par ligne.

- Dimensions : 50 x 18 mm
- Convenant aux conteneurs Mini, Dentaire, de réacheminement et à charnière, aux distributeurs d'essuie mains ainsi qu'aux conteneurs JK299, JK309, JK339
- Remarque: Traiter les plaquettes d'identification en aluminium avec un nettoyant au pH neutre.

Couleur	Code article B. Braun
Rouge	JG645B
Bleu	JG646B
Vert	JG647B
Or	JG648B
Noir	JG650B
Brun olive	JG652B
Violet	JG653B
Orange	JG654B

Elements de fixation



Goupille de fixation pour paniers
JG et JF

Conditionnement	Code article B. Braun
10	JG300



Description	Code article B. Braun
Tournevis pour goupille de fixation JG300	JG302



Dimensions extérieures	Code article B. Braun
19 x 8,5 x 0,05 mm	JJ588R



Description	Code article B. Braun
Tournevis pour set de vis JJ588R	JJ589R



Pince fixation / Élément de rangement

Description	Code article B. Braun
10	JG301R

Les Accessoires

Goupille de maintien pour instruments
à anneaux



Hauteur	Diamètre	Code article B. Braun
25 mm	29 mm	JF346

Guide câbles pour paniers JG et JF



Hauteur	Diamètre	Code article B. Braun
6 mm	47 mm	JF343

Tapis picots en silicone avec perforations



Dimensions extérieures	Code article B. Braun
266 x 125 x 17 mm	JF934

Tapis à picots


Insérable dans panier 1/2

Insérable dans petit panier 1/1

Insérable dans panier 3/4

Insérable dans panier 1/1

Ne convient pas à la stérilisation à l'air chaud!


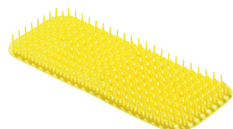


Dimensions extérieures	Code article B. Braun
248 x 102 x 20 mm	JF944

Rangement antidérapant des instruments

Insérable dans JF159R

Ne convient pas à la stérilisation à l'air chaud!

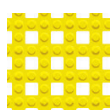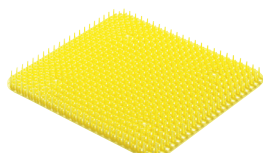

Dimensions extérieures	Code article B. Braun
248 x 237 x 20 mm	JF945
394 x 242 x 20 mm	JF947
472 x 242 x 20 mm	JF948
517 x 242 x 20 mm	JF949

Tapis à picots

Insérable dans panier 1/2

Insérable dans panier 3/4

Insérable dans panier 1/1

Insérable dans petit panier 1/1

Ne convient pas à la stérilisation à l'air chaud!

4. SYSTEMES DE PERFUSION




Les Diffuseurs portables

Les diffuseurs portables **Easypump® II** sont conçus pour administrer en continu des quantités prédéterminées de médicaments. Easypump® II fonctionne de manière autonome et indépendante de toute source d'énergie.

Ils sont composés :

- D'un clapet de protection de l'orifice de remplissage
- D'une enveloppe de protection souple
- D'une membrane élastomérique en silicone contenant le médicament à perfuser
- D'un clamp pour arrêter ou reprendre la perfusion
- D'une tubulure en PVC sans DEHP
- D'un filtre 1,2 µm pour éliminer les bulles d'air et les particules
- D'un régulateur de débit

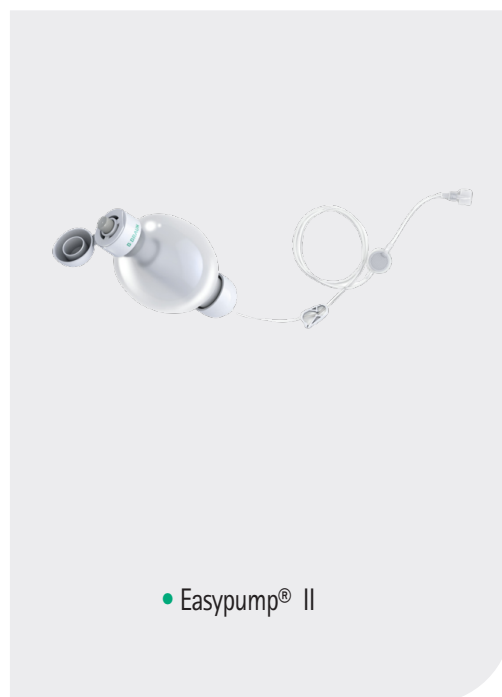

• Easypump® II

L'indication LT signifie «long-term» et s'applique aux diffuseurs permettant une perfusion entre 12 heures et 135 heures. L'indication ST correspond à «short-term» et s'applique aux diffuseurs permettant une perfusion de 30 minutes À 4 heures.

25 indique le temps nominal de perfusion, en heures.

LT 125-25-S

125 correspond au VOLUME NOMINAL de remplissage, en mL. Les diffuseurs Easypump® II sont disponibles avec des volumes pouvant aller de 50 à 500 mL.

S signifie "SOUPLE" et caractérise l'enveloppe de protection des diffuseurs de la gamme Easypump.

Nom	Volume nominal (ml)	Débit nominal (ml/h)	Conditionnement (unités)	Code article B. Braun
EASYPUMP II LT	125	5 ml/h	10	4540006-07
EASYPUMP II LT	270	2 ml/h	10	4540032-07
EASYPUMP II LT	270	10 ml/h	10	4540008-07
EASYPUMP II LT	100	2 ml/h	10	4540016-07
EASYPUMP II LT	270	5 ml/h	10	4540018-07

NOTES

[illegible]

[illegible]

B. Braun prend 5 engagements pour servir les clients au quotidien

Qualité

Simplicité

Proximité

Développement

Innovation

Car notre engagement au service de la santé, c'est d'abord un engagement envers nos clients.

Un engagement de **QUALITÉ** des solutions que nous leur offrons ; de **SIMPLICITÉ** de la relation avec eux et de **PROXIMITÉ** de nos équipes toujours à leur écoute ; et celui d'un véritable accompagnement pour **DÉVELOPPER** la performance de leurs activités grâce à une **INNOVATION** permanente.

Support dédié aux professionnels de la santé animale. Le vétérinaire s'engage à prendre connaissance des différentes informations concernant les matériels médicaux pour s'assurer qu'ils sont compatibles pour une utilisation pour des animaux.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Documents et photos non contractuels.

Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits.

Distribué par : B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun-vetcare.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition : Avril 2023 - VET_20230401